



MOUSSE SPORICIDE À BASE DE ClO_2 POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES NON-POREUSES



1 Pour assembler JET, prenez un pulvérisateur, dévissez les bouchons des flacons et, en suivant les indicateurs rouge A et bleu B sur l'étiquette du flacon, insérez les tubes dans les goulots respectifs des flacons.



2 Fixez les leviers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté du pulvérisateur. Assurez-vous que la buse soit alignée sur la ligne supérieure de la tête du pulvérisateur. JET est maintenant prêt à l'emploi.



3 Appliquez au moins 2 doses sur une lingette.



4 Essuyez sur la surface.



5 Assurez-vous que la surface reste humide pendant 1 minute. Appliquez plus de solution si nécessaire. Laissez **sécher**.



6 Quand vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Lisez la section "GRAND IMPACT" ci-dessous pour en savoir plus.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer:

- Utilisez les désinfectants (produit de type 2) avec précaution.
- Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
- Portez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
- JET est uniquement destiné à un usage professionnel.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en laiton, cuivre, aluminium, acier doux ou argent.
- Assurez-vous que la surface soit exempte de souillures importantes avant d'utiliser JET.



Consultez le guide utilisateur pour des instructions complètes.

GRAND IMPACT

Votre pulvérisateur JET peut être réutilisé en toute sécurité avec le prochain flacon JET. Pour ce faire, détachez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le pulvérisateur. Avant de suivre les instructions d'assemblage ci-dessus, rincez les tubes à l'eau du robinet et séchez-les avec une serviette en papier. Après utilisation, les flacons JET vides et les bouchons peuvent être envoyés au recyclage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

JET peut être conservé pendant 2 ans avant d'être utilisé et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 10°C et 35°C.

Une fois ouvert, JET peut être conservé 3 mois. Vous pouvez surveiller ceci en notant le jour où vous avez ouvert JET sur l'étiquette du flacon.

