

neodisher® IP Konz

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux



Principaux domaines d'utilisation :

Propriétés :

Entretien en profondeur et lubrification d'instruments chirurgicaux en laveurs-désinfecteurs au rinçage final.

neodisher IP Konz est un produit concentré à base d'huile de paraffine purifiée et d'agents émulsionnants.
La fine pellicule de **neodisher IP Konz** ne s'additionne pas sur les surfaces en acier et ne se résinifie pas durant le cycle de stérilisation.
Bien adapté pour un entretien en profondeur d'instruments chirurgicaux avant la stérilisation car film d'huile extrêmement fin empêche la persistance des germes.
Lors d'un lavage suivant, le film lubrifiant **neodisher IP Konz** s'élimine totalement.
A chaque cycle de lavage et de désinfection, utiliser à nouveau **neodisher IP Konz**.
neodisher IP Konz est déconseillé pour les instruments stérilisés à l'air chaud
neodisher IP Konz subit un contrôle bactériologique final et ne contient pas de germes végétatifs.

Utilisation et dosage :

En laveurs-désinfecteurs : 0,5 – 1 ml/l au rinçage final, dans le doseur approprié, dans une eau à 50 °C minimum.
Déconseillé en bain de trempage (risque d'apport de germes incontrôlés).
neodisher IP Konz est déconseillé pour les instruments stérilisés à l'air chaud
Après le traitement mécanique, on peut utiliser le lubrifiant complémentaire **neodisher IP Spray** comme alternative.
Ne pas mélanger à d'autres produits.

Expertises

En utilisation recommandée neodisher Ip Konz ne présente pas de risque toxicologique (Expertise sur la base de la norme EN ISO 10993-1) L'expertise toxicologique est disponible à la demande.

Homologation

Les matières actives sont enregistrées par FDA (No. 176210, 177120, 172878).

Données techniques :

Poids spécifique (20 °C) : 0,9 g/cm³
Viscosité (concentrée, 20 °C) : < 50 mPas

Composants :

Selon la recommandation européenne :
15 – 30 % tensioactifs non ioniques
> 30 % d'hydrocarbures aliphatiques (huile de paraffine DAB)
Agents de conservation

Marquage CE :

neodisher IP Konz est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Stockage :

2 ans à l'abri du gel selon les recommandations du fabricant. En cas de stockage à moins 10°C. Une turbidité réversible peut se produire.

neodisher[®] IP Konz

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux



Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher IP Konz n'est pas un produit classifié dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Lors de la manipulation du concentré, observer la recommandation suivante :

S 25 Eviter le contact avec les yeux.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Flacon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Bidon de 10 litres

FT 4306/2 - 2
09/03