



MOUSSE DE NETTOYAGE TRI-ENZYMATIQUE POUR LES SONDES D'ÉCHOGRAPHIE INVASIVES (ENDOCAVITAIRES) ET NON INVASIVES (SURFACES CUTANÉES)

La désinfection n'est efficace que lorsque la sonde a fait l'objet d'un nettoyage minutieux. Tristel Clean est une mousse de nettoyage tri-enzymatique spécialement conçue pour les sondes d'échographie de type endocavitaire (invasives) et de type externe (non invasives, pour surfaces cutanées).

Si Tristel Clean est utilisé pour le nettoyage et Tristel Duo ULT pour la désinfection de haut niveau, aucun rinçage intermédiaire n'est requis.



TRI-ENZYMATIQUE
CONFORME AUX NORMES
DE NETTOYAGE



LONGUE DURÉE
DEUX ANS DE DURÉE
DE CONSERVATION



COMPATIBLE
APPROUVÉ PAR LES
PRINCIPAUX FABRICANTS



PRATIQUE
PAS DE TREMPAGE
NÉCESSAIRE



MOBILE
POIDS LÉGER &
MANIPULATION PRATIQUE



MOUSSE
APPLICATEUR
NON AÉROSOL

COMPATIBILITÉ INÉGALÉE

La formule Tristel Clean est utilisée depuis plus de vingt ans pour les lingettes imprégnées Tristel Pre-Clean Wipe. Aucun autre nettoyant de sondes échographiques n'a été agréé pour sa compatibilité par un aussi grand nombre de fabricants que Tristel Clean.


- Advanced Tactile Imaging
- Arthrex
- Bard
- BK Ultrasound
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Echosens
- Exact Imaging
- Fujifilm/Sonosite
- GE Healthcare
- Hitachi
- Medcom
- Mindray
- Philips
- Siemens Healthcare
- Toshiba/Canon

Tristel
Clean


APPLICATIONS

Tristel Clean est spécialement conçu pour le nettoyage des sondes pour surfaces cutanées ainsi que des sondes endocavitaires.

Deux aliquotes de mousse couvriront une surface de 20cm x 50cm (0.1m²).

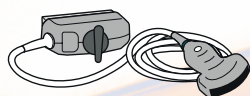

SONDES POUR
SURFACE CUTANÉE

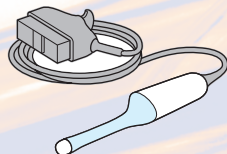

SONDES
ENDOCAVITAIRES

DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU AVEC TRISTEL DUO ULT

En tant que produit partenaire de Tristel Duo ULT et de Duo Wipes, Tristel Clean est conçu pour être utilisé dans le cadre d'une procédure complète de désinfection par ultrasons.

Après avoir éliminé les souillures et les matières organiques de la sonde avec Tristel Clean, vous pouvez utiliser Tristel Duo ULT pour la désinfection de haut niveau (DHN). Aucun rinçage intermédiaire ou après la procédure n'est requis.

Tristel Duo ULT consiste en dioxyde de chlore contenu dans une mousse spécialement conçue pour la désinfection de haut niveau des sondes d'échographie de type endocavitaire et de type externe (pour surfaces cutanées).

Tristel Duo offre rapidité, sécurité, efficacité et une excellence compatibilité matérielle.



RÉPARTIR

Tristel Clean sur
une lingette sèche.



NETTOYER

l'appareil jusqu'à l'élimination
visible de toute souillure et
matière organique. Si l'appareil
est fortement encrassé, répéter
le processus.



PROCÉDER À LA DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

de l'appareil avec Tristel Duo ULT.
Consulter le mode d'emploi du produit
pour des instructions complètes.

OPTIONS DE PRODUITS ET ACCESSOIRES

DUO WIPES

200 lingettes par distributeur / 6 distributeurs par boîte

Les lingettes Duo Wipes constituent un dispositif médical de classe I conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745)

TRISTEL CLEAN

310 aliquotes par flacon / 6 flacons par boîte

Tristel Clean est un dispositif médical de classe I conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745)

TRISTEL DUO ULT

310 aliquotes par flacons / 6 flacons par boîte

Tristel Duo ULT porte le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIa conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et à ses amendements 2007/47/CE

DUO DOK

Duo DOK permet de garder Tristel Duo à portée de main



Pour télécharger la documentation la plus récente, visitez le site www.tristel.com/ / ressources ou restez au courant des dernières avancées scientifiques de Tristel en consultant la page www.tristel.com/news