



Lingettes Duo

Lingettes neutres pour appliquer les produits Tristel Duo ULT, OPH et Clean

- 200 lingettes neutres sèches par container
- Taille 16x20 cm prédécoupées
- Non absorbantes
- De faible peluchage
- Polypropylène non tissées
- Compatibles avec tous les matériels et endoscopes, ne détériore pas les DM et capteurs



Container de 200
lingettes neutres,
compatibles.

Flacon de 240 ml
312 doses par flacon
155 détergences par flacon.

Flacon de 250 ml
312 doses par flacon
155 désinfections par flacon.



ÉTAPE 1



Enlever la gaine, enlever le gel à ultrason du dispositif médical avec une lingette neutre, puis appliquer la mousse détergente Tristel Clean sur une lingette sèche (de préférence Duo Wipes) pour effectuer le nettoyage.

ÉTAPE 2



Appliquer deux doses de Tristel Duo ULT sur une lingette sèche (de préférence Duo Wipes).


ÉTAPE 3



Utiliser la lingette pour étaler la mousse sur toute la surface de la sonde et assurez-vous que toutes les zones soient couvertes. L'essuyage continu de la surface n'est pas nécessaire et doit être évité pour ne pas endommager la lingette. Si nécessaire, utiliser un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans des rainures.

Note: Jeter la lingette utilisée conformément aux réglementations locales. Ne pas laisser macérer. Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 4

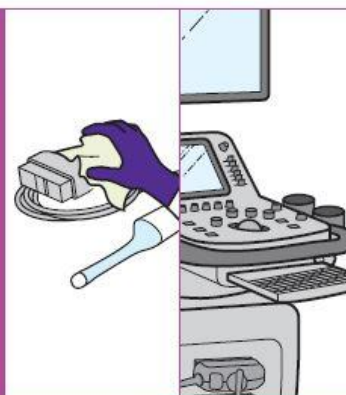

Utiliser Tristel Duo ULT pour une désinfection de haut niveau des surfaces pouvant entrer en contact avec la sonde, tels que les supports, les câbles et les connecteurs.

ÉTAPE 5



Laisser agir le produit sur la surface pendant au moins **30 secondes**.

Note: Stocker le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers pour éviter tout dommage ou recontamination.