

Brassard adulte 27x36 - Simple tube - Connecteur BP12



Code article	77701281
Réutilisable	OUI
Type de patient	Adulte 27 x 36cm
Tubulure	Simple
Chambre	SANS
Connecteur	BP12
Longueur du tube	50cm
Matériau	Nylon doux + TPU

Unité de conditionnement	1 sachet unitaire
Sans latex	OUI

Compatibilité	Connecteur spécial moniteurs DRAGER, GE, WELCH ALLYN, MINDRAY, PHILIPS
----------------------	--

Nettoyage et désinfection	<p>Les brassards doivent être soigneusement nettoyés avec du détergent spécifié avant d'être réutilisés. Il faut veiller à éviter toute infiltration de liquide dans la tubulure du brassard, les ouvertures du tuyau d'air et les vannes du système de gonflage. Le liquide dans le conduit d'air peut affecter la précision de la lecture de la pression artérielle et endommager les surveillances automatiques ou manuelles.</p> <p>MATÉRIAUX A UTILISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Détergent enzymatique tel que ENZOL (USA) ou CIDEZYME (UK) . Eau distillée . Solution d'Eau de Javel à 10% dans de l'eau distillée <p>Chiffon doux et brosse à poils doux Flacon pulvérisateur</p> <p>PROCÉDURE :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Préparer le détergent enzymatique (ou son équivalent) et une solution de blanchiment à 10% dans des flacons pulvérisateurs . Pulvériser le détergent sur les produits. Si le matériau est séché, laisser reposer pendant 1 minute . Essuyer la surface avec un chiffon doux . Utiliser une brosse à poils doux sur les zones sales et les surfaces irrégulières
----------------------------------	---