

# Gebruiksaanwijzing

## Subdermale Twisted

### Pair-Einmalnadelelektrode

Deutsch

#### Empfohlene Anwendung

Evoziertes Potential (EP)-Untersuchungen und intraoperatives Monitoring (IOM).

#### Maßnahmen

Ambu Neuroline subdermale Twisted Pair-Nadelelektroden sind ausschließlich für die Einpatientenanwendung. Nicht anwenden, wenn die Einzelpackung beschädigt oder bereits geöffnet wurde. Nur zum Einmalgebrauch.

#### Sterilisation

Sterilisation mit Ethylenoxid (ETO).

#### Verpackung

1 Nadelelektroden-set pro Packung.

#### Gebruiksaanwijzing

1. Die Sterilverpackung öffnen und die Einmalnadelelektrode entnehmen.
2. Den Leitungsanschluss an das Gerät anschließen und die Schutzröhrchen entfernen.
3. Die Elektrode nach Gebrauch in einem vorgesehenen Behälter entsorgen.  
Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

| Symbole                                                                            | Indikation                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| REF                                                                                | Katalognummer                 |
| LOT                                                                                | Chargenbezeichnung            |
|   | Verwendbar bis                |
| <b>Sterile EO</b>                                                                  | Sterilisation mit Ethylenoxid |
|   | Nur einmal verwenden          |
|   | Gebruiksaanwijzing beachten   |
|   | Herstellungsdatum             |
|  | Temperaturbegrenzung          |

Ambu® ist eine eingetragene Schutzmarke von Ambu A/S, Dänemark.  
Ambu A/S ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.

## Mode d'emploi

Français

### Électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée et à usage unique

#### Application recommandée

Potentiels évoqués (PE) et monitoring intra-opératoire (IOM).

#### Précautions

Les électrodes aiguilles sous-cutanées à paire torsadée Neuroline de Ambu sont exclusivement à usage unique. Ne pas utiliser si le sachet individuel est endommagé ou ouvert. Ne pas réutiliser.

#### Stérilisation

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).

#### Conditionnement

1 paire d'électrodes aiguilles par sachet.

#### Mode d'emploi

1. Déchirer le sachet stérile et sortir l'électrode aiguille à usage unique.
2. Placer le connecteur du fil dans l'équipement et enlever les tubes protecteurs.
3. Après usage, jeter l'électrode dans un conteneur prévu à cet effet.  
Ne pas réutiliser, ni re-stériliser.

| Symbole                                                                             | Légende                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| REF                                                                                 | Référence du catalogue                |
| LOT                                                                                 | Numéro de série                       |
|  | Utiliser jusqu'à                      |
| <b>Sterile EO</b>                                                                   | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène        |
|  | Ne pas réutiliser                     |
|  | Attention, voir notice d'instructions |
|  | Date de fabrication                   |
|  | Limite de température                 |

Ambu® est une marque déposée de la société Ambu A/S, Danemark.  
Ambu A/S est certifiée conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.