

Brochure d'information PregnaOne Platform et Pregnabit Pro



Table des matières

Introduction.....	1
Copyright	4
Fabricant/Distributeur.....	5
Symboles/Pictogrammes.....	6
Spécifications et exigences techniques.....	7
Démarrer	9
Se connecter (Platform)	9
Créer/rechercher un "PIN" (= code NIP) (Professionnel de santé)	12
Créer un enregistrement CTG	13
Enregistrement CTG sans connecter la patiente d'abord (Sage-femme)	13
Enregistrement CTG avec patiente connectée (professionnel de santé à l'hôpital)	18
Démarrage rapide (Professionnel de santé)	23
Instructions à la patiente.....	25
Platform.....	29
Rechercher un enregistrement CTG sur la plateforme	29
Connecter un enregistrement CTG	31
Évaluation CTG enregistrement	33
Compléter/modifier les données de la patiente	37
Rapport.....	38
Fermer la commande et déconnecter l'appareil.....	40
Informations générales	43
Nettoyage et désinfection	43
Instructions du professionnel de santé à la patiente.....	45
Questions fréquentes (FAQ).....	47
Release notes	50
Annexes	51
Plan étape par étape pour la pratique des sages-femmes	51
Plan étape par étape pour l'hôpital	54
Index.....	59



Introduction

Cette brochure* fournit des informations sur l'utilisation quotidienne de PregnaOne Platform et l'appareil Pregnabit Pro**. Avant de commencer, veuillez lire attentivement le manuel original du fabricant.

Une fois connecté sur la plateforme, vous pouvez consulter la version la plus récente du manuel PregnaOne Platform sous le bouton « Aide » et pouvez la télécharger. Le manuel Pregnabit Pro est inclus dans chaque kit fourni. Une copie peut être demandée auprès du distributeur.

Cette brochure d'information s'adresse aux utilisateurs professionnels de la plateforme : les sages-femmes et médecins qui utilisent PregnaOne Platform pour surveiller le bien-être fœtal via l'analyse des données du télé-enregistrement CTG.

Indications (PregnaOne Platform)

PregnaOne Platform est destinée à être utilisée par le personnel médical et les patientes au troisième trimestre de grossesse, notamment dans les cas suivants :

- grossesse au-delà de la date de terme calculée,
- changements dans la nature des mouvements du fœtus mesurés par la patiente,
- pathologies de la patiente : tension artérielle élevée, diabète, maladie rénale, maladie hépatique, anomalies cardiaques, maladies de la glande thyroïdienne, syndrome des anti-phospholipides, etc.,
- complications de la grossesse : insuffisance placentaire, troubles de la circulation sanguine dans le cordon ombilical, oligohydramnios, polyhydramnios, troubles de la croissance du fœtus in utero, incompatibilité rhésus, diabète, hypertension artérielle causée par la grossesse, etc.,
- antécédents de décès in utero,
- femme enceinte âgée de plus de 40 ans,
- anomalies révélées lors des précédents examens CTG.

Contre-indications (PregnaOne Platform)

Il n'existe aucune contre-indication à l'utilisation de PregnaOne Platform. PregnaOne Platform a été conçue pour prendre en charge des fichiers au format Pregnabit. Par conséquent, l'utilisation de PregnaOne Platform est limitée pour le moment par des contre-indications liées à l'usage d'appareils CTG mobiles autres que Pregnabit.

Indications (Pregnabit Pro)

Le dispositif médical Pregnabit Pro est destiné à être utilisé par les patientes au troisième trimestre de grossesse, dans les cas suivants :



- détection précoce de conditions à risque pour le fœtus suite à une augmentation de l'hypoxie et une acidose métabolique,
- en cas de changements dans la nature des mouvements du fœtus mesurés par la patiente,
- en cas de maladies liées à la grossesse : hypertension, diabète, affections rénales, affections hépatiques, troubles cardiaques, affections de la glande thyroïdienne, syndrome des anti-phospholipides et autres,
- complications de la grossesse : insuffisance placentaire, troubles de la circulation sanguine dans le cordon ombilical, micro-hydrocéphalie, poly-hydrocéphalie, troubles de la croissance du fœtus in utero, incompatibilité rhésus, diabète gestationnel, hypertension artérielle causée par la grossesse et autres,
- antécédents de décès du fœtus in utero,
- femme enceinte âgée de plus de 35 ans,
- grossesse après un traitement prolongé contre la stérilité,
- grossesse au-delà de la date de terme calculée,
- anomalies détectées lors d'examens CTG précédents,
- apparition de maladies infectieuses qui affectent les soins de routine de la femme enceinte ou exigent une évaluation plus approfondie du bien-être du fœtus,
- femmes enceintes qui suivent un traitement oncologique.

Contre-indications (Pregnabit Pro)

- implants médicaux actifs, comme par exemple un stimulateur cardiaque (risques de perturbation de l'appareil),
- grossesses multiples,
- lésions ou blessures cutanées aiguës ou chroniques au niveau de la zone de contact entre le dispositif et le corps de la patiente,
- âge gestationnel : l'examen CTG n'est pas recommandé avant le 32^e semaine de grossesse, sauf sur avis médical,
- en cas d'allergie au latex ou à l'un des composants du Pregnabit Pro qui entrent en contact avec le corps, l'examen n'est pas recommandé,
- chez les femmes ayant un IMC supérieur à 30 avant la grossesse, l'examen CTG peut être difficile à réaliser du fait que le signal FHR est difficile à détecter. Il est recommandé dans ce cas de contrôler en permanence la valeur FHR sur l'écran de l'appareil.

La présente brochure d'information décrit comment les utilisateurs professionnels peuvent accéder à PregnaOne Platform à laquelle les patientes sont connectées, comment connecter un Pregnabit Pro à une patiente et comment consulter les CTG sur la plateforme.

L'utilisation du Pregnabit Pro est également expliquée. Cette brochure fournit également des réponses aux questions les plus fréquentes.



- Les illustrations figurant dans ce document viennent étayer les explications et ne sont en aucun cas des représentations exactes.
- Avant d'utiliser le logiciel, l'utilisateur doit avoir pris connaissance des recommandations et mises en garde générales et spécifiques (en vigueur pour le logiciel concerné). Pour ces recommandations/avertissements, reportez-vous au chapitre « Informations importantes » du manuel du fabricant.
- Lorsque le document parle de « première intention » et/ou de « deuxième intention », c'est à la situation aux Pays-Bas qu'il fait référence. Le terme « première intention » signifie ici les professionnels de la santé indépendants (par exemple une sage-femme) non liés au cadre hospitalier. Le terme « deuxième intention » signifie les soins prodigués au sein d'un hôpital ou d'une clinique.
- Certaines parties du logiciel/matériel sont exprimées en anglais. Cette brochure d'information fait référence à cette terminologie anglaise à plusieurs endroits.

** Cette édition est valable à partir du numéro de version indiqué et jusqu'à la publication d'une prochaine édition. Vous pouvez demander la version la plus récente auprès d'ICT HCTS (service d'assistance).*

Copyright

ICT Healthcare Technology Solutions B.V. © 1985 - 2023

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, sauvegardée dans un système de recherche automatique ou transmise sous n'importe quelle forme, ni de façon électronique ou analogique, ni par des photocopies ou par quelques moyens que ce soit, sans l'accord préliminaire par écrit des ayants droits.

Pour des informations, veuillez contacter ICT HCTS.



ICT HCTS consacre une attention et un soin particuliers au contenu de ce document. Toutes les données relatives aux patientes présentées sont fictives, les similitudes avec des personnes et des situations réelles sont purement fortuites.

Il est toutefois possible qu'une partie des informations contenues dans ce document soit incomplète, incorrecte ou obsolète. ICT HCTS s'emploie à mettre régulièrement à jour les informations de ce document. Des modifications éventuelles du contenu sont effectuées sans avis préalable.

Comme ICT HCTS améliore continuellement ses produits, les captures d'écran de ce document peuvent, dans une certaine mesure, différer de l'apparence réelle de l'application. En outre, la version, l'autorisation et les paramètres affectent également l'apparence de l'application.

ICT HCTS décline toute responsabilité pour les dommages, directs ou indirects, quels que soit leur nature, qui seraient causés par ou liés à l'utilisation de ce document, ou à une éventuelle impossibilité temporaire de le consulter.

ICT HCTS décline également toute responsabilité pour les dommages, directs ou indirects, quels que soit leur nature, qui seraient causés par ou liés à l'utilisation de données obtenues dans ce document.



Fabricant/Distributeur



Support

ICT Healthcare Technology Solutions France SAS
7 rue du parc de Clagny
7800 Versailles
France
Support technique France : 01 76 38 11 93
Téléphone : 06 231 744 57 / 06 083 331 86
Fax : +31 - (0)30 - 6621508
Email : info-hcts-france@ict.eu
Site web : ICT Healthcare



Fabricant

Nestmedic S.A.
Pasymaska 20
01-993 Varsovie



Distributeur

ICT Healthcare Technology Solutions B.V.
Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
Les Pays-Bas



Version du logiciel PregnaOne Platform 1.3.1 / Date de sortie 2023-03-20
Version du logiciel Pregnabit Pro Appareil 1.1.4 / Date de sortie 2023-04-03
Version de la documentation 1.3.1 / 1.1.4 / Date de sortie 2023-04-26
Nom du document: Brochure d'information PregnaOne Platform et Pregnabit Pro FR 1.3.1-1.1.4



Dispositifs médicaux (PregnaOne Platform, Pregnabit Pro), CE Classe IIA



Symboles/Pictogrammes

Ce chapitre explique la signification des symboles et pictogrammes figurant dans cette brochure et/ou sur (le dessous de) l'unité PregnaBit Pro.



Les avertissements dans ce document sont indiqués par ce symbole. Un avertissement attire l'attention de l'utilisateur sur de graves conséquences potentielles (décès, blessure ou événement indésirable) pour l'utilisateur et/ou la patiente.



Remarque, attention ou conseil: Informations additionnelles pour l'utilisation du logiciel.



Si un mot est entre crochets, il s'agit d'un bouton dans le logiciel.



Ce symbole indique où les clients / gestionnaires peuvent s'adresser pour obtenir des informations.



Ce symbole indique les coordonnées du fabricant.



Ce symbole figure sur l'étiquette du dispositif médical et indique la date de fabrication.



Ce symbole indique les coordonnées du distributeur.



Ce symbole indique la Conformité Européenne du produit. Il indique ainsi la directive et les conditions de la conformité.



Ce symbole indique que ce produit est ce que l'on appelle un « dispositif médical », tel que prévu dans le Règlement (UE) 2017/745 (DDM).



Référence catalogue



Spécifications et exigences techniques

Spécifications de l'équipement Pregnabit Pro

Spécifications générales

- Dimensions : 16,3 cm x 8,5 cm x 4,4 cm.
- Poids de l'appareil : 500 g (hors transducteurs), 1 200 g (avec transducteurs).
- Température d'utilisation : 5-35 °C.
- Précision de mesure ± 5 bpm.
- Batterie lithium-polymère 3 500 mAh.
- Écran tactile de 5 pouces.
- IP 22.
- Chargeur, sortie : 5 V / 2 A CC, entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A.

Composants de l'appareil

- Unité SOM basée sur le module Quectel intégré.
- Amplificateur audio couplé à un haut-parleur.
- Module de télécommunication GSM fonctionnant selon la norme LTE.
- CISPR 11 Classe 1 Groupe B.
- Module Bluetooth 4.2 LE (faible énergie).
- Module de surveillance de la charge et de protection des cellules.
- Modules de communication pour la communication avec les appareils périphériques.

Câbles convertisseurs compris

- Prise électrique standard Philips.
- FHR : ultrason, fréquence 1 MHz, puissance <10 mW/cm².
- IP X1.
- Zone d'application de type B.

Oxymètre de pouls compris

- Communication Bluetooth 4.0.
- Écran couleur OLED.

Conditions requises pour l'utilisation de PregnaOne Platform

Le logiciel PregnaOne Platform fonctionne correctement sur la plupart des appareils, comme : tablettes, smartphones, ordinateurs fixes, ordinateurs portables, avec Windows, Android et les systèmes iOS. Le logiciel ne requiert aucune installation ni application supplémentaire et n'est accessible qu'avec un navigateur. Pour un bon fonctionnement, les navigateurs et systèmes d'exploitation suivants doivent être utilisés :



Configuration requise pour le PC

- Au moins 4 Go de RAM pour l'utilisation de la plateforme séparée pour les patientes.
- Au moins 8 Go de RAM et un moniteur avec une résolution verticale de 1 366 pixels pour les utilisateurs professionnels.

Navigateurs web

- Google Chrome - à partir de la version numéro 88.0.4324 et au-delà de la branche stable.

Systèmes d'exploitation

- Microsoft Windows - versions 7, 8, 8.1, 10 et supérieure.
- Apple macOS - version 10.12 et supérieure.
- Linux - distribution avec une interface utilisateur graphique fonctionnant avec un noyau version 4.0 et supérieure de la branche stable.

Appareils mobiles (pour le mode mobile)

- Équipés d'un écran d'au moins 4,5 pouces avec une résolution d'au moins 320 pixels.

Systèmes d'exploitation mobiles (pour le mode mobile)

- Android - à partir de la version 7.0 (nommée Nougat) ou supérieure.
- iOS - à partir de la version numéro 13.0 ou supérieure.

Logiciels supplémentaires

- Logiciel installé au préalable pour visionner les documents PDF (également applicable au mode mobile).

Environnement de travail

- L'opérateur doit connaître la réglementation RGPD.
- Logiciel anti-virus recommandé.
- Logiciel anti-malware recommandé.
- Pare-feu recommandé.
- Réseau avec possibilité de cryptage de transmission SSL.

Démarrer

Se connecter (Platform)

- [Première connexion](#)
- [Se connecter](#)
- [Choisir la langue](#)
- [Se déconnecter](#)



Les procédures ci-dessous s'appliquent pour un seul utilisateur sur un seul ordinateur.

Première connexion

1. Démarrez un navigateur (par ex. Chrome©) sur l'ordinateur et ouvrez la page « pregnaone.com ».
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis cliquez sur [Se connecter].



- Il s'agit de l'adresse e-mail que vous avez indiquée à ICT HCTS. Vous recevez un e-mail de « noreply@pregnaone.com » à cette adresse. Cet e-mail contient un lien. Cliquez dessus pour créer un mot de passe unique.
- Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez votre dossier spam/e-mails indésirables. Si l'e-mail n'y figure pas, il peut arriver que l'e-mail (l'expéditeur) ait été bloqué. Dans ce cas, vous devez contacter le service ICT de l'établissement et indiquer que l'adresse « @pregnaone.com » ne doit pas être bloquée.

3. L'écran suivant apparaît :





4. Sélectionnez ici si vous souhaitez un accès unique ou ajouter l'appareil à la liste de confiance.

- Unique : si vous ne souhaitez travailler qu'une seule fois sur cet ordinateur, cliquez sur [Accès unique]. Vous recevez un code à l'adresse e-mail avec laquelle vous êtes connecté que vous devez saisir et confirmer sur l'écran suivant.
- Ajouter à la liste de confiance : si vous souhaitez utiliser cet ordinateur plus souvent, cliquez sur [Ajouter à la liste de confiance]. Sur l'écran suivant, saisissez le nom de l'appareil (utilisez un nom identifiable, par ex. nom du cabinet + étiquette sur la mallette). Ajoutez une coche à côté du texte affiché en-dessous et cliquez sur [Ajouter un appareil]. Vous recevez un code à l'adresse e-mail avec laquelle vous êtes connecté que vous devez saisir et confirmer sur l'écran suivant. À partir de maintenant, vous pouvez uniquement vous connecter sur cet ordinateur avec votre adresse e-mail et votre mot de passe et vous avez besoin d'un code.



- Ajouter à la liste de confiance : cela s'applique uniquement sur l'ordinateur qui possède l'adresse IP correspondante. Si vous souhaitez accéder depuis un autre ordinateur (une adresse IP différente), vous devez refaire la procédure.
- Par défaut, vous recevez le code par e-mail. Toutefois, il est possible d'indiquer à l'administrateur que vous souhaitez utiliser une application Authenticator (par exemple Google® ou Microsoft®).

5. La plateforme s'ouvre.

Se connecter

Votre prochaine connexion sur cet ordinateur dépend du choix que vous avez fait lors de la première connexion.

- Si vous avez sélectionné « Accès unique » la fois précédente, répétez les étapes décrites dans la section « Première connexion ».
- Si vous avez sélectionné « Ajouter à la liste de confiance » la fois précédente, vous pouvez vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Choisir la langue

Une fois connecté sur la plateforme, vous pouvez modifier la langue. Pour cela, cliquez sur le petit drapeau en haut à gauche de l'écran et sélectionnez la langue souhaitée dans l'écran contextuel.



Se déconnecter

Si l'utilisateur n'est pas actif sur la plateforme, il est automatiquement déconnecté (au bout de quelques minutes).

L'utilisateur peut également se déconnecter de lui-même en cliquant sur le bouton de déconnexion en haut à gauche.



Si la plateforme n'est plus utilisée, l'utilisateur doit se déconnecter ou fermer la plateforme. Si les utilisateurs ne se déconnectent pas, l'accès à la plateforme reste ouvert et d'autres personnes peuvent saisir / modifier / supprimer des données sous le nom de l'utilisateur connecté à ce moment-là.



Créer/rechercher un "PIN" (= code NIP) (Professionnel de santé)

Si en tant que professionnel de santé vous souhaitez utiliser un appareil Pregnabit Pro, vous avez besoin d'un "PIN" personnel. Vous pouvez le créer/rechercher sur la plateforme.

Vous pouvez utiliser ce "PIN" sur tous les appareils qui sont connectés à l'établissement/au cabinet pour lequel vous travaillez. Chaque professionnel de santé utilise un "PIN" unique et personnel.

Procédure

1. Démarrez un navigateur (par ex. Chrome©) sur l'ordinateur et ouvrez la page « pregnaone.com ». Connectez-vous à l'aide de votre adresse e-mail, mot de passe et authentification à 2 facteurs. Voir aussi le chapitre « [Se connecter](#) ».
2. La plateforme s'ouvre.
3. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir vos données/établissements/droits.
4. Dans la partie intermédiaire de l'écran, défilez jusqu'à la section « Codes » au bas de l'écran et cliquez sur [Modifier] en regard de « PIN utilisé pour se connecter à l'appareil ».
5. Créez un "PIN" et cliquez sur [Enregistrer]. Vous avez terminé sur la plateforme et pouvez vous déconnecter. Cliquez sur le bouton [Déconnecter] en haut à gauche.





Créer un enregistrement CTG

Enregistrement CTG sans connecter la patiente d'abord (Sage-femme)

Voici un exemple dans lequel un enregistrement CTG est créé puis connecté à une patiente.

Créer un enregistrement CTG

1. Sortez le kit Pregnabit Pro et préparez tout le matériel nécessaire.
2. Positionnez la patiente.
3. Placez les bandes ventrales (2 pièces) derrière le dos et autour du ventre afin de pouvoir aisément positionner/fixer les transducteurs.



Les bandes ventrales sont jetables. Utilisez 1 jeu par patiente.

4. Avant d'utiliser Pregnabit Pro, le statut de l'appareil doit être configuré sur « Pour un médecin » par le professionnel de santé. Procédure : Connectez-vous à la plateforme > Allez à l'onglet « Appareils » > Liste » > Double-cliquez sur l'appareil correspondant > Cliquez sur « Modifier la disponibilité » > Sélectionnez « Pour un médecin » et cliquez sur [Confirmer].
5. Allumez le Pregnabit Pro à l'aide du bouton situé sur le côté gauche.
6. L'écran de connexion disparaît. Saisissez votre "PIN" (= code NIP) personnel (voir le chapitre « [Créer/rechercher un PIN](#) ») et appuyez sur « Se connecter ».
7. Cliquez sur [Examen rapide].



Ce bouton n'est pas disponible si le statut du Pregnabit Pro n'est pas configuré sur « Pour un médecin ». Voir étape 4.

8. Saisissez une note et sauvegardez-la en cliquant sur la coche verte.



Il est conseillé de saisir ici le numéro de la patiente et/ou le nom/la date de naissance de la patiente. Cela vous permet de vérifier par la suite que vous avez connecté le bon enregistrement à la bonne patiente.

9. Cliquez sur [Commencez l'examen].
10. Prenez le transducteur FHR et branchez-le sur le dessus de l'appareil. Bien branché (blanc sur blanc) ? L'icône FHR revient alors orange (voir illustration de l'étape 13).
11. Appliquez du gel pour échographie sur le côté plat du transducteur FHR et appliquez celui-ci sur le ventre. Fixez le transducteur à l'aide de l'une des bandes ventrales.
12. Branchez le transducteur TOCO sur le dessus de l'appareil (gris sur gris) et placez-le/fixez-le sur le ventre de la patiente.
13. Appliquez l'oxymètre de pouls sur l'index (gauche) de la patiente.
14. Lorsque les transducteurs et l'oxymètre de pouls sont bien raccordés, l'icône TOCO devient verte. L'icône du transducteur FHR et de l'oxymètre de pouls sont orange. Dès que le transducteur HFR/l'oxymètre de pouls reçoit un signal, ces icônes deviennent également vertes. De gauche à droite : TOCO, oxymètre de pouls et FHR.



15. Il est possible ensuite de compléter un questionnaire sur le bien-être de la patiente. Si cela n'est pas nécessaire, cette partie peut être ignorée et l'examen peut commencer.



Le questionnaire pour la patiente (Pregnabit Pro) peut être activée/désactivée par l'administrateur (distributeur). Ce réglage est valable par client/réglage pour tous les appareils qui y sont utilisés.

16. Appuyez sur [Démarrer l'examen] pour lancer l'enregistrement.



17. Les mouvements du fœtus peuvent être marqués en appuyant sur le bouton représentant un petit pied à l'écran ou situé sur le côté de l'appareil.
18. Appuyez sur l'icône du haut-parleur (au bas de l'écran) pour régler le volume si besoin.
19. L'examen dure 30 minutes minimum. Le temps restant est affiché à l'écran.



Durée de l'enregistrement

La durée d'enregistrement est définie par le distributeur (en accord avec le client) sur 30, 45 ou 59 minutes. Ce réglage s'applique à tous les appareils Pregnabit Pro du client en question.

La modification de la durée d'enregistrement n'exerce aucune influence sur les enregistrements qui ont été effectués précédemment. Les modifications ne sont exécutées qu'après le redémarrage de l'appareil.

L'enregistrement CTG commence au moment où l'appareil perçoit le rythme cardiaque du fœtus. L'enregistrement CTG se ferme (après l'heure fixée) uniquement si la qualité de l'enregistrement est suffisante pour procéder à l'évaluation. Le CTG est automatiquement prolongé si :

- 25 % de l'enregistrement est perdu en raison d'une qualité trop faible ou de l'interruption de l'enregistrement et
- l'enregistrement comporte des trous qui ne permettent pas de déduire les données manquantes.

L'enregistrement est analysé juste avant la fin du temps d'enregistrement. S'il est question des deux anomalies dans l'enregistrement susmentionnées, plusieurs possibilités s'offrent à vous (en fonction de la durée d'enregistrement définie) :

- Dans le cas d'un enregistrement de 30/45 minutes : l'enregistrement est prolongé (de 5 à 30 minutes). La durée de la prolongation est calculée/définie automatiquement par le logiciel. À la fin de la prolongation, il est une nouvelle fois analysé si les 30 dernières minutes (les plus récentes) de l'enregistrement fournissent suffisamment de données. Si tel est le cas, l'enregistrement est fermé et envoyé. Ce n'est pas le cas ? Une nouvelle prolongation est définie (selon la procédure décrite ci-dessus). Il est possible de prolonger jusqu'à une durée d'enregistrement totale de 59 minutes. Passé ce délai, l'enregistrement est toujours fermé et envoyé.
- Dans le cas d'un enregistrement de 59 minutes : l'enregistrement n'est pas prolongé et est fermé. Le résultat est envoyé.



20. L'examen s'arrête automatiquement). Besoin d'arrêter plus tôt ? Appuyez sur [Abandonner l'examen]. Un message de confirmation apparaît. Voulez-vous vraiment arrêter ? Cliquez sur [Interrompre]. Envie de continuer ? Cliquez sur [Non].

21. Lorsqu'un tensiomètre (séparé) est fourni, la tension artérielle peut être mesurée (si besoin).

- Mesurer ? Mettez le brassard autour du bras de la patiente et cliquez sur le bouton [Marche] du tensiomètre.



- La mesure est automatiquement transférée sur le Pregnabit Pro. Effectuer une nouvelle mesure ? Réitérez la mesure. Prêt ? Appuyez sur le bouton [Continuer] sur l'appareil Pregnabit Pro et déconnectez le tensiomètre de la patiente. Le tensiomètre s'éteint automatiquement.
- Pas de mesure de la tension artérielle ? Appuyez directement sur [Ignorer] sur le Pregnabit Pro.



En cas de répétition de la mesure de la tension artérielle, n'appuyez pas sur [Ignorer] ou [Suivant]. Cela effacerait la valeur mesurée et aucune nouvelle mesure ne serait enregistrée dans cet examen. Pour mesurer à nouveau la tension artérielle, appuyez sur le bouton du tensiomètre. La valeur précédente est automatiquement remplacée par la nouvelle valeur.

22. L'appareil Pregnabit Pro envoie à présent les (dernières) données à la plateforme. Attendez que l'opération soit terminée puis appuyez sur [Retour à l'écran d'accueil]. L'envoi rencontre des problèmes ? Vous pouvez trouver une explication dans la « [Questions fréquentes \(FAQ\)](#) ».

23. Appuyez d'abord sur [Retour à l'écran d'accueil], puis sur [Se déconnecter]. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton (barré) situé sur le côté enfoncé quelques secondes. Un message apparaît à l'écran. Cliquez sur [Power off].



Il est important d'éteindre l'appareil Pregnabit Pro de cette façon. Si vous appuyez simplement sur le bouton d'arrêt, l'appareil n'est pas totalement mis hors tension et la batterie se vide lentement.



- 24.** Retirez l'oxymètre de pouls et les transducteurs de la patiente et débranchez les transducteurs de l'appareil. Essuyez le matériel et le ventre de la patiente et rangez l'appareil dans la mallette.



Les lingettes désinfectantes fournies doivent uniquement servir à nettoyer les transducteurs et l'appareil. Pour essuyer le ventre de la patiente, utilisez une serviette (en papier).

- 25.** L'enregistrement doit maintenant être connecté à la bonne patiente. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez le chapitre « [Platform, connecter un enregistrement CTG](#) ».



Enregistrement CTG avec patiente connectée (professionnel de santé à l'hôpital)

Voici un exemple dans lequel l'enregistrement CTG à effectuer (par exemple par la patiente chez elle) est directement connecté à la patiente concernée.

Cela concerne les établissements qui **ne sont pas connectés** à un système d'informations (d'un hôpital) (par exemple Mosos® ou Epic®).

Enregistrement CTG

Plusieurs procédures sont possibles. La procédure à suivre dépend du type de patiente :

- [Exemple 1](#) pour une nouvelle patiente. Cette patiente n'est pas encore enregistrée dans PregnaOne Platform et effectue pour la première fois un enregistrement CTG à l'aide de l'appareil Pregnabit Pro. Cette patiente doit d'abord être enregistrée sur la plateforme. Après cela, il est possible de créer une nouvelle commande.
- [Exemple 2](#) pour une patiente déjà enregistrée qui a déjà effectué un enregistrement CTG avec l'appareil Pregnabit Pro au cours de sa grossesse actuelle. Il existe déjà une commande pour cette patiente.
- [Exemple 3](#) pour une patiente déjà enregistrée avec une nouvelle grossesse qui a déjà effectué des enregistrements CTG avec l'appareil Pregnabit Pro au cours d'une grossesse précédente.

Exemple 1: Préparation par le professionnel de santé

Exemple 1 pour une nouvelle patiente. Cette patiente n'est pas encore enregistrée dans PregnaOne Platform et effectue pour la première fois un enregistrement CTG à l'aide de l'appareil Pregnabit Pro. Cette patiente doit d'abord être enregistrée sur la plateforme. Après cela, il est possible de créer une nouvelle commande.

1. Connectez-vous à PregnaOne Platform. Vous trouverez plus d'informations sur la connexion dans le chapitre « [Se connecter](#) ».
2. Dans la barre verticale à gauche, cliquez sur [Patients].
3. Cliquez sur [+ Ajouter une patiente] en haut à droite.
4. Utilisez le formulaire standard qui s'affiche ou une version raccourcie. Dans ce dernier cas, cliquez sur le bouton [Utiliser un formulaire abrégé] au bas de l'écran. Dans la version raccourcie, vous avez moins d'informations d'identification/de contact à saisir. L'anamnèse à saisir est la même.
5. Saisissez/complétez les informations.



- N° ID personnel : saisissez ici le numéro de la patiente par exemple. / Numéro de sécurité sociale.
 - Partager le panel de la patiente : cette fonction n'est pas utilisée et ne doit pas être sélectionnée. Elle s'applique uniquement dans les pays dans lesquels les patientes louent elles-mêmes l'appareil et se connectent à la plateforme.
 - Personne qui suit (accompagne) la grossesse : sélectionnez ici le professionnel de santé responsable et cliquez sur [Valider].
 - Paramètres d'affichage de l'examen: sélectionnez la case à cocher située devant « Examens disponibles en cours ». Ainsi, un professionnel de santé peut toujours regarder en direct (sur la plateforme) l'enregistrement effectué par la patiente chez elle. Connectez-vous à l'appareil en tant que professionnel de santé et effectuez vous-même l'enregistrement. L'enregistrement est toujours transmis par streaming et un professionnel de santé peut le regarder.
6. Cliquez ensuite sur [Ajouter des données médicales].
 7. Complétez les données médicales. Puis cliquez sur [Ajouter des données concernant de la grossesse].
 8. Une fois les données de la grossesse (obligatoires) complétées, appuyez sur [Ajouter des données détaillées concernant les antécédents médicaux].
 9. Tout est complété ? Cliquez sur [Terminer et sauvegarder]. Un écran d'aperçu s'affiche avec plusieurs onglets. Le premier onglet donne un aperçu des données saisies. Vous pouvez éventuellement y apporter des modifications.
 10. Ouvrez l'onglet « Qualification pour le monitoring foetal » et cliquez sur [Délivrer une qualification]. Sélectionnez la case à cocher située devant « Qualification positive » et cliquez sur [Confirmer].
 11. Cliquez ensuite sur [Commandes] > [Nouveau] dans la barre verticale de gauche. En haut à droite de l'écran, cliquez sur [+ Nouvelle commande] et recherchez/sélectionnez la patiente concernée. Puis, cliquez sur [Enregistrer].
 12. Faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur [Attribuer et démarrer un appareil] au bas de l'écran.
 13. Vous pouvez attribuer l'appareil dans l'écran contextuel. Le numéro est indiqué sur un autocollant collé derrière le Pregnabit Pro. Sélectionnez le bon appareil puis cliquez sur [Valider].



Si le numéro de l'appareil n'apparaît pas dans la liste, cela signifie que l'appareil n'est pas encore connecté à une autre patiente. Déconnectez l'appareil. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « [Platform, Fermer la commande et déconnecter l'appareil](#) ».

14. Au bas de l'écran, le "PIN" (= code NIP) qui doit être saisi par la patiente est indiqué dans « code pin pour la patiente ». La patiente a besoin de ce code pour se connecter à l'appareil Pregnabit Pro.



La patiente a oublié le "PIN" et une commande est déjà en cours ? Connectez-vous à la plateforme, cliquez sur [Commandes] à gauche, puis sur [Dans la mise en oeuvre]. Dans la liste, recherchez la patiente concernée : le "PIN" apparaît dans la colonne de droite.

15. Vous devez délivrer l'appareil à la patiente sur la plateforme. Procédure : ouvrez l'onglet « Appareils > Liste » > Cliquez sur l'appareil concerné > Activez le curseur derrière « Appareil remis ».
16. Vous pouvez maintenant expliquer à la patiente comment l'appareil Pregnabit Pro fonctionne et lui remettre la mallette abritant tous les composants du Pregnabit Pro.
17. Les enregistrements CTG que la patiente réalise chez elle apparaissent sur la plateforme, sous « Examens > Examens à domicile » (barre verticale de gauche).
18. Pour plus d'informations sur la recherche d'enregistrements sur la plateforme, consultez le chapitre « [Platform, rechercher un enregistrement CTG](#) ». Pour plus d'informations sur l'évaluation des enregistrements, consultez le chapitre « [Platform, évaluer un enregistrement CTG](#) ».
19. Lorsque la patiente rend la mallette à la fin des enregistrements nécessaires, le professionnel de santé doit fermer la commande et déconnecter l'appareil de la patiente.

L'appareil est ainsi libéré et peut être délivré à une autre patiente. Pour plus d'informations sur la fermeture de la commande et la déconnexion de l'appareil, consultez le chapitre « [Platform, Fermer la commande et déconnecter l'appareil](#) ».

Exemple 2: Préparation par le professionnel de santé



Exemple 2 pour une patiente déjà enregistrée qui a déjà effectué un enregistrement CTG avec l'appareil Pregnabit Pro au cours de sa grossesse actuelle. Il existe déjà une commande pour cette patiente.

1. La patiente a-t-elle déjà effectué des enregistrements à domicile au cours de cette grossesse ? Vérifiez si une commande est encore en cours.
2. Connectez-vous sur la plateforme, cliquez sur [Patients] et recherchez la patiente en question. Cliquez sur la ligne du nom de la patiente.
3. Sur l'écran suivant, allez à l'onglet « Commandes » et vérifiez si une commande est encore en cours (filtrez sur « Dans la mise en oeuvre »).
4. Tant qu'une commande est en cours, la patiente a l'appareil connecté chez elle et peut effectuer elle-même un enregistrement. Reportez-vous aux points 16 à 18 de [l'exemple 1](#). Aucune commande n'est en cours ? Connectez-vous sur la plateforme et suivez les étapes 11 à 18 de [l'exemple 1](#).

Exemple 3: Préparation par le professionnel de santé

Exemple 3 pour une patiente déjà enregistrée avec une nouvelle grossesse qui a déjà effectué des enregistrements CTG avec l'appareil Pregnabit Pro au cours d'une grossesse précédente. Pour cette patiente, le professionnel de santé doit clôturer la grossesse précédente, vérifier les données (identification/médicales) et créer une nouvelle commande.



Lorsque la date d'accouchement prévue et les données médicales et de grossesse ont été entrées dans la plateforme, le dossier est automatiquement fermé si le terme atteint 53s0j. Si les enregistrements sont réalisés sans entrer cette information (enregistrement par le biais du Démarrage rapide), le dossier reste ouvert. Il est donc recommandé de clôturer la grossesse active lorsque la patiente a accouché. Voir les étapes 1 à 3 ci-dessous.

1. Connectez-vous à PregnaOne Platform. Vous trouverez plus d'informations sur la connexion dans le chapitre « Se connecter ».
2. Dans la barre verticale à gauche, cliquez sur [Patients] et recherchez la patiente concernée. Cliquez sur la ligne du nom de la patiente.
3. Ouvrez l'onglet « Données médicales » et cliquez sur le bouton [Fin de la grossesse] en bas de l'écran pour clôturer une commande encore ouverte et la grossesse (précédente) correspondante. Répondez à la question de contrôle par « Oui ».



4. Cliquez sur [Démarrage rapide] dans la colonne de gauche et recherchez la patiente concernée.
5. Remplissez la date du terme prévue et cochez la case « La patiente répond..... ». Ceci permet à la patiente de recevoir une qualification positive pour utiliser Pregnabit Pro.
6. Sélectionnez ensuite l'appareil avec lequel la patiente s'enregistrera et cliquez sur [Activez la commande]. Un NIP est automatiquement créé (pour la patiente). La patiente a besoin de ce NIP pour se connecter à l'appareil Pregnabit Pro.
7. Cliquez sur [Sauver].
8. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle grossesse, il peut être nécessaire de modifier certaines données. Vérifiez-les donc avant de poursuivre. Dans la colonne de gauche, cliquez sur [Patients], recherchez et sélectionnez la patiente concernée et vérifiez les données médicales. Corrigez au besoin.
9. À présent, tout est prêt et la patiente peut utiliser Pregnabit Pro.



Démarrage rapide (Professionnel de santé)

Voici un exemple dans lequel le professionnel de santé souhaite permettre à la patiente de démarrer rapidement les enregistrements et connecter directement l'appareil à la patiente, sans compléter l'anamnèse détaillée.

Cela concerne les établissements qui ne sont pas connectés à un système d'informations (par exemple Mosos® ou Epic®) d'un hôpital.

1. Connectez-vous à PregnaOne Platform. Vous trouverez plus d'informations sur la connexion dans le chapitre « [Se connecter](#) ».

2. Cliquez sur [Démarrage rapide] dans la barre verticale de gauche.

3. *Patiente existante;*

S'il s'agit d'une patiente qui a déjà été enregistrée dans le système, vous pouvez la rechercher en saisissant le nom (ou une autre donnée d'identification) dans le champ en haut de l'écran. Cliquez sur le nom de la patiente concernée pour la sélectionner.

Nouvelle patiente;

Cliquez sur [Ajouter une patiente] et complétez les trois champs. Cliquez sur [Sauver].

4. Dans l'écran suivant, sélectionnez la case « Accès aux examens en cours (= Regarder l'enregistrement CTG en direct) » et sélectionnez (le cas échéant) le professionnel de santé qui accompagne la grossesse. Si besoin, les autres champs peuvent également être complétés.



Sélectionnez la case « Accès aux examens en cours (= Regarder l'enregistrement CTG en direct) » si vous voulez pouvoir regarder l'enregistrement CTG en direct.

5. Saisissez la date du terme

6. Ajoutez une coche devant « La patiente répond à toutes les règles médicales..... » et cliquez sur [Sélectionnez un appareil].

7. Une fois l'appareil sélectionné, cliquez sur [Activez la commande]. Un "PIN" (= code NIP) est automatiquement créé pour la patiente. La patiente a besoin de ce code pour se connecter à l'appareil Pregnabit Pro.



Pour compléter les données de la patiente, utilisez le bouton [Compléter les données de la patiente]. Si vous utilisez ce bouton, il ne s'agit plus d'un démarrage rapide. Dans ce cas, suivez les étapes 5 à 9 de l'exemple 1 du chapitre « [Créer un enregistrement CTG avec une patiente connectée](#) ». Si vous avez suivi ces étapes, vous êtes prêt. L'appareil est connecté, la commande est créée et la patiente peut créer des enregistrements.

8. Cliquez sur [Sauver]. L'appareil est connecté, la commande est créée et la patiente peut créer des enregistrements.

Instructions à la patiente



Ces instructions servent d'exemple. Respectez toujours les accords passés avec le professionnel de santé et n'utilisez le kit qu'après avoir reçu les instructions du professionnel de santé.

Contenu de la mallette

1. Appareil Pregnabit Pro
 2. Medisept wipes®
(lignettes)
 3. Oxymètre de pouls
 4. Chargeur séparé
 5. Bandes ventrales (2)
 6. Transducteur FHR et
TOCO
 7. Gel pour échographie
- + Mode d'emploi



Avant de démarrer l'enregistrement

- Gardez votre smartphone à portée de main pendant l'enregistrement. Ce numéro doit être connu de votre professionnel de santé. Si nécessaire, le professionnel de santé qui examine votre enregistrement peut ainsi vous contacter.
- Vous avez reçu un "PIN" (= code NIP) pour vous connecter ? Si ce n'est pas le cas, contactez d'abord le professionnel de santé.
- Assurez-vous d'aller aux toilettes avant l'examen, et gardez tous les composants à portée de main. Ainsi, vous ne devrez pas vous lever pendant l'examen et l'enregistrement ne sera pas perturbé.

Démarrage de l'examen

1. Activez l'appareil Pregnabit Pro : appuyez 2-3 secondes sur le bouton à gauche sur l'appareil.
2. Connectez-vous avec le "PIN" qui vous a été remis par le professionnel de santé. À l'écran de démarrage, cliquez sur «Connectez-vous avec votre code PIN », saisissez le "PIN"et cliquez sur [Connexion].



En principe, le "PIN" ne doit être saisi qu'une seule fois et reste valable jusqu'à ce que la patiente clique sur [Déconnexion] ou que l'appareil soit déconnecté (dans le portail) par le professionnel de santé.

3. Branchez les transducteurs sur les ports sur le dessus du Pregnabit Pro : le transducteur FHR avec l'extrémité blanche sur le port blanc et le transducteur TOCO avec l'extrémité grise sur le port gris.



4. Installez-vous dans une position semi-assise (de préférence légèrement sur votre côté gauche) et placez les 2 bandes ventrales autour du ventre (en passant derrière le dos).
5. Enduisez la face interne plate du transducteur FHR de gel pour échographie. Déplacez le transducteur FHR sur le ventre, cherchez le bruit des battements cardiaques du bébé le plus clair et placez le transducteur FHR à cet endroit. Fixez le transducteur au moyen d'une bande ventrale.



6. Le transducteur TOCO doit être placé sur le haut de l'abdomen et être fixé au moyen de la deuxième bande ventrale.



7. Première connexion

Prenez maintenant le Pregnabit Pro et cliquez sur [Démarrer la formation] pour regarder la vidéo d'instruction (en anglais). À la fin, cochez l'option « J'ai terminé la formation » et cliquez sur [Terminer].

Deuxième connexion ou connexion suivante

Lorsque vous vous connectez une deuxième fois (ou une fois suivante), vous pouvez éventuellement visionner la vidéo d'instruction à nouveau. À cet effet, cliquez sur [Voulez-vous répéter la formation ?].

8. Cliquez ensuite sur [Préparez-vous à l'examen].

9. S'il en a été convenu ainsi, complétez le questionnaire. Si cela n'est pas nécessaire, cette partie peut être ignorée en cliquant sur [Continuer] jusqu'à ce que l'écran « Examen » s'affiche. En fonction des réglages, il est possible qu'aucun questionnaire ne s'affiche. Passez ensuite à l'étape 10.

10. Prenez l'oxymètre de pouls et pincez le clip sur votre index (gauche). Activez-le en appuyant sur le bouton 'ON/OFF' sur le clip.



11. Lorsque les transducteurs et l'oxymètre de pouls sont bien raccordés, l'icône TOCO devient verte. L'icône du transducteur FHR et de l'oxymètre de pouls sont orange. Dès que le transducteur FHR/l'oxymètre de pouls reçoit un signal, ces icônes deviennent également vertes. De gauche à droite : TOCO, oxymètre de pouls et FHR.



12. Si tout est bien en place, [Démarrer l'examen] s'affiche. Cliquez là-dessus pour commencer l'enregistrement. Vous voulez modifier le volume pendant l'enregistrement ? Vous pouvez le faire en cliquant à l'écran sur le symbole du haut-parleur et en faisant glisser le curseur.



Il est possible d'adapter le wifi, la langue et le volume, entre autres. Cliquez sur l'icône des paramètres (roue dentée) en haut à gauche de l'écran et effectuez les adaptations nécessaires. Cliquez ensuite en haut à gauche sur la flèche vers la gauche pour retourner à l'écran précédent. Vous ne pouvez le faire qu'à l'écran de démarrage, mais pas pendant l'examen.

- 13.** Il est indiqué à l'écran combien de temps l'examen va encore durer et si l'enregistrement se déroule bien. Si les battements cardiaques devaient par exemple cesser parce que le bébé se tourne, l'appareil montre ce qu'il faut faire. Surveillez donc bien l'écran et suivez les instructions qui y sont affichées.
 - 14.** Vous sentez bouger votre bébé ? Signalez-le en cliquant sur le bouton avec le symbole du pied (à l'écran). Vous pouvez également appuyer sur le bouton du côté droit de l'appareil. Faites-le chaque fois que vous sentez bouger votre bébé.
 - 15.** En principe, l'examen dure 30 minutes et peut être prolongé automatiquement jusqu'à 59 minutes. Cela est indiqué à l'écran. L'examen s'arrête ensuite automatiquement. Vous voulez l'arrêter plus vite d'un commun accord avec votre professionnel de santé ? Le cas échéant, cliquez sur [Abandonner l'examen] puis sur [Interrompre].
 - 16.** L'examen est terminé et un tensiomètre est branché ? En fonction des accords passés, vous mesurez ou non votre tension artérielle. Non ? Cliquez sur [Ignorer]. Oui ? Fixez la bande autour du haut du bras, branchez le cordon au tensiomètre et cliquez sur le bouton [Marche]. La mesure est finie ? Le résultat s'affiche à l'écran du Pregnabit Pro. Cliquez sur [Continuer]. Les données sont envoyées automatiquement. Terminé ? Cliquez sur { Retour à l'écran d'accueil }.
- S'il n'y a pas de tensiomètre branché sur l'appareil, l'examen s'arrête et les résultats sont envoyés directement. Terminé ? Cliquez sur [Retour à l'écran d'accueil].
- 17.** Cliquez à l'écran sur [Terminer et éteindre l'appareil].
 - 18.** Vous pouvez à présent tout déconnecter. Nettoyez les transducteurs avec les lingettes désinfectantes et replacez tout dans la mallette. En fonction des accords passés, le professionnel de soin vous contactera.

Platform

Rechercher un enregistrement CTG sur la plateforme

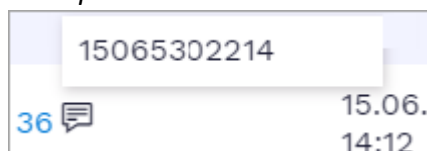
1. Démarrez un navigateur (par ex. Chrome©) sur l'ordinateur et ouvrez la page « pregnaone.com ». Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis cliquez sur [Se connecter]. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez le chapitre « [Se connecter](#) ».
2. À gauche dans la liste, cliquez sur le bouton [Examens] puis sur l'un des boutons en-dessous. Les examens à évaluer sont regroupés sous « Examens à domicile » (2e ligne) ou « Examens rapides » (1ère ligne).

Écran Informations complémentaires

- Vous pouvez voir ici tous les examens qui ont été effectués dans l'établissement et auxquels l'utilisateur a accès.
- Les examens peuvent être filtrés à l'aide des boutons de filtre au-dessus.
- L'examen le plus récent est toujours affiché en haut de la liste.

3. Si une note a été saisie avant l'enregistrement, celle-ci apparaît sous la forme d'une icône à côté du numéro d'examen. En passant la souris sur cette icône, le contenu de la note s'affiche.

Exemple



4. L'enregistrement n'a pas encore été attribué ? Cliquez sur [Affecter] et connectez l'enregistrement à la bonne patiente. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez le chapitre « [Platform, connecter un enregistrement CTG](#) ».
5. Cliquez sur [Évaluer] pour ouvrir l'enregistrement. Un message de confirmation apparaît ? Cliquez sur [Oui].
6. Vous pouvez à présent consulter l'enregistrement CTG et éventuellement l'évaluer. Pour plus d'informations sur l'évaluation, consultez le chapitre « [Platform, évaluer un enregistrement CTG](#) ».
7. Si un enregistrement a déjà été attribué/évalué, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le numéro de l'examen.



Plusieurs enregistrements sont-ils disponibles ? Dans ce cas, vous pouvez basculer entre ces enregistrements en cliquant sur les boutons [Examen précédent] et [Examen suivant]. Ceux-ci se trouvent à gauche au-dessus de l'enregistrement (onglet « Graphique »). Attention, vous basculez entre tous les enregistrements Pregnabit Pro, issus de toutes les grossesses.

8. Prêt ? En haut de l'écran, cliquez sur [<- Retour à] jusqu'à revenir à l'aperçu des examens ou cliquez sur [Plateforme administrative] pour revenir à l'écran de départ.



Connecter un enregistrement CTG

Cela concerne uniquement les établissements qui **ne sont pas connectés** à un système d'informations (par exemple Mosos® ou Epic®) d'un hôpital.

L'enregistrement CTG peut être ajouté à une patiente existante ou nouvelle.

- Patiente existante : ce sont toutes les patientes qui ont déjà été enregistrées sur la plateforme dans l'établissement pour lequel le professionnel de santé travaille.
- Nouvelle patiente : doit être créée sur la plateforme.

Procédure

1. Connectez-vous sur la plateforme et allez à l'écran « Examens > Examens rapides ».
2. Recherchez l'enregistrement souhaité et cliquez sur le bouton [Assigner].
3. • Patiente existante ? Commencez par saisir le nom de la patiente sous la case « Patiente ». Si la patiente est déjà connue dans le système, celle-ci s'affiche. Trouvée ? Sélectionnez-la et cliquez sur [Attribuer> Attribuer à la patiente].
 - Nouvelle patiente ? Cliquez sur [Ajouter une patiente]. Sur l'écran suivant, vous pouvez créer une nouvelle patiente. Complétez les champs (prénom/nom de famille et numéro de patiente/id), puis cliquez sur [Attribuer> Attribuer à la patiente].



Vous n'avez pas sélectionné la bonne patiente par erreur ? Répétez les étapes ci-dessus et sélectionnez la bonne patiente.



Si vous souhaitez connecter un enregistrement et devez créer une nouvelle patiente, suivez les étapes décrites ici sans créer une nouvelle patiente sur l'onglet « Patientes ». Sinon, l'enregistrement ne sera pas connecté.

4. Il est possible de compléter une anamnèse détaillée lorsque vous créez une patiente. Pour cela, reportez-vous au paragraphe « [Nouvelle patiente avec anamnèse détaillée](#) ».

Nouvelle patiente avec anamnèse détaillée

Exécutez les étapes suivantes pour connecter un enregistrement CTG à une nouvelle patiente et saisir une anamnèse détaillée pour la patiente en question.



1. Suivez les étapes 1 et 2 décrites dans la « [Procédure](#) » et cliquez sur [Ajouter une patiente].
2. Complétez les champs (prénom/nom de famille et numéro de patiente), puis cliquez sur [Attribuer et compléter les données].
3. L'écran permettant de saisir les données d'identification/de contact de la patiente.
4. Au bas de l'écran, cliquez ensuite sur [Ajouter des données médicales]. Complétez cet écran puis cliquez sur [Ajouter des données concernant la grossesse].
5. Une fois les données de la grossesse (obligatoires) complétées, appuyez sur [Ajouter des données détaillées concernant les antécédents médicaux].
6. Tout est complété ? Cliquez sur [Terminer et sauvegarder]. Un écran d'aperçu s'affiche avec plusieurs onglets. Le premier onglet donne un aperçu des données saisies. Vous pouvez éventuellement y apporter des modifications.
7. L'enregistrement CTG est à présent connecté à la nouvelle patiente saisie. Dans la colonne de gauche, cliquez sur [Examens rapides] pour revenir à l'écran d'aperçu. Vous pouvez à présent saisir également une évaluation. Pour plus d'informations sur l'évaluation, consultez le chapitre « [Platform, Évaluation CTG enregistrement](#) ».



Tant que l'enregistrement n'est pas évalué, il n'apparaît pas dans l'aperçu des examens (onglet « Résultats ») de la patiente en question.



Évaluation CTG enregistrement

- [Démarrer](#)
- [Éditer](#)
- [Problèmes détectés](#)
- [Évaluation](#)
- [Informations complémentaires](#)

Démarrer

1. Connectez-vous (si besoin) à PregnaOne Platform. À gauche dans la liste, cliquez sur le bouton [Examens] puis sur l'un des boutons en-dessous. Les examens à évaluer sont regroupés sous « Examens à domicile » (2e ligne) ou « Examens rapides » (1ère ligne).
2. Recherchez l'enregistrement à évaluer et cliquez sur [Évaluer].
3. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur [Oui].
4. Aucune donnée de patiente ne s'affiche ? Cela signifie que cet enregistrement n'a pas (encore) été connecté à une patiente. Il est recommandé de le faire dans un premier temps. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez le chapitre « [Platform, connecter un enregistrement CTG](#) ».
5. L'écran ouvert comporte plusieurs onglets : Graphique, Analyse et Résumé (Examen) et évaluation.
 - Onglet « Graphique » : vous retrouvez ici l'anamnèse de la grossesse (éventuellement saisie, des données sur l'enregistrement (en haut à droite), les problèmes détectés, la tension artérielle mesurée (si une mesure a été effectuée) et l'enregistrement CTG en lui-même. Les réponses au questionnaire que la patiente a éventuellement complété (sur l'appareil Pregnabit Pro) apparaissent également ici. Le champ d'évaluation s'affiche au bas de l'écran.
 - Onglet « Analyse » : cet onglet donne un aperçu (généré automatiquement) de toutes les mesures/observations faites pendant l'enregistrement. Il peut s'agir par exemple du nombre d'accélération/de ralentissements, mais aussi du nombre de mouvements du fœtus marqués et les éventuelles contractions.
 - Onglet « Résumé (Examen) et évaluation » : cet onglet regroupe les données de l'enregistrement et vous permet de compléter une évaluation et de générer un rapport.

Éditer





1. Mode d'édition : si vous activez ce mode, le bouton A apparaît. Cet outil permet de modifier les limites dans le graphique, des marquages, etc. Pour une description détaillée de cette section, reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé (chapitre « Interactions avec les graphiques ») fourni par le fabricant.
2. Outil de sélection : si vous cliquez sur cet outil et déplacez la souris sur l'enregistrement, les valeurs sont affichées sur le graphique.
3. Cliquer et glisser : cliquez sur cet outil pour déplacer le graphique. Pratique lorsque celui-ci est agrandi.
4. Agrandir : cliquez sur le bouton puis sur le graphique. Chaque clic agrandit le graphique de 10 %.
5. Réduire : cliquez sur le bouton puis sur le graphique. Chaque clic réduit le graphique de 10 % (jusqu'à atteindre la taille par défaut).
6. Cases de sélection : vous pouvez sélectionner/désélectionner les cases ici pour afficher/masquer les graphiques. Par défaut, tous les graphiques sont affichés.

Problèmes détectés

L'analyse automatique affiche ici les anomalies observées dans l'enregistrement. Celles-ci adoptent un code couleur : rouge pour une anomalie grave et orange pour les problèmes moins graves.

Cliquez sur un problème détecté (sur le numéro) pour afficher le texte correspondant et la procédure suggérée.

Cette illustration est un exemple donné à titre d'explication. Il ne s'agit pas d'une reproduction fidèle !

Problème 19 Enregistrement CTG <20 mn	
1	PROBLÈMES DÉTECTÉS
Cliquez pour voir les recommandations	
2	PROBLÈMES DÉTECTÉS 19 5



PregnaOne Platform est un outil de diagnostic et ne remplace pas le jugement du médecin traitant. L'interprétation et la réponse (clinique) appropriée restent la responsabilité du soignant.



Évaluation

Le champ d'évaluation situé au bas du premier onglet est identique au champ d'évaluation sur le troisième onglet. Ce que vous saisissez sur le premier onglet apparaît également sur le troisième onglet (et inversement).

Si vous créez une évaluation sur l'onglet « Résumé (Examen) et évaluation », vous pouvez utiliser des modèles. Cette fonction n'est pas encore accessible/est encore en construction dans cette version.

Une fois le texte d'évaluation saisi, cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou [Sauvegarder et confirmer].



Vous pouvez utiliser le bouton [Enregistrer] pour enregistrer régulièrement le contenu. Le texte peut encore être modifié. Cliquez sur le bouton [Sauvegarder et confirmer] pour enregistrer définitivement le texte. Dans ce cas, il ne peut plus être modifié.

Dès qu'une évaluation est enregistrée, vous pouvez créer un rapport. Pour plus d'informations sur le rapport, consultez le chapitre « [Platform, Rapport](#) ».

Informations complémentaires

Il peut arriver que le professionnel de santé qui effectue l'enregistrement souhaite avoir un avis sur l'enregistrement. Par exemple une sage-femme à domicile chez la patiente et un gynécologue à l'hôpital.

Pour consulter simultanément le même enregistrement, suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Selon la procédure choisie, les deux professionnels de santé (sur la plateforme) accèdent à « Examens à domicile » ou « Examens rapides » et recherchent la patiente concernée.
2. Le professionnel de santé consulté clique sur le numéro en bleu clair (A) au début de la ligne pour ouvrir le même enregistrement.
3. Le professionnel de santé soignant (auprès de la patiente) clique sur [Évaluer] (B) pour voir l'enregistrement sur l'écran suivant.

Cette illustration est un exemple donné à titre d'explication. Il ne s'agit pas d'une reproduction fidèle !



Appareils	1064	292		18.10.2022, 14:40	18.10.2022, 14:40	En cours de description
patients	1006	265		13.10.2022, 10:33	13.10.2022, 10:43	Aperçu
Recherche	995	282		12.10.2022, 17:11	12.10.2022, 17:14	Aperçu
Analysés						
Examens à domicile						

4. Vous pouvez à présent consulter tous les deux l'enregistrement.

5. Prêt ? Poursuivez l'enregistrement/l'évaluation et/ou déconnectez-vous.



Compléter/modifier les données de la patiente

Il est possible de compléter et/ou modifier les données de la patiente ultérieurement.

1. Connectez-vous sur la plateforme et cliquez sur [Patients] dans la barre verticale de gauche.
2. À l'aide des filtres, recherchez la patiente concernée.
3. Cliquez sur le nom de la patiente pour ouvrir le dossier.
4. Cliquez sur [Modifier les détails médicaux] si vous souhaitez modifier l'anamnèse détaillée. Si vous souhaitez modifier uniquement les données de la grossesse, cliquez sur [Modifier les données concernant la grossesse] au bas de l'écran.
5. Au bas de l'écran qui s'ouvre, cliquez sur [Enregistrer] ou accédez à l'écran suivant de données.
6. Le programme enregistre automatiquement les modifications.
7. Vous avez terminé ? N'oubliez pas de vous déconnecter.



Rapport

Lorsqu'un enregistrement CTG a été connecté à une patiente et qu'une évaluation a été saisie, vous pouvez créer un rapport.

Procédure

Vous venez de saisir une évaluation. Vous pouvez ignorer les étapes 1 et 2 et commencer à l'étape 3.

1. Connectez-vous à PregnaOne Platform, cliquez sur [Patients] dans la colonne de gauche, recherchez la patiente souhaitée et cliquez sur le nom.
2. Allez à l'onglet « Résultats » et cliquez sur l'examen pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
3. Allez à l'onglet « Résumé (Examen) et évaluation » et cliquez sur [Créer un rapport]. L'écran sur lequel vous pouvez choisir le rapport s'affiche.
 - La fonction « Pour la patiente » n'est pas utilisée et ne doit pas être sélectionnée. Elle s'applique uniquement dans les pays dans lesquels les patientes louent elles-mêmes l'appareil et se connectent à la plateforme.
4. Saisissez un nom dans « Type de rapport (Nom du rapport) ».



Conseil : il peut s'avérer pratique de saisir un texte d'identification dans le titre. Par exemple la raison (abrégée) pour laquelle le CTG est effectué. Cela permet de retrouver plus facilement le rapport. La date/heure de génération du rapport est automatiquement ajoutée dans le titre.

5. Choisissez le type de rapport ci-dessous :
 - Autre rapport autre (détaillé) : il s'agit d'un rapport détaillé qui permet de sélectionner quelles sections doivent/ne doivent pas être incluses dans le rapport.
 - Rapport d'une seule page (Rapport résumé) : il s'agit d'un résumé (1 page) de toutes les données.
6. Cliquez ensuite sur [Créer]. Un aperçu du rapport s'affiche. Cliquez sur le bouton [Retour] pour revenir à la page précédent et choisir éventuellement une autre composition. Cliquez sur [Générer un rapport] pour créer définitivement le rapport.



7. Les rapports créés apparaissent sur l'onglet, classés par type (détaillé ou résumé) et le plus récent en bas.
8. Cliquez sur un rapport pour le télécharger automatiquement. Vous pouvez alors l'ouvrir dans le navigateur puis l'enregistrer sur l'ordinateur, l'imprimer ou l'envoyer par exemple.
9. En haut à gauche, cliquez sur le bouton [Plateforme d'administration] pour revenir à l'écran de départ.



Fermer la commande et déconnecter l'appareil

- [Annuler](#)
- [Terminer](#)
- [Déconnecter](#)

Vous pouvez annuler ou terminer une commande. Pour pouvoir l'annuler, aucun enregistrement ne doit avoir été créé et pour pouvoir la terminer, au moins 1 enregistrement doit avoir été créé.

Annuler

1. Connectez-vous sur la plateforme et cliquez sur [Commandes] dans la barre verticale de gauche, puis sur [Dans la mise en oeuvre].
2. Recherchez et sélectionnez la bonne patiente.
3. Défilez vers le bas et cliquez sur [Annuler la commande].



Le bouton [Annuler la commande] n'est pas accessible ? Cela signifie qu'un enregistrement a été créé. Dans ce cas, il n'est plus possible de l'annuler et vous devez suivre la procédure « [Terminer](#) ».

4. Répondez à la question de confirmation par [Oui].
5. Le professionnel de santé doit maintenant contrôler et éventuellement confirmer que l'appareil a été rendu et est prêt à être utilisé par la patiente suivante. Procédure : Ouvrez l'onglet « Appareils > Liste » > Cliquez sur l'appareil concerné > Dans « Disponibilité », la valeur « Disponible » doit apparaître et la case « Appareil prêt à l'emploi » doit être sélectionnée « Oui ».
6. La commande est à présent annulée et l'appareil est immédiatement disponible pour une autre patiente.

Terminer

1. Connectez-vous sur la plateforme et cliquez sur [Commandes] dans la barre verticale de gauche, puis sur [Dans la mise en oeuvre].
2. Recherchez et sélectionnez la bonne patiente.



3. Défilez vers le bas et cliquez sur [Interrompre la commande].



Ce bouton est accessible uniquement lorsqu'au moins un enregistrement est créé. Si aucun enregistrement n'a été créé, suivez les étapes 3 à 5 de la procédure « [Annuler](#) ».

4. Répondez à la question de confirmation par [Oui].
5. La commande est à présent terminée. Vous devez encore déconnecter l'appareil. Allez à l'étape 2 de la procédure « [Déconnecter](#) ».

Déconnecter

Déconnectez l'appareil une fois que la patiente l'a rendu au professionnel de santé.



Suivez la procédure décrite ci-dessous pour déconnecter l'appareil. **Ne cliquez JAMAIS** sur [Retourner l'appareil au fournisseur] ! Si vous cliquez sur ce bouton, l'appareil est retourné virtuellement à ICT HCTS et ne peut plus être utilisé dans l'établissement.

1. Connectez-vous sur la plateforme.
2. Cliquez sur [Appareils] dans la barre verticale de gauche, puis sur [Liste].
3. Recherchez et sélectionnez l'appareil souhaité.
4. Faites glisser le curseur « Rendement » vers la droite en cliquant dessus et répondez à la question de confirmation par [Oui].
5. Sous « Appareil prêt à l'emploi », cochez [Oui].
6. L'appareil est à présent déconnecté et libéré pour une nouvelle commande.

Informations générales

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection du kit doivent intervenir après utilisation et retour du kit par une patiente.



- L'utilisation d'autres désinfectants (que ceux indiqués ici) n'est pas autorisée.
- La procédure ci-dessous est une procédure générale. Pour connaître les protocoles de nettoyage et de désinfection en vigueur dans l'établissement, contactez le responsable de la prévention des infections de l'établissement.
- Pour plus d'explications sur le nettoyage et la désinfection du tensiomètre et de l'oxymètre de pouls, reportez-vous au manuel du fabricant concerné.

Procédure

Matériel nécessaire

- Chiffons doux (chiffons ou mouchoirs sans fibres)
- Gants jetables
- Blouse imperméable à l'humidité
- Masque facial
- Protection oculaire (lunettes de protection)
- La mallette Pregnabit Pro et son contenu
- Poste de travail pour procéder au nettoyage et à la désinfection

Nettoyage manuel

1. Enfilez les gants/la blouse et mettez le masque facial/la protection oculaire. Ouvrez la mallette et sortez tous les composants. Les bandes ventrales peuvent être jetées.
2. Humidifiez un chiffon avec de l'eau et nettoyez la mallette à l'intérieur et à l'extérieur. Prenez un chiffon humide propre et essuyez également le transducteur FHR/TOCO.
3. Séchez soigneusement tous les composants avec un chiffon/mouchoir.

Désinfection manuelle



4. Une fois que le kit Pregnabit Pro a été nettoyé, celui-ci doit être désinfecté à l'aide des lingettes Medisept Wipes© ou d'un désinfectant à base de 70 % d'alcool minimum. Cela s'applique à l'appareil et aux transducteurs/câbles.
5. L'intérieur et l'extérieur de la mallette peuvent être nettoyés à l'aide d'un désinfectant d'une teneur en alcool de 70 % minimum.
6. Enfilez une paire de gants propres. Pulvériser le désinfectant sur un chiffon propre et sec (ou utilisez les Medisept Wipes) et nettoyez un composant. Utilisez un nouveau chiffon pour chaque composant.
7. Laissez bien sécher les composants et rangez-les dans la mallette.
8. Le masque facial/la blouse/les gants peuvent être enlevés et jetés. La protection oculaire doit être nettoyée/jetée (selon le protocole de l'établissement). Nettoyez le poste de travail selon la procédure interne.
9. Après le nettoyage, la désinfection et le séchage, rangez la mallette Pregnabit Pro dans un endroit fermé, propre, sec et à l'abri de la poussière.



Instructions du professionnel de santé à la patiente

Veillez trouver ci-dessous un exemple de check-list pouvant être utilisée par le professionnel de santé en guise de soutien pour fournir des explications à la patiente.

Vous trouverez des explications détaillées pour la patiente dans le chapitre « [Créer un enregistrement CTG, Instructions pour la patiente](#) ».

Préalablement aux explications

1. Veillez à ce que la patiente soit enregistrée dans PregnaOne Platform et y soit associée au bon appareil.
2. Dans la plateforme, cherchez le "PIN" (= code NIP) pour la patiente en question. La patiente a besoin de ce code pour se connecter à l'appareil Pregnabit Pro.
3. En fonction des accords en vigueur au sein de l'organisation, un contrat d'utilisation doit être rempli ou non par la patiente.
4. Veillez à ce que l'appareil soit entièrement chargé et à ce que la mallette soit complète.

Les explications

5. Montrez comment activer l'appareil Pregnabit Pro.
6. Donnez des explications sur le branchement/la pose des composants :
 - ☐ Placer le transducteur TOCO/FHR sur le ventre, l'utilisation du gel pour échographie et le branchement.
 - ☐ Placer et activer l'oxymètre de pouls.
7. Donnez des explications sur l'utilisation de l'appareil Pregnabit Pro :
 - ☐ Se connecter avec le "PIN" (= code NIP).
 - ☐ Regarder la vidéo d'instruction.
 - ☐ Démarrer l'examen.
 - ☐ Signaler les mouvements du bébé.
 - ☐ Arrêter automatiquement/en cliquant sur [Arrêter l'examen]. La durée et la fin de l'enregistrement dépendent des accords passés avec le professionnel de santé.
 - ☐ Mesurer éventuellement la tension artérielle. Si nécessaire, expliquez comment le tensiomètre doit être placé et son fonctionnement.
 - ☐ La désactivation du Pregnabit Pro. Une fois que tout a été envoyé, cliquer sur [Terminer et éteindre l'appareil].
 - ☐ Déconnecter, nettoyer, charger (si nécessaire) et ranger.



En cas de problème (par exemple un mauvais raccordement ou un niveau de batterie trop faible), cela s'affiche à l'écran (instructions) et l'appareil indique à la patiente ce qu'elle doit faire.

8. Prêt ? Si nécessaire, faites signer le contrat d'utilisation par la patiente, confirmez les accords passés et donnez la mallette/le "PIN" à la patiente.



La description ci-dessus est un exemple d'instructions pouvant être données. Vérifiez toujours les accords en vigueur/passés au sein de l'établissement/par le professionnel de santé traitant en ce qui concerne le traitement de la patiente.



Questions frequentes (FAQ)

Ce chapitre contient des questions posées tant par des professionnels de la santé que par des patientes. En cas de questions, la patiente doit contacter le professionnel de santé. Le professionnel de santé peut contacter le service d'assistance d'ICT HCTS.

1. [Je ne peux pas me connecter](#)
2. [L'appareil Pregnabit Pro ne démarre pas](#)
3. [L'oxymètre de pouls ne s'allume pas](#)
4. [L'oxymètre de pouls ne se connecte pas au Pregnabit Pro \(l'icône reste rouge\)](#)
5. [Le transducteur TOCO/FHR ne semble pas fonctionner](#)
6. [Je n'arrive pas à localiser la fréquence cardiaque du bébé](#)
7. [La fréquence cardiaque n'est pas audible](#)
8. [La fréquence cardiaque du bébé semble être la même que celle de la mère](#)
9. [Il y a une perte de signal \(pouls de l'enfant\) pendant le monitoring](#)
10. [Le TOCO n'enregistre pas de contractions, mais la patiente, elle, les ressent bel et bien](#)
11. [Je veux connecter l'appareil à une patiente mais l'appareil n'apparaît pas dans la liste de sélection.](#)
12. [Redémarrer](#)
13. [La CTG est terminée. Elle est enregistrée, mais ne peut être soumise](#)

1. Je ne peux pas me connecter

Contactez le professionnel de santé (patiente) ou le service d'assistance du distributeur (professionnel de santé).

2. L'appareil Pregnabit Pro ne démarre pas

La batterie de l'appareil est probablement vide, rechargez-la. Lors de la charge, un voyant rouge est visible. Si cela ne résout pas le problème, contactez le prestataire de soins.

3. L'oxymètre de pouls ne s'allume pas

Les piles sont probablement plates. Remplacez-les par deux nouvelles AAA piles.

4. L'oxymètre de pouls ne se connecte pas au Pregnabit Pro (l'icône reste rouge)

Lorsque l'oxymètre de pouls est mis en marche, il se connecte automatiquement à l'appareil. Cela est représenté par un pictogramme MHR orange. Si le pictogramme reste rouge, alors que l'oxymètre de pouls est allumé, cela signifie que l'oxymètre de pouls n'est pas connecté au Pregnabit Pro. Dans ce cas, l'utilisateur doit contacter le professionnel de santé. L'oxymètre de pouls a peut-être besoin d'être remplacé.



Si le pictogramme est orange mais que la patiente ne trouve pas le MHR (représenté par le pictogramme vert), il faut peut-être nettoyer le capteur de l'oxymètre de pouls (avec un chiffon propre et sec). Contactez votre professionnel de santé si le problème persiste.

5. Le transducteur TOCO/FHR ne semble pas fonctionner

Vérifiez que le câble est bien branché sur l'appareil Pregnabit Pro. Si cela ne résout pas le problème, contactez le professionnel de santé.

6. Je n'arrive pas à localiser la fréquence cardiaque du bébé

- Assurez-vous qu'il y a assez de gel sur l'unité.
- Déplacez le transducteur sur le ventre.
- Si le bébé est en position de siège, déplacez l'unité PregnaBit Pro vers la partie supérieure de l'utérus et réessayez.
- Si la fréquence cardiaque n'est toujours pas localisée après avoir suivi les étapes ci-dessus, contactez votre prestataire de soins.

7. La fréquence cardiaque n'est pas audible

Augmentez le volume audio de l'appareil Pregnabit Pro.

8. La fréquence cardiaque du bébé semble être le même que celle de la mère

Le transducteur FHR est placé au mauvais endroit, déplacez-le. L'appareil l'indique. Suivez les instructions sur l'appareil. Contactez votre professionnel de santé si le pouls n'est toujours pas détecté.

9. Il y a une perte de signal (pouls de l'enfant) pendant le monitoring

L'appareil l'indique. Suivez les instructions sur l'appareil.

10. Le TOCO n'enregistre pas de contractions, mais la patiente, elle, les ressent bel et bien

Le TOCO ne se trouve probablement pas au bon endroit, essayez un autre endroit sur le ventre.

11. Je veux connecter l'appareil à une patiente mais l'appareil n'apparaît pas dans la liste de sélection.

Si l'appareil que vous souhaitez connecter à une patiente n'apparaît pas dans la liste, cela indique probablement qu'il n'est pas connecté à une patiente et/ou activé pour l'utilisation. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « [Platform, Fermer la commande et déconnecter l'appareil](#) ».



L'appareil ne figure pas non plus dans la liste si le statut se trouve encore sur « Pour le médecin ». Pour plus d'informations, consultez le chapitre « [Créer un enregistrement CTG sans connecter une patiente d'abord \(étape 4\)](#) ».

12. Redémarrer

En cas de problèmes avec l'appareil, il est possible de le redémarrer. Avant tout redémarrage, consultez le professionnel de santé (pour la patiente) ou le distributeur (pour le professionnel de santé). Maintenez le bouton marche/arrêt sur le côté enfoncé pendant plusieurs secondes. Un écran contextuel apparaît à l'écran. Appuyez sur « Redémarrer ». L'appareil redémarre.

13. La CTG est terminée. Elle est enregistrée, mais ne peut être soumise

Si l'examen enregistré (dans la mémoire de l'appareil) reste introuvable, l'appareil demande à l'utilisateur s'il souhaite réessayer. L'utilisateur a le choix entre « Maintenant » et « Plus tard ».

Si « Maintenant » est sélectionné, l'appareil fait une nouvelle tentative pour envoyer l'examen. Si « Plus tard » est sélectionné, l'utilisateur peut démarrer un nouvel examen. Lors de l'envoi de ce nouvel examen, l'examen précédent (ancien) est envoyé simultanément par l'appareil.

Si après avoir cliqué sur « Plus tard » l'utilisateur redémarre l'appareil alors qu'aucun examen ne se trouve dans la mémoire de l'appareil, la question demandant à l'utilisateur d'envoyer l'examen « Maintenant » ou « Plus tard » apparaît à nouveau.

Le problème persiste ? Contactez le professionnel de santé (pour les patientes) ou l'assistance technique du distributeur (pour les professionnels de la santé). Dès que les données ont été envoyées avec succès, l'examen concerné est supprimé de la mémoire de l'appareil.



Release notes

Les notes de version contiennent un aperçu des changements par rapport aux versions précédentes (sauf indication contraire). Ces modifications ont été mises en œuvre (dans la mesure où cela s'applique) dans la brochure d'informations.



La note de version contient les modifications apportées. Ces modifications s'appliquent ou non en fonction des éléments utilisés par l'utilisateur.

Pregnaone Platform Version 1.3.1 / Pregnabit Pro Version 1.1.4




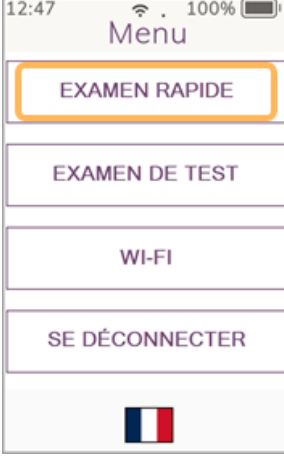
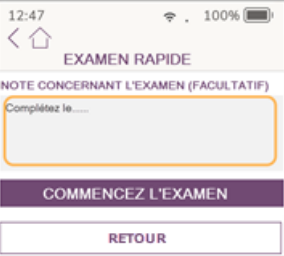
Sujet	Explication brève
Fin de la grossesse	En cas de nouvelle grossesse, la grossesse précédente doit être clôturée dans PregnaOne. Le bouton [Fin de la grossesse] est prévu à cet effet. Consultez la procédure au chapitre « <u>Créer un enregistrement CTG, avec patiente connectée</u> (exemple 3) ».
Basculer entre les enregistrements	Si plusieurs enregistrements ont été créés (avec Pregnabit Pro) pour une même grossesse, il est désormais possible de basculer entre ces enregistrements. Pour de plus amples informations, consultez le chapitre « <u>Plateforme, Rechercher un enregistrement CTG sur la plateforme</u> ».
Afficher ou non le questionnaire	Le questionnaire pour la patiente (Pregnabit Pro) peut être activée/désactivée par le distributeur. Ce réglage est valable par client/réglage pour tous les appareils qui y sont utilisés.


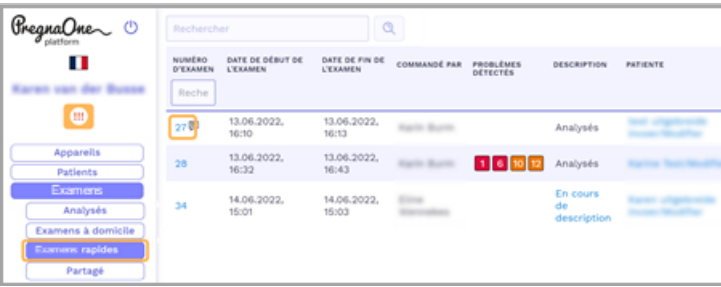
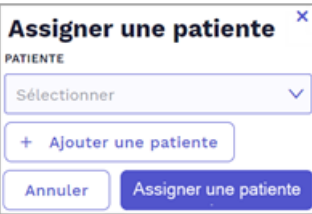
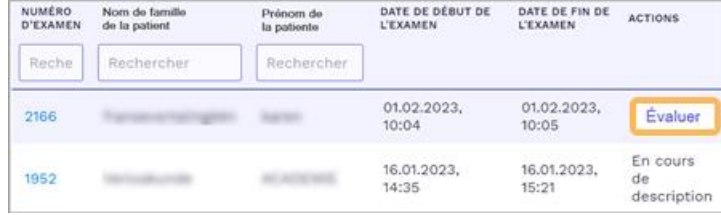

Annexes

Plan étape par étape pour la pratique des sages-femmes

Un exemple d'un bref plan étape par étape pouvant être utilisé par la sage-femme pour soutenir la procédure est décrit ici.

Les illustrations utilisées viennent étayer les explications et ne sont en aucun cas des représentations exactes.

<p>1. Vous connaissez déjà votre code PIN ? Passez à l'étape 2.</p> <p>Connectez-vous sur l'ordinateur à l'adresse « pregnaone.com » avec votre courriel et votre mot de passe.</p> <p>Après la connexion, cliquez sur votre nom en haut à gauche de l'écran pour créer et enregistrer un code PIN dans l'écran suivant (uniquement lors de la première connexion).</p>		
<p>2. Activez le Pregnabit Pro et connectez-vous avec votre code PIN. Appuyez ensuite sur [Examen rapide].</p>		
<p>3. Si nécessaire, indiquez le nom de la patiente dans les notes.</p>		

<p>4. Connectez les transducteurs, fixez les bandes ventrales/l'oxymètre de pouls et commencez l'enregistrement.</p>	
<p>5. Vous voulez regarder aussi ? Sur l'ordinateur, ouvrez l'onglet « Examens rapides » et cliquez-y sur le numéro de votre enregistrement.</p>	
<p>6. Pendant l'enregistrement, vous pouvez attribuer le CTG à la patiente. Cliquez sur le bouton [Assigner] dans la ligne du CTG.</p>	
<p>7. Sélectionnez une patiente ou ajoutez une nouvelle patiente et cliquez sur [Assigner une patiente]. Saisissez les détails de la patiente si nécessaire, puis cliquez à nouveau sur [Assigner une patiente].</p>	
<p>8. L'enregistrement CTG est terminé ? Vous pouvez alors ajouter une évaluation. Cliquez sur [Évaluer] > [Oui]. Ouvrez l'onglet « Résumé et évaluation ».</p>	
<p>9. Cliquez ici sur [Créer une évaluation]. Complétez et cliquez sur [Sauver].</p>	


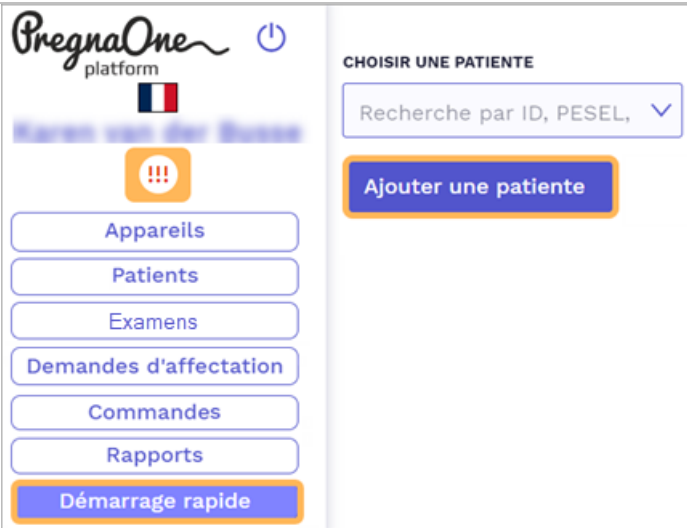



10. Éteignez l'appareil, déconnectez-vous de la plateforme, déconnectez la patiente.	
---	--

Plan étape par étape pour l'hôpital





Un exemple d'un bref plan étape par étape pouvant être utilisé à l'hôpital pour soutenir la procédure est décrit ici.

Les illustrations utilisées viennent étayer les explications et ne sont en aucun cas des représentations exactes.

Plateforme : connectez la patiente à l'appareil et activez la commande		
1. Connectez-vous sur l'ordinateur « pregnaone.com » avec votre de passe.		
2. Cliquez à gauche sur [Démarrage rapide] pour ouvrir cet aperçu et cliquez sur [Ajouter une patiente].		
3. Complétez les données. Ne cochez pas la case « Accès au panneau de la patiente » et cliquez sur [Sauver].		

<p>4. Cochez (A) (Accès aux examens en cours), complétez la Date du Terme (B) et cochez aussi (C) (La patiente répond....). Sélectionnez un appareil (D) et activez la commande (E). Cette dernière génère un code PIN, dont la patiente a besoin pour se connecter. Cliquez sur [Sauver].</p>	<p>Patient</p> <p>PRÉNOM <input type="text"/></p> <p>NOM <input type="text"/></p> <p>NUMÉRO DE PATIENTE <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> (A) Accès aux examens en cours</p> <p>Commande</p> <p>Date du terme <input type="text" value="JJ.MM.AAAA"/></p> <p><input type="checkbox"/> (C) La patiente répond à toutes les règles médicales pour réaliser l'examen CTG, n'a pas d'implants médicaux, n'est pas allergique aux composants de l'appareil et n'a pas de grossesse multiple</p> <p><input type="checkbox"/> Ajouter une date de cloturation de commande</p> <p>Sélectionnez un appareil</p> <p>(D) Sélectionné</p> <p>(E) la commande</p> <p>Le démarrage de la commande générera automatiquement un code PIN pour la patiente</p>	<p>PANNEAU DE LA PATIENTE Non disponible</p> <p>MÉDECIN FAISANT LE SUIVI DE LA GROSSESSE Pas de Sélectionner</p> <p>NO. DE TÉLÉPHONE <input type="text" value="Fixe"/> Saisissez votre numéro</p> <p>PRÉNOM DE LA PERSONNE À CONTACTER <input type="text" value="Complétez..."/></p> <p>NO. DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE À CONTACTER <input type="text" value="Fixe"/> Saisissez...</p>

Patiente : enregistrement avec appareil Pregnabit Pro

<p>1. Activez l'appareil Pregnabit Pro : appuyez 2-3 secondes sur le bouton à gauche sur l'appareil.</p>		
<p>2. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur [Connectez-vous avec votre code PIN] et entrez le code PIN (fourni par le personnel médical) dans l'écran suivant.</p>		
<p>3. Effectuez un enregistrement selon les accords conclus avec le personnel médical et suivez les instructions sur l'appareil.</p>		

Plateforme : Voir/Évaluer

1. Connectez-vous sur l'ordinateur « pregnaone.com » avec votre de passe.

Connexion


Nom d'utilisateur ou courriel

Mot de passe

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)

2. *Voir*
Cliquez à gauche sur [Examens] puis sur [Examens à domicile] pour voir l'aperçu.



Karen Bouché

!!!

Appareils

Patients

Examens

Analysés

Examens à domicile

Examens rapides

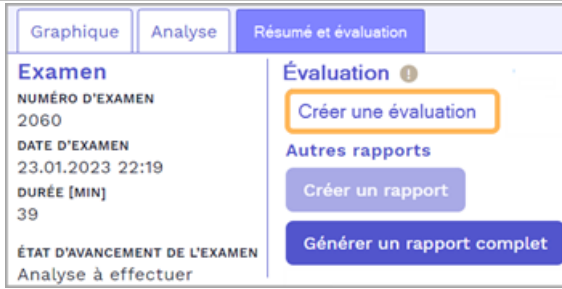

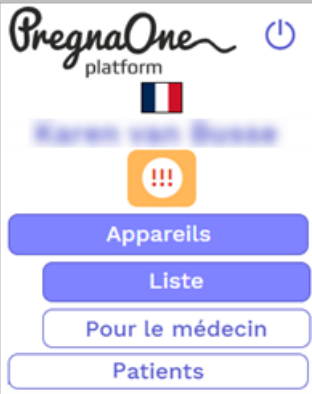
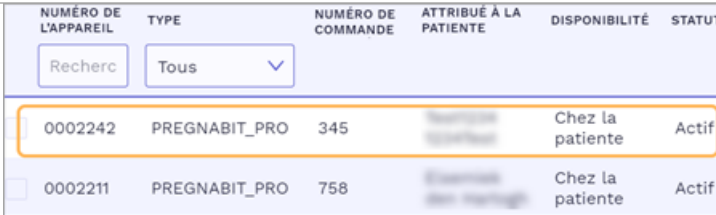


Partagé

3. Dans l'aperçu, cherchez l'enregistrement souhaité et cliquez sur le numéro d'examen bleu pour ouvrir l'enregistrement et le visualiser.

NUMÉRO D'EXAMEN	Nom de famille de la patiente	Prénom de la patiente	DATE DE DÉBUT DE L'EXAMEN	DATE DE FIN DE L'EXAMEN	ACTIONS
Reche	Rechercher	Rechercher			
2166	TRANQUILLIÈRE	Karen	01.02.2023, 10:04	01.02.2023, 10:05	Évaluer
1952	TRANQUILLIÈRE	Karen	16.01.2023, 14:35	16.01.2023, 15:21	En cours de description

4. *Évaluation*
L'enregistrement CTG est terminé ? Vous pouvez alors ajouter une évaluation. Cliquez sur [Évaluer] > [Oui]. Ouvrez l'onglet « Résumé et évaluation ».

NUMÉRO D'EXAMEN	Nom de famille de la patiente	Prénom de la patiente	DATE DE DÉBUT DE L'EXAMEN	DATE DE FIN DE L'EXAMEN	ACTIONS
Reche	Rechercher	Rechercher			
2166	TRANQUILLIÈRE	Karen	01.02.2023, 10:04	01.02.2023, 10:05	Évaluer
1952	TRANQUILLIÈRE	Karen	16.01.2023, 14:35	16.01.2023, 15:21	En cours de description

<p>5. Cliquez ici sur [Créer une évaluation]. Complétez et cliquez sur [Sauver].</p>	
<p>Plateforme : retour de l'appareil (de la patiente à l'hôpital)</p>	
<p>1. Connectez-vous sur l'ordinateur « preгнаone.com » avec votre de passe.</p>	
<p>2. Cliquez à gauche sur [Appareils] puis sur [Liste] pour ouvrir l'aperçu des appareils.</p>	
<p>3. Cherchez l'appareil concerné et cliquez sur la ligne pour ouvrir l'écran des données de l'appareil.</p>	
<p>4. Cliquez sur le curseur derrière « Retour » confirmez ensuite le retour en cliquant sur [Oui].</p>	
<p>5. En bas de l'écran, cochez « Appareil prêt à l'emploi » (Oui).</p>	



Index

A

Accès unique 9

Anamnèse détaillée 18, 31

Appareil

Attribuer 18

Déconnecter 40

Se déconnecter 13

Appareil de confiance 9

C

CE classe 5

Check-list (instructions patiente) 45

Choisir la langue 10

Clôturer la grossesse 18

Commande

Annuler 40

En cours 21

Nouvelle 18

Terminer 40

Compléter/modifier les données de la patiente 24, 37

Contact 5

Copyright 4

D

Démarrage rapide 23

Désinfection 43

Distributeur 5

Données de la grossesse 18

Données médicales 18

E

Enregistrement CTG 13, 18, 23

Arrêter 13

Attribuer 29, 31

Chercher 29

Connecter 31

Consulter simultanément 35

Démarrer 13, 33

Durée de l'enregistrement 13

Éditer 33

Enregistrement CTG avec patiente connectée 18

Enregistrement CTG sans patiente connectée 13

Enregistrement transmis par streaming 18

Évaluation 29, 33

Modifier le volume 13

Problèmes détectés 33

Qualification 18

Rechercher un enregistrement CTG sur la plateforme 29

Regarder l'enregistrement CTG en direct 18

Enregistrement transmis par streaming 18

Évaluation 33

Examen rapide 13

Examens à domicile 18

F

Fabricant 5

FHR transducer 13

Formulaire abrégé 18

G

Grossesse terminée 18

I

Icône de note 29

Instructions à la patiente 25, 45

M

Mesurer la tension artérielle 13

Modifier le volume 13

Mouvements du fœtus 13

N

Nettoyage 43

Note 13

O

Oxymètre de pouls 13

Ne s'allume pas 47

P

Paramètres d'affichage de l'examen 18

Partager le volet de la patiente 18

Patiente

Ajouter 18

Check-list (instructions patiente) 45



Chercher 21	R
Nouvelle patiente 18, 23, 31	Rapport 38
Anamnèse détaillée 31	S
Patiente existante 21, 23, 31	Se connecter 9
Qualification 18	Se déconnecter
Patiente: 18	Appareil 13
Plan étape par étape pour l'hôpital 54	Platform 9
Plan étape par étape pour la pratique des	Support 5
sages-femmes 51	Symboles/Pictogrammes 6
Problèmes détectés 33	T
Q	TOCO transducer 13
Qualification 18	V
Questions fréquentes (FAQ) 47	Version du logiciel 5