

Brosse à dents aspirante non traitée Sage

REF 6577-A



Informations figurant sur l’emballage

Contenu :

- (1) Brosse à dents aspirante non traitée.

Utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Déballez le paquet. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d’aspiration. Brossez les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placez le pouce sur le stop-vidé. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l’hôpital et à la réglementation locale.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l’outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n’est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants ou les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l’outil pourrait être endommagé et un risque d’étouffement/aspiration pourrait être présent. Peut ne pas fonctionner car un risque intentionnel/potentiel d’intercontamination existe si l’outil est réutilisé.

Fabrication sans latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Brosse à dents aspirante non traitée Sage
Code produit	6577-A
Description	Système d’aspiration à usage unique pour les patients à risque de pneumonie par aspiration
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	18,4 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Quantité par boîte	100

Caractéristiques et utilisation

Brosse à dents aspirante

Poils en nylon	• Élimine la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Plus de 3 100 poils ou « points de contact »	• Nettoie et aide à enlever la plaque dentaire
Trois ports d’aspiration	• Évite l’encrassement et permet d’éliminer les débris
Disponible avec une poignée d’aspiration	• Offre un contrôle variable de l’aspiration et permet de changer rapidement d’outil
Se fixe directement aux lignes d’aspiration standards	• Contribue à fournir une force d’aspiration constante
Poignée coudée	• Permet le nettoyage de l’arrière de la cavité buccale

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu’il décide de l’utilisation d’un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l’utilisation d’un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l’étendue de l’offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l’étiquette d’identification du produit et/ou le manuel d’utilisation avant d’employer tout produit Stryker. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l’UE.

La brosse à dents aspirante non traitée Sage est un dispositif médical de classe IIa **CE** 2797. Elle est prévue pour aider à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales. Ce dispositif est à utiliser chez les patients qui ne peuvent pas expectorer, dans le cadre d’un protocole de soins bucco-dentaires complet pour aider à réduire le risque de pneumonie nosocomiale (PN) et de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM). Il est à utiliser sous la direction d’un professionnel de santé et fournit une force d’aspiration suffisante pour atteindre l’objectif visé. Fabricant légal : Sage Products LLC. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l’étiquette d’identification du produit et/ou le manuel d’utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d’employer tout produit Stryker. Avril 2023

STRYKER France – 333 710 275 RCS Lyon – Avenue de Satolas Green ZAC 69330 Pusignan.

Ce document n’est pas destiné à être distribué en dehors de l’UE et de l’AELE.

Système de soins de bouche Sage : **CE** 2797


Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

stryker.fr

STRYKER FRANCE SA,
au capital social de 27 495 520,00 €,
situé au AV ZAC DE SATOLAS GREEN,
69330 PUSIGNAN, RCS Lyon 333 710 275

SMACC # 2023-34429
29277-FR
Copyright © 2023 Stryker
05/2023