

Système de soin buccal Sage q8°

REF 6938-BP



Informations figurant sur l'emballage

Contient :

- (2) paquets de (1) brosse à dents aspirante non traitée, 7 ml de solution buccale Sage, (1) écouvillon applicateur.
- (1) paquet de (1) écouvillon aspirant avec bicarbonate de sodium, 7 ml de bain de bouche sans alcool, 2 g d'hydratant buccal et (1) écouvillon applicateur.

Indications d'utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Écouvillon aspirant : Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d'aspiration. Brossez les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Utiliser l'écouvillon applicateur si un nettoyage supplémentaire est nécessaire.

Solution buccale Sage : Ne pas rincer avec de l'eau ou d'autres bains de bouche, se brosser les dents ou manger immédiatement après l'utilisation de la solution buccale Sage. Ne pas avaler. Pour réduire la décoloration des dents, brosser et utiliser du fil dentaire chaque jour. Conserver à une température supérieure à 0.

Écouvillon aspirant : Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer l'écouvillon aspirant à la ligne d'aspiration. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Appliquer de l'hydratant buccal sur l'écouvillon applicateur et l'appliquer sur les lèvres et la cavité buccale le cas échéant.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Système de soin buccal Sage q8°
Code produit	6938-BP
Description	Kit quotidien de soins d'hygiène bucco-dentaire comprenant des outils pour chaque quart du personnel infirmier de 8 heures
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Informations concernant le stockage	Conserver à une température supérieure à 0°
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	18,4 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Longueur de l'écouvillon aspirant	18,4 cm
Longueur de l'écouvillon applicateur	15,9 cm
Quantité de solution dans chaque sachet doseur	7 ml
Quantité d'hydratant buccal	2 g
Quantité par boîte	25

Système de soin buccal Sage q8°

Caractéristiques et avantages

Les systèmes de soin buccal de Sage offrent une approche globale des soins bucco-dentaires afin de nettoyer et d'hydrater la cavité buccale.

Brosse à dents aspirante

Poils en nylon doux	<ul style="list-style-type: none"> Élimine en douceur la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Plus de 3 100 poils ou « points de contact »	<ul style="list-style-type: none"> Nettoie et enlève la plaque dentaire
Stop-wide	<ul style="list-style-type: none"> Permet de contrôler l'aspiration et de changer d'outil rapidement
Trois ports d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Évite l'encrassement et permet d'éliminer les débris
Disponible avec une poignée d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Offre un contrôle variable de l'aspiration et permet de changer rapidement d'outil
Se fixe directement aux lignes d'aspiration standards	<ul style="list-style-type: none"> Contribue à fournir une force d'aspiration
Poignées coudées	<ul style="list-style-type: none"> Assure le nettoyage de l'arrière de la cavité buccale

Écouvillon aspirant

Écouvillon aspirant	<ul style="list-style-type: none"> Aide à éliminer les débris et les sécrétions entre les brossages
Têtes en mousse souple	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tissus buccaux délicats

Ingrédients solution buccale Sage

Eau (aqua)
Alcool
Glycérine
Sorbitan diisostéarate PEG-40
Goût (arôme)
Digluconate de chlorhexidine
Saccharine sodique
Bleu 1 (Cl 42090)

Ingrédients bain de bouche sans alcool

Eau (aqua)
Sorbitol
Goût (arôme)
Sorbate de potassium
Polysorbate 80
Polysorbate 20
Chlorure de cétylpyridinium
Acide citrique
Bleu 1 (Cl 42090)

Ingrédients bicarbonate de sodium

Eau (aqua)
Bicarbonate de sodium
Gomme cellulose
Laurylsulfate de sodium
Goût (arôme)
Saccharine sodique
Benzoate de sodium

Ingrédients hydratant buccal

Eau (aqua)
Huile de cocos nucifera (noix de coco)
Xylitol
Goût (arôme)
Gomme cellulose
Acétate de tocophéryle
Huile de feuilles de Mentha viridis (menthe verte)
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Sorbate de potassium
Carbomer
Chlorure de cétylpyridinium

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Q-Care. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Imprevia Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués **CE**.

Les dispositifs médicaux comprenant les écouvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

Le système de soins de bouche Sage et les canules Yankauer sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa **CE**₂₇₉₇ destinés à l'hygiène bucco-dentaire des patients en réanimation. Pour toute information complémentaire avant l'utilisation des produits de Sage Product, se reporter aux instructions sur l'emballage.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28838
23078C-FR
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 02/2021