

Écouvillon aspirant non traité Sage

REF 6578-X



Informations sur le conditionnement

Contient :

- (1) Ecouvillon aspirant non traité

Utilisation: Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

Instructions : Le déballer. Fixer l'écouvillon aspirant à la ligne d'aspiration. Mouiller l'écouvillon avec de l'eau ou une solution, si nécessaire. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter.

Avertissement :

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Soyez attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Pour usage unique.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nom du produit | Ecouvillon aspirant non traité Sage |
| Référence | 6578-X |
| Description | Système d'aspiration à usage unique destiné aux patients pouvant être atteints de pneumonie par aspiration |
| Accréditation du fabricant | ISO 13485:2016 |
| Longueur de l'écouvillon aspirant | 18,4 cm |
| Quantité par conditionnement | 100 |

Caractéristiques et avantages

Ecouvillon aspirant

| | |
|------------------------|---|
| Ecouvillon aspirant | • Aide à éliminer les débris et les sécrétions buccales entre les brossages |
| Têtes en mousse souple | • Délicat sur les tissus fragiles |

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Le système de soins de bouche Sage et les canules Yankauer sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa **CE**₂₇₉₇ destinés à l'hygiène bucco-dentaire des patients en réanimation. Pour toute information complémentaire avant l'utilisation des produits de Sage Product, se reporter aux instructions sur l'emballage.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28423
27369-FR
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021