

Brosse à dents aspirante non traitée Sage

REF 6577-X



Informations figurant sur l'emballage

Contenu :

- (1) Brosse à dents aspirante non traitée.

Utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Instructions : Déballer le paquet. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d'aspiration. Brosser les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le stop-vidé. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants ou les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Peut ne pas fonctionner car un risque intentionnel/potentiel d'intercontamination existe si l'outil est réutilisé.

Fabrication sans latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Brosse à dents aspirante non traitée Sage
Code produit	6577-X
Description	Système d'aspiration à usage unique pour les patients à risque de pneumonie par aspiration
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	18,4 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Quantité par boîte	100

Caractéristiques et utilisation

Brosse à dents aspirante

Poils en nylon	<ul style="list-style-type: none"> Élimine la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Plus de 3 100 poils ou « points de contact »	<ul style="list-style-type: none"> Nettoie et aide à enlever la plaque dentaire
Trois ports d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Évite l'encrassement et permet d'éliminer les débris
Disponible avec une poignée d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Offre un contrôle variable de l'aspiration et permet de changer rapidement d'outil
Se fixe directement aux lignes d'aspiration standards	<ul style="list-style-type: none"> Contribue à fournir une force d'aspiration constante
Poignée coudée	<ul style="list-style-type: none"> Permet le nettoyage de l'arrière de la cavité buccale

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les systèmes de soins buccaux Sage sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa **CE** 2797 destinés à l'hygiène bucco-dentaire des patients en réanimation. Pour toute information complémentaire avant l'utilisation des produits de Sage, se reporter aux instructions sur l'emballage.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.

Système de soins de bouche Sage : **CE** 2797



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700
stryker.fr

Distribué par :
Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan, France
333 710 275 RCS Lyon

SMACC # 2021-31096
28376-FR
Copyright © 2021 Stryker
09/2021