

Brosse à dents aspirante non traitée Sage avec bain de bouche sans alcool et soin hydratant buccal

REF 6573-A



Informations figurant sur l’emballage

Contenu :

- (1) brosse à dents aspirante non traitée, (1) 7 ml de bain de bouche sans alcool, (1) 2 g d’hydratant buccal et (1) écouvillon applicateur non traité.

Utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Écouvillon aspirant : Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Eclater le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d’aspiration. Brosser les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le stop-vide. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l’hôpital et à la réglementation locale. Appliquer de l’hydratant buccal sur l’écouvillon applicateur et l’appliquer sur les lèvres et la cavité buccale le cas échéant.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l’outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n’est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l’outil pourrait être endommagé et un risque d’étouffement/aspiration pourrait être présent. Peut ne pas fonctionner car un risque intentionnel/potentiel d’intercontamination existe si l’outil est réutilisé.

Fabrication sans latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Brosse à dents aspirante non traitée Sage avec bain de bouche sans alcool et soin hydratant buccal
Code produit	6573-A
Description	Système d’aspiration à usage unique pour les patients à risque de pneumonie par aspiration
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	18,4 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Longueur de l’écouvillon applicateur	15,9 cm
Quantité de solution dans chaque sachet doseur	7 ml
Quantité d’hydratant buccal	2 g
Quantité par boîte	100

Brosse à dents aspirante non traitée Sage

avec bain de bouche sans alcool et soin hydratant buccal

Caractéristiques et utilisation

Brosse à dents aspirante

Poils en nylon	<ul style="list-style-type: none">Élimine la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Plus de 3 100 poils ou « points de contact »	<ul style="list-style-type: none">Nettoie et aide à enlever la plaque dentaire
Trois ports d'aspiration	<ul style="list-style-type: none">Évite l'encrassement et permet d'éliminer les débris
Disponible avec une poignée d'aspiration	<ul style="list-style-type: none">Offre un contrôle variable de l'aspiration et permet de changer rapidement d'outil
Se fixe directement aux lignes d'aspiration standards	<ul style="list-style-type: none">Contribue à fournir une force d'aspiration constante
Poignée coudée	<ul style="list-style-type: none">Permet le nettoyage de l'arrière de la cavité buccale

Ingrédients bain de bouche sans alcool

Eau (aqua)
Sorbitol
Goût (arôme)
Sorbate de potassium
Polysorbate 80
Polysorbate 20
Chlorure de cétylpyridinium
Acide citrique
Bleu 1 (CI 42090)

Ingrédients soin hydratant buccal

Eau (aqua)
Huile de cocos nucifera (noix de coco)
Xylitol
Goût (arôme)
Gomme cellulose
Acétate de tocophéryle
Huile de feuilles de Mentha viridis (menthe verte)
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Sorbate de potassium
Carbomer
Chlorure de cétylpyridinium



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

stryker.fr

STRYKER FRANCE SA,
au capital social de 27 495 520,00 €,
situé au AV ZAC DE SATOLAS GREEN,
69330 PUSIGNAN, RCS Lyon 333 710 275

SMACC # 2023-34427
29280-FR
Copyright © 2023 Stryker
05/2023

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, O-Care, Toothette Oral Care. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

La brosse à dents aspirante non traitée Sage avec bain de bouche sans alcool et soin hydratant buccal est un dispositif médical de classe IIa **CE**₂₇₉₇. Elle est prévue pour aider à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales. Ce dispositif est à utiliser chez les patients qui ne peuvent pas expectorer, dans le cadre d'un protocole de soins bucco-dentaires complet pour aider à réduire le risque de pneumonie nosocomiale (PN) et de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM). Il est à utiliser sous la direction d'un professionnel de santé et fournit une force d'aspiration suffisante pour atteindre l'objectif visé.

Fabricant légal : Sage Products LLC.

Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker. Avril 2023

STRYKER France – 333 710 275 RCS Lyon – Avenue de Satolas Green ZAC 69330 Pusignan

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.

Système de soins de bouche Sage : **CE**₂₇₉₇