

Brosse à dents aspirante non traitée Sage avec solution buccale Sage

REF 6977-A



Informations figurant sur l’emballage

Contient :

- (1) Brosse à dents aspirante non traitée, (1) 7 mL de solution buccale Sage, (1) écouvillon applicateur.

Utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d’aspiration. Brosser les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le stop-vide. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l’hôpital et à la réglementation locale. Utiliser l’écouvillon applicateur si un nettoyage supplémentaire est nécessaire.

Sachet doseur de solution buccale Sage : Ne pas rincer avec de l’eau ou d’autres bains de bouche, se brosser les dents ou manger immédiatement après l’utilisation de la solution buccale Sage. Ne pas avaler. Pour réduire la décoloration des dents, brosser et utiliser du fil dentaire chaque jour. Conserver à une température supérieure à 0°.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l’outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n’est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester prudent avec les enfants ou les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l’outil pourrait être endommagé et un risque d’étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Fabrication sans latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Brosse à dents aspirante non traitée Sage avec solution buccale Sage
Code produit	6977-A
Description	Systèmes d’aspiration à usage unique pour les patients à risque de pneumonie par aspiration
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	18,4 cm
Longueur de l’écouvillon applicateur	15,9 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Quantité de solution dans chaque sachet doseur	7 ml
Quantité par boîte	100

Caractéristiques

Brosse à dents aspirante	
Poils en nylon doux	<ul style="list-style-type: none"> Élimine en douceur la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Plus de 3 100 poils ou « points de contact »	<ul style="list-style-type: none"> Nettoie et enlève la plaque dentaire
Trois ports d’aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Évite l’encrassement et permet d’éliminer les débris
Disponible avec une poignée d’aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Offre un contrôle variable de l’aspiration et permet de changer rapidement d’outil
Se fixe directement aux lignes d’aspiration standards	<ul style="list-style-type: none"> Contribue à fournir une force d’aspiration
Poignée coudée	<ul style="list-style-type: none"> Assure le nettoyage de l’arrière de la cavité buccale

Brosse à dents aspirante non traitée Sage avec solution buccale Sage

Ingrédients solution buccale Sage

Eau (aqua)
Alcool
Glycérine
Sorbitan diisostéarate PEG-40
Goût (arôme)
Digluconate de chlorhexidine
Saccharine sodique
Bleu 1 (CI 42090)



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

stryker.fr

STRYKER FRANCE SA,
au capital social de 27 495 520,00 €,
situé au AV ZAC DE SATOLAS GREEN,
69330 PUSIGNAN, RCS Lyon 333 710 275

SMACC # 2023-34431
29275-FR
Copyright © 2023 Stryker
06/2023

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Q-Care. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Impreva Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués **CE**.

Les dispositifs médicaux comprenant les écouvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

La brosse à dent aspirante non traitée Sage avec solution buccale Sage est un dispositif médical de classe IIa **CE** 2797. Elle est prévue pour aider à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales. Ce dispositif est à utiliser chez les patients qui ne peuvent pas expectorer, dans le cadre d'un protocole de soins bucco-dentaires complet pour aider à réduire le risque de pneumonie nosocomiale (PN) et de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM). Il est à utiliser sous la direction d'un professionnel de santé et fournit une force d'aspiration suffisante pour atteindre l'objectif visé.

Fabricant légal : Sage Products LLC.

Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker. Avril 2023

STRYKER France – 333 710 275 RCS Lyon – Avenue de Satolas Green ZAC 69330 Pusignan.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.