

Ecuvillon buccal non imprégné Sage Toothette

REF 5602UT-X



Informations sur le conditionnement

Utilisation :

- (1) Ecuvillon buccal non imprégné Sage Toothette

Use: Aide à ôter les résidus et les sécrétions buccales. Peut être utilisé pour appliquer des solutions de soins buccaux.

Instructions : Mouiller l'écuvillon avec de l'eau ou une solution. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Cracher. Jeter.

Attention :

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Soyez attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Pour usage unique.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Ecuvillon buccal non imprégné Sage Toothette
Référence	5602UT-X
Description	Ecuvillon applicateur conçu pour aider à retirer les débris et sécrétions orales, et appliquer les solutions de soins de bouche
Accréditation du fabricant	ISO 13485:2016
Longueur de l'écuvillon	11 cm
Quantité par conditionnement	1 000

Caractéristiques et avantages

Ecuvillon

Ecuvillon	<ul style="list-style-type: none"> • Aide à éliminer les débris et les sécrétions buccales entre les brossages
Têtes en mousse souple	<ul style="list-style-type: none"> • Convient aux tissus buccaux délicats

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se repérer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Ecuvillon de soins bucco-dentaires Toothette. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les dispositifs médicaux comprenant les écuvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28419
27364-FR
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021