

Écouvillon buccal Sage avec rince-bouche Corinz™

REF 6583-X



Informations figurant sur l'emballage

Contient :

- (2) écouvillons applicateurs avec du bicarbonate de sodium, (1) 7 ml de rince-bouche Corinz

Indications d'utilisation : Aide à ôter les résidus et les sécrétions buccales.

Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Demander au patient de cracher. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Répéter autant que nécessaire/comme indiqué.

Rince-bouche Corinz : Enfants de moins de 3 ans : Consulter un dentiste ou un médecin. Enfants de moins de 12 ans : superviser l'utilisation. À utiliser en suivant les conseils d'un professionnel de la santé. Tenir hors de portée des enfants.

Attention : Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Écouvillon buccal Sage avec rince-bouche Corinz
Code produit	6583-X
Description	Aide à ôter les résidus et les sécrétions buccales.
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de l'écouvillon applicateur	15,9 cm
Quantité de solution dans le rince-bouche Corinz	7 ml
Quantité par boîte	100

Caractéristiques et avantages

Écouvillon applicateur

Écouvillon applicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Aide à éliminer les débris et les sécrétions entre les brossages
Têtes en mousse souple	<ul style="list-style-type: none"> • Délicat sur les tissus fragiles

Écouvillon buccal Sage avec rince-bouche Corinz™

Ingrédients rince-bouche Corinz

Eau (aqua)
Glycérine
Xylitol
Goût (arôme)
Hydroxyéthylcellulose
Sorbate de potassium
Chlorure de cétypyridinium
Saccharine sodique
Acide citrique
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Menthol

Ingrédients bicarbonate de sodium

Eau (aqua)
Bicarbonate de sodium
Gomme cellulose
Laurylsulfate de sodium
Goût (arôme)
Saccharine sodique
Benzoate de sodium

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Rince-bouche Corinz, Écouvillon de soins bucco-dentaires Toothette. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Impreva Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués **CE**.

Les dispositifs médicaux comprenant les écouvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28418
27363-FR
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021