

# Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz™

REF 6584-X



## Informations figurant sur l'emballage

### Contient :

- (2) écouvillons aspirants avec du bicarbonate de sodium, (1) 7 ml de rince-bouche Corinz™

**Indications d'utilisation :** Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

**Instructions :** Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer le tampon aspirant à la ligne d'aspiration. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Répéter autant que nécessaire/comme indiqué.

**Rince-bouche Corinz :** Enfants de moins de 3 ans : Consulter un dentiste ou un médecin. Enfants de moins de 12 ans : Superviser l'utilisation. À utiliser en suivant les conseils d'un professionnel de la santé. Tenir hors de portée des enfants.

**Attention :** Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

## Spécifications

Nom du produit	Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz
Code produit	6584-X
Description	Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de l'écouvillon aspirant	18,4 cm
Quantité de solution dans le rince-bouche Corinz	7 ml
Quantité par boîte	100

## Caractéristiques et avantages

### Écouvillon aspirant

Écouvillon aspirant	• Aide à éliminer les débris et les sécrétions entre les brossages
Têtes en mousse souple	• Délicat sur les tissus fragiles

# Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz™

## Ingrédients rince-bouche Corinz

Eau (aqua)  
Glycérine  
Xylitol  
Goût (arôme)  
Hydroxyéthylcellulose  
Sorbate de potassium  
Chlorure de cétypyridinium  
Saccharine sodique  
Acide citrique  
Polysorbate 20  
Polysorbate 80  
Menthol

## Ingrédients bicarbonate de sodium

Eau (aqua)  
Bicarbonate de sodium  
Gomme cellulose  
Laurylsulfate de sodium  
Goût (arôme)  
Saccharine sodique  
Benzoate de sodium



Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA  
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

**stryker.fr**

SMACC # 28417  
27362-FR  
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S  
ZAC - Avenue de Satolas Green  
69330 Pusignan,  
France  
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021

### Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Rince-bouche Corinz, Kit de bains de bouche Q-Care. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Impreva Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués **CE**.

Le système de soins de bouche Sage et les canules Yankauer sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa **CE**<sub>2797</sub> destinés à l'hygiène bucco-dentaire des patients en réanimation. Pour toute information complémentaire avant l'utilisation des produits de Sage Product, se reporter aux instructions sur l'emballage.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.