

Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz™

REF 6584-A



Informations figurant sur l'emballage

Contient :

- (2) écouvillons aspirants avec du bicarbonate de sodium,
- (1) 7 ml de rince-bouche Corinz™

Indications d'utilisation : Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débiller. Fixer l'écouvillon aspirant à la ligne d'aspiration. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le stop-vide. Rincer pour nettoyer la tubulure après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Répéter autant que nécessaire/comme indiqué.

Rince-bouche Corinz : Enfants de moins de 3 ans : Consulter un dentiste ou un médecin. Enfants de moins de 12 ans : Superviser l'utilisation. À utiliser en suivant les conseils d'un professionnel de la santé. Tenir hors de portée des enfants.

Attention : Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Rester attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Peut ne pas fonctionner car un risque intentionnel/potentiel d'intercontamination existe si l'outil est réutilisé.

Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz
Code produit	6584-A
Description	Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux
Homologation du fabricant	ISO 13485:2016
Date de péremption	24 mois à partir de la date de fabrication
Longueur de l'écouvillon aspirant	18,4 cm
Quantité de solution dans le rince-bouche Corinz	7 ml
Quantité par boîte	100

Caractéristiques

Écouvillon aspirant

Écouvillon aspirant	• Aide à éliminer les débris et les sécrétions entre les brossages
Têtes en mousse souple	• Délicat sur les tissus fragiles

Système d'aspiration Sage avec rince-bouche Corinz™

Ingrédients rince-bouche Corinz

Eau (aqua)
Glycérine
Xylitol
Goût (arôme)
Hydroxyéthylcellulose
Sorbate de potassium
Chlorure de cétypyridinium
Saccharine sodique
Acide citrique
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Menthol

Ingrédients bicarbonate de sodium

Eau (aqua)
Bicarbonate de sodium
Gomme cellulose
Laurylsulfate de sodium
Goût (arôme)
Saccharine sodique
Benzoate de sodium



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

stryker.fr

STRYKER FRANCE SA,
au capital social de 27 495 520,00 €,
situé au AV ZAC DE SATOLAS GREEN,
69330 PUSIGNAN, RCS Lyon 333 710 275

SMACC # 2023-34430
29276-FR
Copyright © 2023 Stryker
06/2023

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Rince-bouche Corinz, Kit de bains de bouche Q-Care. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Impreva Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués **CE**.

Le système d'aspiration Sage avec rinçage buccal Corinz est un dispositif médical de classe IIa **CE**₂₇₉₇. Il est prévu pour aider à ôter les sécrétions et les résidus buccaux. Ce dispositif est à utiliser chez les patients qui ne peuvent pas expectorer, dans le cadre d'un protocole de soins bucco-dentaires complet pour aider à réduire le risque de pneumonie nosocomiale (PN) et de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM). Il est à utiliser sous la direction d'un professionnel de santé et fournit une force d'aspiration suffisante pour atteindre l'objectif visé. Fabricant légal : Sage Products LLC.

Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker. Avril 2023

STRYKER France – 333 710 275 RCS Lyon – Avenue de Satolas Green ZAC 69330 Pusignan.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.