

Système de soins buccaux Petite Q4 Sage

REF 6714-A



Informations sur le conditionnement

Contient :

- (2) paquets de (1) petite brosse à dents aspirante non traitée, 7 ml de bain de bouche sans alcool 2 g de soin hydratant buccal et (1) écouvillon applicateur.
- (4) paquets de (1) petit écouvillon aspirant non traité, 7 ml de bain de bouche sans alcool, 2 g d'hydratant buccal et (1) écouvillon applicateur.

Utilisation :

Brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales.

Ecouvillon aspirant : Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux.

Instructions :

Brosse à dents aspirante : Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débarrasser. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d'aspiration. Brossez les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter. Appliquer du soin hydratant buccal sur l'écouvillon applicateur et l'appliquer sur les lèvres et la cavité buccale le cas échéant.

Ecouvillon aspirant : Instructions : Ouvrir le sachet de solution avec les pouces. Le débarrasser. Fixer l'écouvillon aspirant à la ligne d'aspiration. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter. Appliquer du soin hydratant buccal sur l'écouvillon applicateur et l'appliquer sur les lèvres et la cavité buccale le cas échéant.

Avertissement:

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Soyez attentifs avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

Spécifications

Nom du produit	système de soins buccaux Petite Sage q4°
Référence	6714-A
Description	Kit journalier pour hygiène buccale incluant des outils pour un soin toutes les 4 heures
Accréditation du fabricant	ISO 13485:2016
Date d'expiration	24 mois à compter de la date de fabrication
Longueur de la brosse à dents aspirante	13,1 cm
Longueur de chaque poil	8 mm
Longueur de l'écouvillon aspirant	17,5 cm
Longueur de l'écouvillon applicateur	15,9 cm
Quantité de solution contenue dans chaque paquet éclatable	7 ml
Quantité d'hydratant buccal	2 g
Quantité par conditionnement	15

Systeme de soins buccaux Petite Q4 Sage

Caractéristiques et avantages

Brosse à dents aspirante

Poils en nylon ultra-doux	<ul style="list-style-type: none"> Élimine en douceur la plaque dentaire, les débris et les sécrétions buccales, connus pour héberger des agents pathogènes respiratoires
Trois ports d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'aider à éviter l'encrassement et éliminer facilement les débris
Se fixe directement aux lignes d'aspiration standards	<ul style="list-style-type: none"> Permet de favoriser l'observance du protocole

Écouvillon aspirant

Écouvillon aspirant	<ul style="list-style-type: none"> Aide à éliminer les débris et les sécrétions entre les brossages
Têtes en mousse souple	<ul style="list-style-type: none"> Délicat sur les tissus fragiles

Ingrédients sans alcool pour lavage buccal

Eau (aqua)
Sorbitol
Saveur (arôme)
Sorbate de potassium
Polysorbate 80
Polysorbate 20
Chlorure de cétylepyridinium
Acide citrique
Bleu 1 (CI 42090)

Composants de l'hydratant buccal

Eau (aqua)
cocos nucifera (huile de coco)
Xylitol
Saveur (arôme)
Gomme cellulose
Acétate de tocophéryle
Huile de feuilles de Menthe verte
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Sorbate de potassium
Carbomer
Chlorure de cétylepyridinium



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28414
24676C-FR
Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021


Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

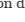
Le professionnel de santé doit toujours se reposer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

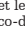
Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Rince-bouche Corinz, Kit de bains de bouche Q-Care, Écouvillon de soins bucco-dentaires Tothette. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués  conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les solutions comprenant le bain de bouche sans alcool, le bonnet pour soins capillaires sans rinçage Comfort, le rince-bouche Corinz, Essential Bath, les carrés de soins de nettoyage pour incontinence, Impreva Bath, l'hydratant buccal, et la solution de soins bucco-dentaires Sage sont des cosmétiques 1223/2009 marqués .

Les dispositifs médicaux comprenant les écouvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

Le système de soins de bouche Sage et les canules Yankauer sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa  destinés à l'hygiène bucco-dentaire des patients en réanimation. Pour toute information complémentaire avant l'utilisation des produits de Sage Product, se reporter aux instructions sur l'emballage.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.