
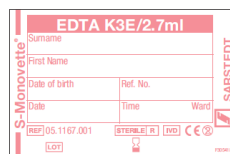


FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – S-Monovette® EDTA K₃ – Code EU

Fiche créée le: 29/11/2019

Dernière modification le: 12/10/2021

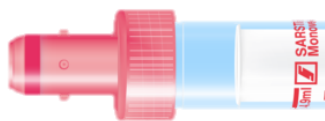

Étiquette papier



Étiquette plastique

Désignation commerciale : S-Monovette® - EDTA K₃ – Bouchon rouge

Application : Prélèvement sanguin veineux pour analyses en hématologie

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Tube S-Monovette® pour prélèvement sanguin veineux sur EDTA K₃ pour analyses en hématologie, avec étiquette plastique transparente ou étiquette papier rouge
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79/CE
- **Matière :**

Tube :	Polypropylène PP
Bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE) + colorant rouge
Membrane	Caoutchouc naturel sans latex
Embout Piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Tige piston	Polystyrène
Etiquette	Plastique transparente ou papier colorée, graduée au volume nominal
- **Additifs :**

Additifs pulvérisés
EDTA K ₃
Dosage : 1,6 mg/ml de sang
- **Conditionnement :** Carton de 10 boîtes de 50 S-Monovette®, soit 500 pièces
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque S-Monovette®, boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque S-Monovette®, boîte et carton
Durée de vie : 18 mois en sortie de production
- **Qualités biologiques :** Stérile par irradiation

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – S-Monovette® EDTA K₃ – Code EU

Référencement des tubes S-Monovette® :

Référence Etiquette plastique	Référence Etiquette papier	Volume de remplissage	Ø	Longueur hors bouchon	Longueur totale
	02.1066001	9,0 ml	16 mm	92 mm	108 mm
	01.1605001	7,5 ml	15 mm	92 mm	108 mm
04.1931	04.1931001	4,9 ml	13 mm	90 mm	106 mm
03.1068	03.1068001	4,0 ml	15 mm	75 mm	91 mm
	04.1914001	3,4 ml	13 mm	65 mm	81 mm
04.1917	04.1917001	2,7 ml	13 mm	75 mm	91 mm
05.1167	05.1167001	2,7 ml	11 mm	66 mm	82 mm
04.1901	04.1901001	2,6 ml	13 mm	65 mm	81 mm
	05.1081001	1,6 ml	11 mm	66 mm	82 mm
	06.1664001	1,2 ml	8 mm	66 mm	82 mm
	06.1662001*	1,2 ml	8 mm	66 mm	82 mm

* sans bille d'agitation

Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique.

Pour prélèvement sanguin veineux uniquement.

Absence de latex.

Manipulations d'ouverture et fermeture sécurisées grâce au bouchon coiffant vissant, réalisables manuellement ou automatiquement sur les chaînes pré-analytiques et systèmes de débouchage ou rebouchage automatisés.

Respecter le mode d'emploi situé sur chaque boîte de S-Monovette® pour le prélèvement par aspiration ou par technique sous-vide.

Bien remplir au trait de jauge.

Après le prélèvement, mélanger avec précaution par retournements.

Stockage

Les tubes S-Monovette® doivent être stockés avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de températures s'étend de 4 à 25°C. Une qualité constante tout au long de la durée de vie est garantie par des conditions de stockage optimales. Par conséquent, les produits doivent, par principe, être protégés des températures extrêmes et des intempéries, ainsi que de l'humidité et des rayons UV.

Étanchéité

Les tubes S-Monovette® sont validés comme récipients primaires étanches en conformité avec l'Instruction d'emballage ADR-P650. Ils sont résistants sans fuite à une différence de pression d'au moins 95 kPa (0,95 Bar).

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – S-Monovette® EDTA K₃ – Code EU

Centrifugation

Après le prélèvement, mélanger avec précaution par retournements.

Centrifugation : veuillez consulter nos recommandations à l'adresse :

www.sarstedt.com/fr/service/centrifugation

Pour un maximum de flexibilité, nous avons révisé méticuleusement nos recommandations de centrifugation actuelles et avec un regard particulier sur les hautes vitesses de centrifugation.

Notre outil de sélection, simple d'utilisation, vous donnera accès :

- ⇒ à la durée de centrifugation en sélectionnant une vitesse souhaitée
- ⇒ à la vitesse si vous sélectionnez une durée de centrifugation