

# LUBRIX *Spray*

LUBRIFIANT À BASE D'HUILE DE PARAFFINE  
POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX



## ■ AVANTAGES PRODUIT

- Lubrification manuelle des instruments chirurgicaux articulés
- Efficace pour éviter les traces noirâtres et les marbrures qui proviennent d'une eau de qualité insuffisante.
- Brillance des surfaces traitées
- Garantie d'un entretien facile et précis des instruments
- Répond aux exigences de pureté de toutes les pharmacopées internationales



# LUBRIX Spray

LUBRIFIANT À BASE D'HUILE DE PARAFFINE POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

## MODE D'EMPLOI

### ■ 1ère utilisation :

- Porter des gants et des lunettes
- Placer l'embout sur le bec de l'aérosol

### ■ Utilisation :

- 1- Agiter l'aérosol avant emploi
- 2- Tenir l'aérosol verticalement et pulvériser de manière ciblée sur les articulations des instruments par brèves pressions
- 3- Actionner les articulations plusieurs fois pour une bonne répartition du produit
- 4- Essuyer avec une lingette sèche

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Incolore**
- pH : **6,5**
- Conservation après ouverture : **4 ans**

## COMPOSITION

- Huile de paraffine purifiée
- Emulsifiant
- Gaz propulseur : azote

## CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 4 aérosol de 400 ml.....réf. **1032856**



Produit à usage professionnel- respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.