

Lingettes Protasept

Référence : HYIP027



Comprenant :

1 boîte de 50 lingettes Protasept

PROTASEPT


Nettoyage de l'embout auriculaire

L'utilisation des lingettes PROTASEPT permet d'éliminer le cérumen efficacement sans dommage sur les composants.

Une utilisation quotidienne est recommandée.

1. Ouvrir le sachet et sortir la serviette nettoyante PROTASEPT.
2. Envelopper l'embout et l'appareil dans la serviette PROTASEPT.
3. Après avoir laissé le produit agir 1 minute, les aides auditives ou les embouts doivent être séchés avec un tissu propre et absorbant

Un nettoyage quotidien est fortement recommandé pour un fonctionnement optimal. Après utilisation, jeter la serviette PROTASEPT.

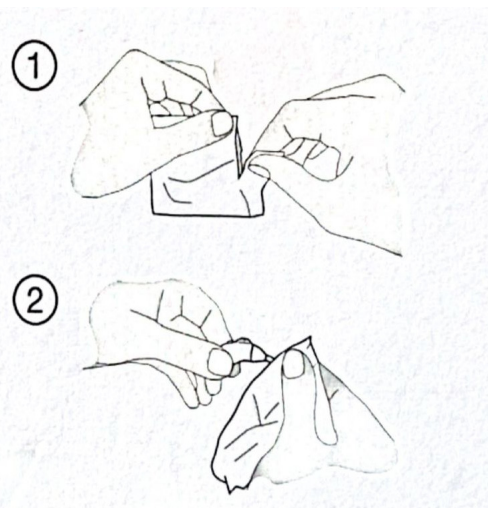

Précaution d'emploi : Usage externe. Tenir hors de portée des enfants. Après usage, essuyer les aides auditives avec un tissu propre et absorbant



EAROW BY PRODWAYS - NÎMES
1 Route d'Aubais - CS 30255
30111 CONGENIES
Tél. : 33 (0) 466.80.22.89

EAROW BY PRODWAYS - LYON
2, impasse Maurice Ravel
69330 JONAGE
Tél. : 33 (0) 472.37.12.70