

Nettoyage et Désinfection de la Pompe

Nettoyage

Se référer aux instructions d'utilisation de la pompe :

- Déconnectez la pompe de l'alimentation secteur et éteignez l'appareil avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique.
- À l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, nettoyez la pompe à l'eau chaude savonneuse.
- La pompe résiste à l'eau et peut être placée sous l'eau courante chaude pour le nettoyage.
- Séchez soigneusement la pompe à l'aide d'un chiffon doux avant de la réutiliser.

Remarque : Pour ne pas endommager la pompe, n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants, ni de procédés de nettoyage agressifs au niveau des capteurs de pression.

Désinfection

Pour déterminer la procédure de désinfection adéquate, veuillez suivre les directives propres à votre établissement. Notez cependant que certains désinfectants agressifs peuvent endommager ou décolorer le boîtier de la pompe et la garantie n'est pas applicable dans ce cas-là.

Nestlé recommande l'usage de certains désinfectants :

Produits	Principe Actif
Iodophor	Oxidizer (Iodine)
Metrex Cavacide	Quaternary Ammonia
Kohrsolin extra	Quaternary Ammonia
Terralin Protect	Quaternary Ammonia
Rheosept WD+	Quaternary Ammonia
Incidin Plus	Alkylamine
Metricide 28	Glutaraldehyde / Aldehyde
Meliseptol Wipes Sensitive	Glutaraldehyde / Aldehyde
Cidex OPA	Ortho-phthalaldehyde
Phosphoric acid	Phosphoric acid
Citrus Solvent	Citrus Terrenes
Acryl Des	Quaternary Ammonia
Antiseptica Kombi Flache	Glutaraldehyde / Aldehyde
Antiseptica Kombi Instru N	Glutaraldehyde / Formacetale
Arjo	Quaternary Ammonia
Aseptix Ultrasan Broad Spectrum	Oxidizer (Peroxide)
Bacillol	Alcohol
Biguanid Flache N (2% max concentration)	Quaternary Ammonia
Bleach (10% solution of 8.25% sodium hypochlorite)	Oxidizer (Chlorine)
Cidex OPA	Ortho-phthalaldehyde
Citrus Solvent	Citrus Terrenes
Descogen Liquid	Oxidizer (Peroxide)

Gigasept PAA concentrate	Oxidizer (Peroxide)
Incidin	Alcohol
Incidin Active	Oxidizer (Peroxide)
Incidin Liquid	Alcohol
Incidin Plus	Alkylamine

Attention

- N'immergez pas la pompe dans l'eau.
- Ne mettez pas la pompe au lave-vaisselle.
- Pour éviter tout choc électrique, ne nettoyez jamais la pompe lorsqu'elle est branchée.
- Ne passez pas la pompe à l'autoclave.
- L'utilisation de produits de nettoyage/désinfectants agressifs et de l'alcool isopropylique peut endommager le boîtier de la pompe.