



# TWO MOVE®


## PLANCHE DE TRANSFERT



# TRANSFERT COUCHÉ - COUCHÉ

### RÉFÉRENCES :

SIIM4317  
SIIM4318  
SIIM8150190  
SIIM8070190  
SIIM4048  
SIIM4049  
SIIM4047

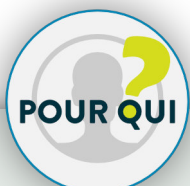

Elle s'adresse à des **patients nécessitant d'être transférés entre deux plans couchés.**

**Elle permet de transférer un patient entre deux plans couchés.**

**TWO MOVE®** est une planche de transfert souple et confortable, équipée d'une housse coulissante et amovible.

Insérée en hémicorps sous le patient, elle permet à un ou deux soignants de réaliser le transfert d'un patient, d'un brancard à une table d'opération par exemple, en le faisant glisser dessus.

TWO MOVE® est radiotransparente et amagnétique. Son traitement antibactérien et la housse amovible imperméable garantissent une capacité de désinfection totale et immédiate.

Elle existe en différentes versions : pliant, non pliant, court, long, large et extra-large.



### FACILITÉ D'UTILISATION

**Se désinfecte totalement** grâce à sa housse amovible.


**S'utilise sans contrainte** grâce à sa légèreté.



### ASSOCIATIONS DE PRODUITS



**HOUSES DE PROTECTION  
A USAGE UNIQUE**

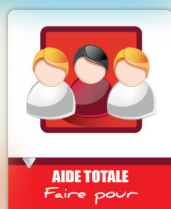

**CE**  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 22/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Immadie

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



# Fiche Technique TWO MOVE®

PLANCHE DE TRANSFERT



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

## INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, dans les services d'imagerie et les services de soin.

Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.**

**Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, la planche de transfert TWO MOVE® ne doit pas rester sur le sol.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés** : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé** : Détergent désinfectant surfaces hautes.

**Entretien de la planche** : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

**Entretien de la housse textile** :

- Lavage à 80° en machine. Séchage en machine à 60° maximum. Autoclave 136°.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air) de PH neutre.
- Lavage à la main, trempage et essuyage.

**Planche et housse textile** : Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

## CONDITIONNEMENT

1 carton contenant la planche de transfert TWO-MOVE®, sa housse textile et sa fiche technique.

## COMPOSITION & COULEUR

Planche : Plastazote.  
Housse textile : Nylon avec enduction PU, silicone.

Couleur :  
Planche noire, housse verte.

**Charge maximale admissible :**  
**150 kg à une distance < 30 cm**  
**300 kg à une distance < 10 cm**

RÉFÉRENCES	N° IDENTIF. UDI	DESCRIPTION - Planche de transfert TWO-MOVE® livrée avec sa housse textile	DIM.	SURFACE DE GLISSE	PLIABLE	POIDS	HOUSSE TEXTILE DE RECHANGE
SIIM4318	05708012003198	Corps Entier Pliable	190 x 50 cm	0,81 m <sup>2</sup>	Oui	1,1 kg	SIIM4048 51,5 x 161,5 cm (UDI : 05708012003143)
SIIM8150190	05708012003235	Corps Entier Non Pliable	190 x 50 cm	0,81 m <sup>2</sup>	Non	1,1 kg	SIIM4048 51,5 x 161,5 cm (UDI : 05708012003143)
SIIM4317	05708012003204	Demi-Corps	95 x 50 cm	0,40 m <sup>2</sup>	Non	0,6 kg	SIIM4047 79 x 50 cm (UDI : 05708012003136)
SIIM8070190	05708012003242	Corps Entier Bariatrique Pliable	190 x 70 cm	1,13 m <sup>2</sup>	Oui	1,8 kg	SIIM4049 71,5 x 161,5 cm (UDI : 05708012003150)