



POULIE®

SANGLE DE REHAUSSEMENT AU LIT



MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCE :

SI21680

Elle permet à l'aidant de rehausser une personne au lit grâce au geste du tir à la corde !



POULIE® est une sangle de rehaussement au lit. Elle se compose d'une sangle avec une poignée à chaque extrémité et d'un fourreau.

Attachée à la tête de lit ou directement sur le sommier, elle permet de faciliter le rehaussement.

Le fourreau se place au niveau du fessier et permet à l'aidant d'effectuer le geste du tir à la corde pour rehausser la personne, se préservant ainsi d'un effort.



+ PRÉVENTION DES TMS

POULIE® permet de rehausser tous types de personnes y compris à forte charge pondérale grâce à une charge maximale de 200 kg et son utilisation intuitive.




Elle s'adresse à des personnes ayant **des difficultés pour se rehausser au lit.**

ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour faciliter les rehaussements au lit, associez la sangle de rehaussement **POULIE®** avec d'autres aides techniques !

DRAPS DE REHAUSSEMENT

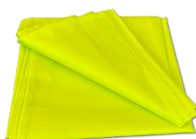


ALESOLI®
Réf :
MAD130 / MAD200




PROGLISS®
Réf :
PRO110 / PRO130 / PRO140



MULTIGLIDE®
Réf :
SIIM130

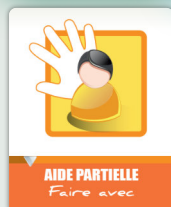

AIDE PARTIELLE
Faire avec

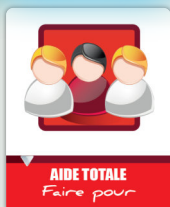

AIDE TOTALE
Faire pour



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 06/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France (Occitanie)

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

POULIE®

SANGLE DE REHAUSSEMENT AU LIT



INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une faible capacité de participation au rehaussement au lit ou une surcharge pondérale importante.

Attacher la sangle à un point fixe de la structure du lit.

Peut-être positionnée à côté du lit, toujours attachée, lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, la sangle POULIE® ne doit pas rester sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 sangle de rehaussement au lit POULIE® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.

Une mousse de 1 cm d'épaisseur assure le confort de la sangle.

Poignées : mousse polyuréthane.

Couleur : Vert, noir, gris.

Charge maximale admissible : 200 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Pour la sangle : Lavage à 60° en machine. Séchage à l'air libre.

Pour le fourreau : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SI21680	03760311370915	Sangle de rehaussement au lit POULIE®.	300 g	Sangle : 240 x 3,8 cm Fourreau : 60 x 10 cm