



ROLLBORD®

PLANCHE DE TRANSFERT



TRANSFERT COUCHÉ - COUCHÉ

RÉFÉRENCES :

SIECS130100NC
SIECS120100NC
SIECS110100NC
SISAA71101NC
SISAA71104NC
SISAA71105NC
SISAA71902NC



Elle s'adresse à des
**patients nécessitant d'être
transférés entre deux plans
couchés.**

Elle permet de transférer un patient entre deux plans couchés.

ROLLBORD® est une planche de transfert rigide confortable, bénéficiant d'un traitement antibactérien.

Insérée en hémicorps sous le patient, elle permet à un ou deux soignants de réaliser le transfert d'un patient, d'un brancard à une table d'opération par exemple, en le faisant glisser dessus.

ROLLBORD® est radiotransparente (hors modèle pliant).

Elle existe en différentes versions : pliant, non pliant, court.



PRÉVENTION DES TMS


Le transfert par glissement avec la planche de transfert ROLLBORD® permet de préserver le soignant d'un effort.



ASSOCIATIONS DE PRODUITS



**HOUSES DE PROTECTION
A USAGE UNIQUE**

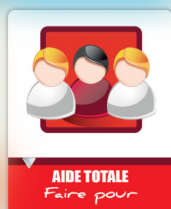

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 20/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Samarit

Origine : Suisse

Classe de dispositif : Classe 1



Fiche Technique ROLLBORD®

PLANCHE DE TRANSFERT

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur



INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, dans les services d'imagerie et les services de soin.

Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes. Peut être utilisée en service de radiologie dans sa version rigide.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, la planche de transfert ROLLBORD® ne doit pas rester sur le sol.
Ne pas utiliser en IRM.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 planche de transfert ROLLBORD® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Intérieur : Mousse fermée HDPE.

Housse : Tissu PE bleu recouvert avec du Téflon hydrophobe cousu.

Housse extérieure : Tissu PE avec revêtement argent, traitement antibactérien, retarde le feu (classe M2).

Embouts sécurité : poignée en ABS noire.

Vis : Métal anticorrosif.

Autocollant : imprimé film PVC.

Couleur : Gris

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression ou avec des détergents utilisés en hôpitaux (lingettes). Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stockage dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIF. UDI	DESCRIPTION	DIM.	SURFACE DE GLISSE	PLIABLE	POIDS	CHARGE MAX. ADMISSIBLE	HOUSSE DE RECHANGE
SIECS130100 NC	En cours d'obtention	ROLLBORD® Mini Gyn	91 x 50 cm	0,40 m ²	Non	1,65 kg	180 kg	SISAA71105NC 80 x 52 cm
SIECS120100 NC	En cours d'obtention	ROLLBORD® Softbed Radio Rigide	177 x 50 cm	0,82 m ²	Non	3,5 kg	310 kg	SISAA71101NC 164 x 52 cm
SIECS110100 NC	En cours d'obtention	ROLLBORD® Standard Pliant	177 x 50 cm	0,82 m ²	Oui	3,5 kg	240 kg	SISAA71101NC 164 x 52 cm

Paire d'embouts noirs de rechange pour ROLLBORD® - Réf : SISAA71902NC