



HOUSSES À USAGE UNIQUE


HOUSSES DE PROTECTION
POUR PLANCHES DE TRANSFERT



TRANSFERT COUCHÉ - COUCHÉ

RÉFÉRENCES :

SIIM40100 / SIIM40105 /
SIIM40210 / SIIM40300 /
SIIM4031 / SIIM40R150
SIIM41R150 / SIIM42R150
/ SIIM43R150

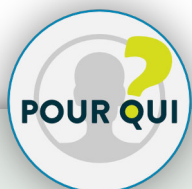

Elles assurent l'hygiène lors
d'un transfert entre deux
plans couchés avec une
planche de transfert.

Elles assurent l'hygiène lors du transfert d'un patient entre deux plans couchés avec une planche de transfert.

Les housses de protection à usage unique s'utilisent en association avec les matelas de transfert de type ROLLBORD® ou TWO-MOVE®.

Particulièrement adaptées pour les services à fort risque infectieux ainsi que les services dans lesquels les protocoles de nettoyage sont contraignants, les housses à usage unique permettent de protéger les matelas de transfert et une élimination rapide de ces derniers après utilisation.

Les différents conditionnements proposés permettent de s'adapter à la fréquence d'utilisation de housses de protection selon les différents services.

Un dérouleur support mural ainsi qu'un dévidoir sur pieds pour rouleau de housses à usage unique sont également disponibles en option.



+ HYGIÈNE

Particulièrement adaptées pour les services à fort risque infectieux ainsi que les services dans lesquels les protocoles de nettoyage sont contraignants.


Bonne résistance à la déchirure.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS



PLANCHES DE TRANSFERT
ROLLBORD® OU TWO-MOVE®

S'adaptent à toutes les dimensions et
versions de planches

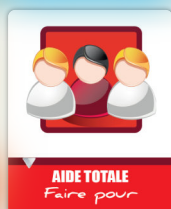



Date de Mise à Jour : 20/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique HOUSSES À USAGE UNIQUE

HOUSSES DE PROTECTION POUR
PLANCHES DE TRANSFERT

INDICATIONS D'UTILISATION

Utilisation pour la protection des matelas de transfert de type ROLLBORD®, TWO-MOVE® ou autres marques. Après utilisation suivre le protocole d'élimination des déchets à risque infectieux (DASRI). Les housses à usage unique ne remplacent en aucun cas la housse d'origine des planches et matelas de transfert. La housse à usage unique doit être enfilée sur l'ensemble : planche/matelas de transfert + housse d'origine prévue par le fabricant du matériel à protéger.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.



CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, la housse ne doit pas rester au sol ou dans le lit.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant le conditionnement choisi de housses à usage unique et/ou un dérouleur ou dévidoir, et la fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Polyéthylène Basse Densité Linéaire (PEBDL). Sans latex.

Couleur : Incolore « cristal ».

Charge maximale admissible :
Non applicable

Poids par housse :
Longueur 105 cm : 32,60 g / Longueur 120 cm : 35 g / Longueur 200 ou 210 cm : 65,20 g

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX
PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

100 % recyclable si non souillée. Usage unique, non stérile.
Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI). Alimentaire conformément au décret n°2007-766 du 10/05/2007 et règlement CE 1935/2004 du 27/10/2004.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIF. UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS
SIIM40100	03760311371233	2 rouleaux de 50 housses (100 housses)	200 x 60 cm
SIIM40105	En cours d'obtention	1 rouleau de 500 housses	105 x 60 cm
SIIM40210	En cours d'obtention	2 rouleaux de 250 housses (500 housses)	210 x 60 cm
SIIM40300	03760311371226	6 rouleaux de 50 housses (300 housses)	200 x 60 cm
SIIM40R150	03760311371172	2 rouleaux de 150 housses (300 housses)	210 x 60 cm
SIIM41R150	03760311371165	1 rouleau de 300 housses (300 housses)	105 x 60 cm
SIIM42R150	En cours d'obtention	2 rouleaux de 150 housses (300 housses)	210 x 80 cm
SIIM43R150	En cours d'obtention	2 rouleaux de 150 housses (300 housses)	120 x 60 cm
SIIM4031	03760311371219	3 rouleaux de 50 housses (150 housses)	105 x 60 cm