



# TRANSALT®

MATELAS DE TRANSFERT



## TRANSFERT COUCHÉ-COUCHÉ

### RÉFÉRENCES :

SI2600  
SI21650N  
SI21700



**Il permet à deux soignants de faciliter le passage du patient allongé entre deux plans couchés.**

**TRANSALT®** est un matelas de transfert qui se compose d'une face glissante côté brancard et d'une face capitonnée côté patient, et de 12 poignées.

Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées. Il est amagnétique et radiotransparent.

Il existe en trois versions : rigide, semi-rigide et souple. Le modèle souple est utilisable dans un matelas coquille, se roule et s'intègre parfaitement dans l'équipement des ambulances de type B.

**TRANSALT®** se place sous le patient et permet un transfert en toute simplicité, soulageant ainsi les soignants d'un effort.



### FACILITÉ D'UTILISATION

Ses poignées résistent à une traction de 600kg.

S'utilise dans les services d'urgence grâce à sa matière **radio-transparente et amagnétique**.




### TEST CLINIQUE

#### LE TRANSALT® ET LA PRÉVENTION D'ESCARRES


Un test clinique a été mené au CHU de Nîmes dans des conditions de brancardage en décubitus dorsal strict, puis avec un dossier incliné à 30°. Dans les deux cas, les résultats démontrent la moindre pression d'interface des vertèbres sacrées avec le matelas souple TRANSALT®, qui réduit donc significativement le risque d'escarres.



GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE

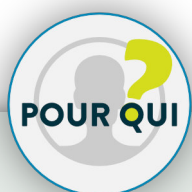

Il s'adresse à des **patients nécessitant d'être transférés d'un plan couché à un autre.**

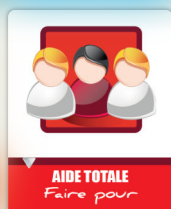



Date de Mise à Jour : 15/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique TRANSALT®

MATELAS DE TRANSFERT **VIDÉO**



## INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, jusque dans les services d'imagerie.

La face adhérente étiquetée **DESSUS** doit être côté patient et la face glissante côté brancard. Possibilité de positionner une alèse entre le brancard et le matelas de transfert TRANSALT® pour éviter un effet « ventouse ».

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALT® ne doit pas rester sur le sol.

Vérifier les coutures avant de tracter sur les poignées.

Ne pas plier le matelas de transfert TRANSALT® SI21600 de plus de 30°.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés** : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé** : Détergent désinfectant surfaces hautes par trempage ou aspersion

Peut être nettoyée au savon et à l'eau tiède. Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

SI21600 : Dessus : Dickson,  
Dessous : Risptop, Intérieur : avec  
plaque et mousse.

SI21650N : Dessus : Dickson,  
Dessous : Risptop, Intérieur :  
GA456, PB et mousse.

SI21700 : Dessus : Bachette M2,  
Dessous : Cordura M1, Intérieur :  
Sans plaque (+sangle roulage)

Couleur : Noir.

**Charge maximale admissible : 130 kg**

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
SI21600	03760311371004	Matelas de transfert TRANSALT® rigide. Non feu	190 x 60 x 5 cm	4 kg
SI21650N	03760311370922	Matelas de transfert TRANSALT® semi-rigide. Non feu	190 x 60 x 5 cm	3 kg
SI21700	03760311370908	Matelas de transfert TRANSALT® souple. Non feu	190 x 60 x 5 cm	4 kg



## CONDITIONNEMENT

1 carton contenant le matelas de transfert TRANSALT® et sa fiche technique.

## COMPOSITION & COULEUR