



PA6FIX®

SANGLES DE MAINTIEN SÉCURISÉ AU FAUTEUIL



PROTECTION ET SÉCURITÉ

RÉFÉRENCES :

CO4001 CO4002 CO4003
CO4004 CO4005 CO4006
CO4010


Elles permettent de sécuriser un patient en posture assise au fauteuil.





La gamme **PA6FIX®** est conçue pour sécuriser les patients au fauteuil. Leur système d'attache par bouclerie permet une installation facile. Tandis que les sangles équipées d'élastiques laissent au patient une liberté de mouvement pour respecter le besoin fondamental de se repositionner au fauteuil.

Les différents modèles s'adaptent à tout type de besoins des patients et offrent un confort de grande qualité grâce au coton d'Égypte.

Sombres, elles permettent une discrétion et peuvent ainsi être portées sur les vêtements tout en préservant la dignité.


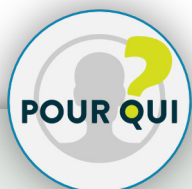


Elle s'adresse à des personnes nécessitant d'être maintenue en posture assise au fauteuil.

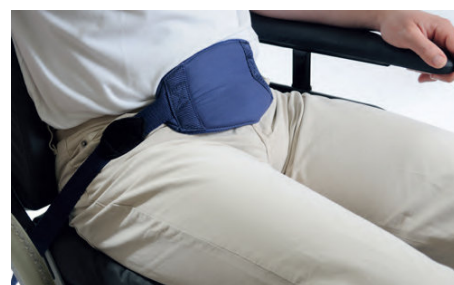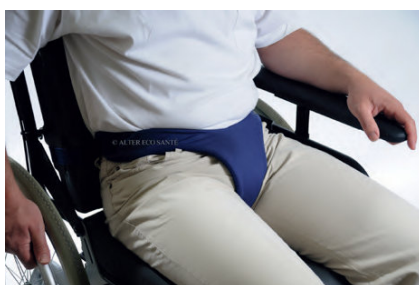

+ ADAPTABILITÉ

7 modèles sont disponibles, en taille unique : maintien, abdominal, thoracique, périnéal, pelvien...

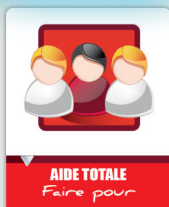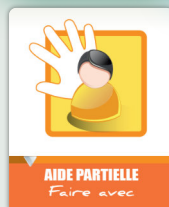

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 21/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe de dispositif : Classe 1



Fiche Technique

PA6FIX®

SANGLES DE MAINTIEN SÉCURISÉ AU FAUTEUIL

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION

Avant utilisation d'un moyen de contention, consultez la recommandation ANSM du 08/03/2011 référence DM-RECO 11/02. Indiqué pour le maintien d'un sujet en posture assise dans un fauteuil et éviter la glisse passive. Indiqué pour des sujets à risque de chute, en régression psychomotrice. Indiqué pour des sujets déments Alzheimer.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Avant chaque utilisation, vérifier l'état des sangles, des coutures et des boucles de fermeture.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Extérieur : 100% coton d'Égypte.
Intérieur : mousse de garnissage PE.
Sangle et bouclerie : 100% nylon.

Couleur : Bleu, gris.

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage en machine à une température maximale de 60°C.

- Séchage en machine à température modérée.

- Repassage à faible température.

- Désinfection par pulvérisation de détergent désinfectant surfaces compatible tissus.

CONDITIONNEMENT

1 sac contenant une sangle de maintien et la fiche technique.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	IDENTIFICATION N° UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
CO4001	03760311370731	Maintien abdominal ABDOFIX®	100 g	Longueur : 186 cm Diamètre max 206 cm
CO4002	03760311370724	Maintien thoracique STABIFIX®	200 g	Diamètre max 185 cm
CO4003	03760311370717	Maintien périnéal PERIFIX®	150 g	Longueur : 150 cm Diamètre min. 63 cm Diamètre max. 105 cm
CO4004	03760311370700	Maintien périnéal avec poignées latérales PERITRANS®	200 g	
CO4005	03760311370694	Maintien pelvien SIMPLIFIX®	200 g	Longueur : 135 cm Diamètre max 187 cm
CO4006	03760311370687	Maintien pelvien DOUBLEFIX®	200 g	Profondeur 150 cm Largeur 137 cm Diamètre max 187 cm
CO4010	03760311370670	Maintien thoracique et pelvien double fixation MULTIFIX®	250 g	Diamètre max. 185 cm / Base du tronc - poitrine : Hauteur min 25 cm Hauteur max 50 cm
CO4000	03760311371271	Rallonge de sangle pour gamme PA6FIX®	100 g	50 cm