



PROGLISS®

DRAP DE REHAUSSEMENT MONOPATIENT



MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCES :

PRO110 : Court
PRO130 : Standard
PRO140 : XL

Il permet à un soignant de mobiliser une personne couchée, en toute sécurité !

PROGLISS® est un drap de rehaussement destiné à une utilisation en collectivité.


Grâce à sa large surface de glisse, il permet de faciliter la mobilisation d'une personne couchée, notamment le rehaussement, en préservant le soignant d'un effort.

Il contribue également à la prévention des escarres en évitant les cisaillements.



+ PRÉVENTION DES TMS


PROGLISS® permet de prévenir les risques de lombalgies en allégeant de 60% l'effort du soignant lors des mobilisations au lit.

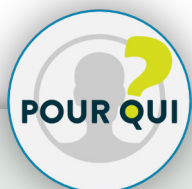

Il s'adresse à des personnes couchées ayant **peu ou pas de capacités pour se rehausser ou se mobiliser au lit.**

❗ ASSOCIATIONS DE PRODUITS


Pour faciliter le rehaussement ou encore entretenir les capacités résiduelles, associez le drap **PROGLISS®** avec d'autres aides techniques !

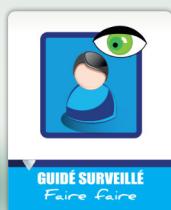

GUIDÉ SURVEILLÉ
Faire faire



AIDE PARTIELLE
Faire avec

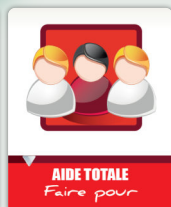


AIDE TOTALE
Faire pour



SANGLE POULIE®

Rehaussement par mouvement de tir à la corde.

Réf : SI21680

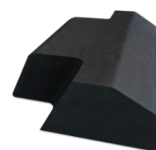

COUSSIN ESCABOLI®

Rehaussement avec capacité au niveau des jambes.

Réf : SI21637

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 29/11/2023

Génération de produit : 1

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : Royaume-Uni / RPC

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique


PROGLISS®

DRAP DE REHAUSSEMENT MONOPATIENT

INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée. Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

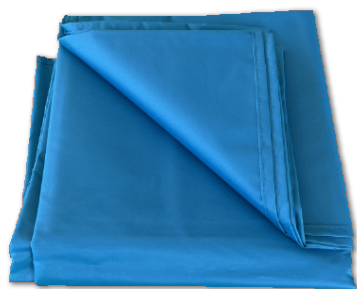

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, le drap PROGLISS® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Ne pas laisser un patient seul sur le drap, barrières de protection du lit baissées.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 drap de rehaussement PROGLISS® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Polyester avec enduction silicone.
Couleur : Bleu sarcelles.

Charge maximale admissible : 300 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes pH compris entre 5 et 9.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : • Lavage à 80° en machine. • Séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). • Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocké dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
PRO110	En cours d'obtention	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® Monopatient Court.	180 g	110 x 70 cm 0,77 cm ²
PRO130	03760311372162	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® Monopatient Standard.	200 g	130 x 90 cm 1,17 cm ²
PRO140	En cours d'obtention	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® Monopatient Bariatrique.	240 g	140 x 120 cm 1,68 cm ²