



GLISSK7 ALPHA® HOUSSK7 ALPHA®

DISPOSITIF D'INSERTION DE CASSETTE RADIO ET HOUSSE DE PROTECTION



IMAGERIE MÉDICALE

RÉFÉRENCES :

GLISSK7 ALPHA :
SIPMF8260
SIPMF 8360

HOUSSK7 ALPHA
SIPMF8261
SIPMF 8361

Il permet une insertion facilitée de la cassette radio sous la patient.


GLISSK7 ALPHA® est un dispositif d'insertion de cassette radio en ambulatoire. Il est radiotransparent et peut se combiner à des housses de protection à usage unique.

Il existe en 2 tailles : standard ou XL.


GLISSK7 ALPHA® s'insère sous le patient et permet ensuite de faire glisser la cassette radio à l'intérieur.

Ce dispositif soulage le soignant d'un effort et améliore le confort du patient durant l'insertion.

La combinaison avec des housses à usage unique **HOUSSK7 ALPHA®** permet de protéger de toute contamination et faciliter l'insertion ainsi que le retrait de la cassette.

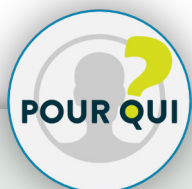


Il s'adresse à des personnes douloureuses nécessitant l'insertion d'une cassette pour une radio en ambulatoire.

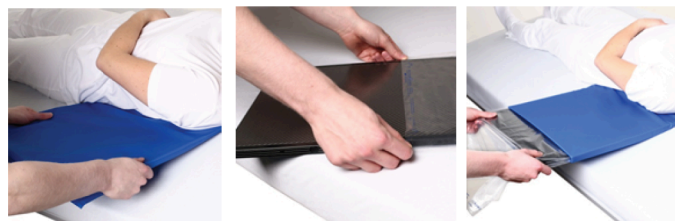

+ PRÉVENTION DES TMS

Prévient les risques de Troubles Musculo Squelettiques du soignant en réduisant le nombre de mobilisations induites.

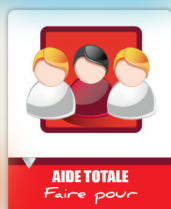

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 19/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Petermann GMBH

Origine : Allemagne

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

GLISSK7 ALPHA®

HOUSK7 ALPHA®

DISPOSITIF D'INSERTION DE CASSETTE RADIO
ET HOUSSE DE PROTECTION

INDICATIONS D'UTILISATION



Indiqué pour la mise en place d'une cassette radio sous un patient intransférable et la réalisation de l'examen radiologique thoracique. Le dispositif GLISSK7 ALPHA® doit être désinfecté avant l'utilisation avec un autre patient. Lorsqu'une housse de protection pour la cassette radio est utilisée, elle doit être retirée après chaque utilisation et jetée.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Ne doit pas rester sous le patient après utilisation.

Ne doit pas rester au sol après utilisation.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sac contenant un GLISSK7 ALPHA® ou un rouleau HOUSK7 ALPHA® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

GLISSK7 ALPHA® :
Polyéthylène et polycarbonate.
HOUSK7 ALPHA® :
Polyéthylène Basse Densité

Couleur :
GLISSK7 ALPHA® : Bleu.
HOUSK7 ALPHA® : Transparent.

Charge maximale admissible : 200kg

GLISSK7 ALPHA :
LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX
PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Essuyage avec un papier non tissé, séchage à l'air libre.

HOUSK7 ALPHA® : Usage unique, non stérile. Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
SIPMF8260	04250355352606	GLISSK7 ALPHA®	41 x 53,5 x 0,7 cm	1,7 kg
SIPMF8360	04250355353603	GLISSK7 ALPHA® XL	47 x 53,5 x 0,7 cm	2 kg
SIPMF8261	04250355382610	HOUSK7 ALPHA® Rouleau de 100 housses	45 x 80 cm 0,05 mm d'épaisseur	4,02 kg
SIPMF8361	04250355383617	HOUSK7 ALPHA® XL Rouleau de 100 housses	51 x 80 cm 0,05 mm d'épaisseur	4,08 kg