



MULTIGLIDE®

DRAP DE REHAUSSEMENT




MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCES :


SIIM108 / SIIM130 / SIIM160
/ SIIM82 : Multipatients

SIIM130DR / SIIM160DR :
Multipatients avec dragonnes


SIIM001201 / SIIM00130
/ SIIM00170 : Monopatient

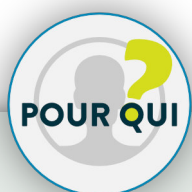


Il s'adresse à des personnes
couchées ayant
peu ou pas de capacités
pour se rehausser ou se
mobiliser au lit.

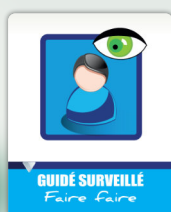

GUIDÉ SURVEILLÉ
Faire faire

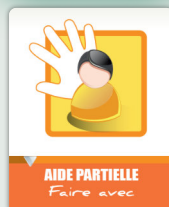

AIDE PARTIELLE
Faire avec

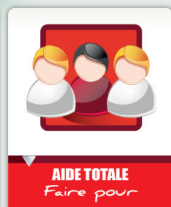

AIDE TOTALE
Faire pour



+ PRÉVENTION DES TMS

MULTIGLIDE® permet de prévenir les risques
de lombalgies en allégeant de 60% l'effort du
soignant lors des mobilisations au lit.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS


Pour faciliter le rehaussement ou encore entretenir les capacités résiduelles,
associez le drap **MULTIGLIDE®** avec d'autres aides techniques !



SANGLE POULIE®

Rehaussement par
mouvement de tir à la corde.

Réf : SI21680

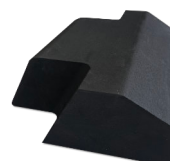

COUSSIN ESCABOLI®

Rehaussement avec capacité
au niveau des jambes.

Réf : SI21637



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 29/11/2023
Génération de produit : 2
Garantie* : 2 ans
Fabricant : Immedia
Origine : Danemark
Classe de dispositif : Classe 1



Fiche Technique MULTIGLIDE®

DRAP DE REHAUSSEMENT



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION



Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée. S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur pour la version Multipatients. Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**



Après utilisation, le drap MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Ne pas laisser un patient seul sur le drap, barrières de protection du lit baissées.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 drap de rehaussement MULTIGLIDE® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.

Couleur : Vert.

Charge maximale admissible : 300 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : • Lavage à 80° en machine.

• Séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage.

• Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). • Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocké dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION - Drap MULTIGLIDE® Collectivité.	POIDS	DIMENSIONS
SIIM108	05708012000319	Multi Patients imperméable.	150 g	108 x 80 cm 0,86 cm ²
SIIM130	05708012000302	Multi Patients imperméable.	200 g	130 x 80 cm 1,04 cm ²
SIIM160	05708012000296	Multi Patients imperméable.	250 g	160 x 80 cm 1,28 cm ²
SIIM82	05708012000289	Multi Patients imperméable.	250 g	200 x 70 cm 1,40 cm ²
SIIM130DR	05708012000272	Multi Patients imperméable avec 2 dragonnes	200 g	130 x 80 cm 1,04 cm ²
SIIM160DR	05708012000265	Multi Patients imperméable avec 2 dragonnes	250 g	160 x 80 cm 1,28 cm ²

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION - Drap MULTIGLIDE® Collectivité.	POIDS	DIMENSIONS
SIIM0077	05708012375080	Mono Patient.	100 g	72 x 70 cm 0,55 cm ²
SIIM00130	05708012000241	Mono Patient.	150 g	130 x 80 cm 1,40 cm ²
SIIM00170	05708012003181	Mono Patient.	250 g	140 x 120 cm 1,68 cm ²