



# DISKEKO®

DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE



## TRANSFERT ASSIS-DEBOUT-ASSIS

### RÉFÉRENCE :

SI21310



Il s'adresse à des personnes n'ayant **plus la capacité de piétinement/pivot.**



Laisser faire



Faire faire



Faire avec

**Il permet de faciliter le pivot d'une personne entre deux assises proches !**

**DISKEKO®** est un disque pivotant rigide de 38 cm de diamètre, équipé d'une poignée pour le transport.

Placé sous les pieds de la personne, il facilite la rotation entre deux assises proches, sollicitant les capacités de la personne et contribuant au maintien de son autonomie.

Ses surfaces externes antidérapantes assurent quant à elles la stabilité lors du transfert et permettent une utilisation sur tous types de sols, y compris en zone humide.



### PRÉVENTION DES TMS

**DISKEKO®**, utilisé avec l'aide d'un tiers, soulage l'aïdant d'un effort, tout en sollicitant les capacités de la personne aidé.

### ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour faciliter les transferts ou encore stabiliser une verticalisation, associez le disque **DISKEKO®** avec d'autres aides techniques !



#### CEINTURE DE TRANSFERT OLIVIA® OU EMMA®

Transfert avec des prises sécuritaires

Ref : SIIM8013013M ou SI21330



#### APPUI TIBIAL MOUSTACHE®

Gestion du centre de gravité

Ref : SI21635



GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 11/12/2023  
Génération de produit : 2  
Garantie\* : 2 ans  
Fabricant : Alter Eco Santé  
Origine : France  
Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique

## DISKEKO®

DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE



### INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans de transfert, d'un sujet présentant une incapacité de piétinement.  
Peut être utilisé pour un transfert assisté si l'usage de ce produit est adapté au patient.  
S'utilise sur tous les types de sols intérieurs et extérieurs.  
En zone humide, vérifier l'adhérence au sol.  
Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

### CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.**  
**Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Ne jamais séparer les deux faces du disque.  
Après utilisation, le disque de transfert DISKEKO® ne doit pas rester sur le sol.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

### CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 disque de transfert pivotant DISKEKO® et sa fiche technique.

### COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

ABS, Acier zingué, polyéthylène.

Couleur : Noir.

Charge maximale admissible : 150 kg

### LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DESINFECTION HOSPITALIERE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés** : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé** : Déturgent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR
SI21310	03760311371028	Disque de transfert pivotant DISKEKO® rigide.	1,3 kg	38 cm	1,1 cm