



MEDITRANS®

PLANCHE DE TRANSFERT



TRANSFERT COUCHÉ-COUCHÉ

RÉFÉRENCE :

SI21300



Elle sert de passerelle pour un transfert entre deux plans couchés.

MEDITRANS® est une planche de transfert rigide, radiotransparente et amagnétique composée de 6 poignées latérales.

Des trous sont prévus à chaque extrémité pour faciliter un stockage en position verticale.

MEDITRANS®, placée entre deux plans couchés, sert de passerelle et permet de transférer un patient par glissement à l'aide d'un drap de translation, préservant ainsi l'aidant d'un effort.

Ses poignées rendent la planche totalement maniable lors de son utilisation et sa surface lisse accentue la glisse facilitant le transfert.

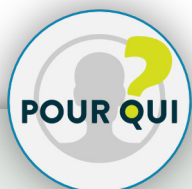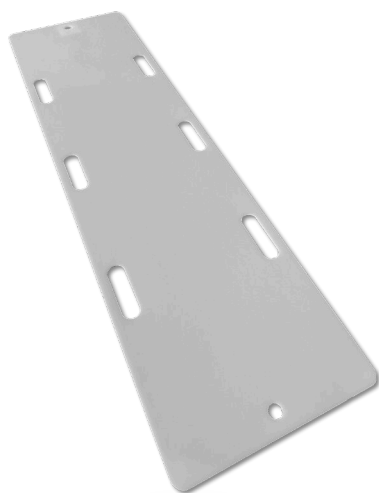

Elle s'adresse à des **patients nécessitant d'être transférés entre deux plans couchés.**



FACILITÉ D'UTILISATION

S'entretient facilement grâce à une surface lisse.

Procure une maniabilité totale grâce à sa légèreté permettant **une utilisation sans contrainte.**



ASSOCIATIONS DE PRODUITS



LOT DE 16 PAS ANTIDÉRAPANTS

Pour assurer une bonne stabilité entre les plans de départs et d'arrivée


Réf : SI21301



TUBE MULTIGLIDE® MOLLETONNÉ

Effet de glisse amplifié

Réf : SIIM70/195

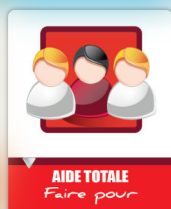

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 13/12/2023

Génération de produit : 1

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe de dispositif : Classe 1




* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique MEDITRANS®

PLANCHE DE TRANSFERT

INDICATIONS D'UTILISATION

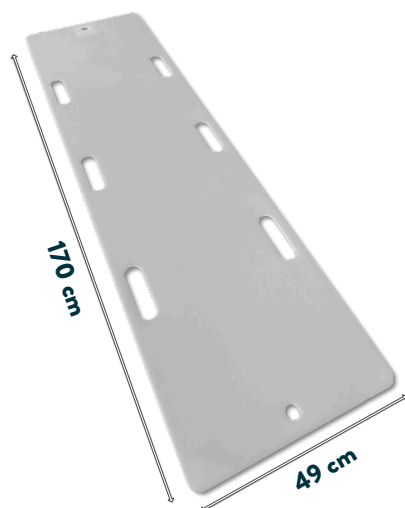

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans horizontaux, d'un sujet présentant une incapacité de bouger.

La planche de transfert MEDITRANS® sert de passerelle sur laquelle le sujet peut être transféré. Contrôlez visuellement le produit avant son usage. Il ne doit pas être fendu ou coupé.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Ne pas utiliser un matériel détérioré. Ne pas laisser au sol après usage.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 planche de transfert MEDITRANS® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Polyéthylène haute densité.

Couleur : Blanc.

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage et désinfection par vaporisation et essuyage d'un détergent désinfectant de surface haute de pH neutre.

Peut être nettoyée au savon et à l'eau tiède.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Charge maximale admissible : 120 kg

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). Ne pas utiliser le produit en dessous de -20°C (risque de casse).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
SI21300	03760311371035	Planche de transfert MEDITRANS®	170 x 49 cm	4,2 kg