



# MULTIGLIDE®

DRAP DE TRANSLATION



## TRANSFERT COUCHÉ-COUCHÉ

### RÉFÉRENCES :

SIIM70/195 ; SIIM60/90 :  
Drap molletonné + housse

SIIM83 ; SIIM200 :  
Drap imperméable



**Il permet à un soignant de mobiliser un patient à l'horizontale en toute sécurité !**

**MULTIGLIDE®** est un drap de translation destiné à une utilisation en collectivité.

Insérés sous le patient en hémicorps, ils facilitent les transferts latéraux entre deux plans de même niveau et sans espacement entre eux, en le faisant glisser dessus.

Souples et pliables au pied du brancard, ils sont fournis avec une housse en tissu imperméable pour les versions molletonnées.



### + PRÉVENTION DES TMS

**MULTIGLIDE®** permet de prévenir les risques de lombalgies en allégeant de 60% l'effort du soignant lors des mobilisations au lit.

### ❗ ASSOCIATIONS DE PRODUITS


Pour faciliter le transfert entre deux plans couchés, associez le drap de translation **MULTIGLIDE®** avec d'autres aides techniques !




### PLANCHE MEDITRANS®

Passerelle rigide entre deux plans couchés.

Réf : SI21300

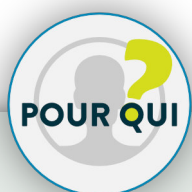

Il s'adresse à des personnes nécessitant  
**d'être mobilisées entre deux plans couchés.**

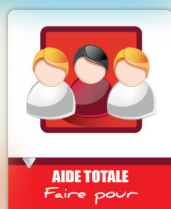

**CE**  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 29/11/2023

Génération de produit : 1

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique MULTIGLIDE®

DRAP DE TRANSLATION

## INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une incapacité de bouger, sur plan horizontal sans écart de niveau ni espace. Les étiquettes doivent toujours être à l'extérieur.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.  
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, le drap MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Ne pas laisser un patient seul sur le drap, barrières de protection du lit baissées.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

## CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 drap de translation MULTIGLIDE® et sa fiche technique.

## COMPOSITION & COULEUR

Drap MULTIGLIDE® :  
Nylon contrelaqué 160° avec enduction polyuréthane.

Drap MULTIGLIDE® molletonné :  
Extérieur 65% Polyester et 35% Coton. Intérieur Nylon. Garniture Polyester.

Couleur : Vert.

**Charge maximale admissible : 200 kg**

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : • Lavage à 80° en machine  
Séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage.

• Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). • Autoclave à 136° (sauf molletonné)  
• Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM60/90	En cours d'obtention	Drap de translation MULTIGLIDE® molletonné avec une housse imperméable de protection.	0,8 kg	60 x 90 cm
SIIM70/195	05708012128785	Drap de translation MULTIGLIDE® molletonné avec une housse imperméable de protection.	1,4 kg	70 x 195 cm
SIIM83	05708012169764	Drap de translation MULTIGLIDE® imperméable.	0,15 kg	72 x 130 cm
SIIM200	05708012254477	Drap de translation MULTIGLIDE® imperméable Utilisable comme housse imperméable de protection pour drap de translation molletonné.	0,25 kg	70 x 200 cm