

## SET DE MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCE :  
SIPM1695



Dessus molletonné : SIPM2098



Alèse glissante : SIPM1584



Tapis antidérapant : SIPM7010

Set de coussins : SIPM8010


**L**e système optimum ALPHA.4WD® est un gage de rapidité, de confort et d'économie de mobilisations, notamment dans les unités de soins aigus ou pour les patients à forte charge pondérale.

Le système optimum ALPHA.4WD® est composé d'un dessus molletonné avec poignées, d'une alèse glissante, d'un tapis antidérapant et d'un set de 3 coussins.

Les surfaces glissantes de l'alèse glissante et du dessus molletonné, lorsqu'elles sont en contact, réduisent les forces de frottement. Le mouvement dans le lit est donc facilité. L'alèse glissante dispose de 2 bandes antidérapantes de chaque côté du lit pour sécuriser la mobilisation. Le tapis antidérapant peut être placé entre l'alèse et le dessus afin de réduire le glissement.

Les cales de lit ont été développées pour le positionnement actif et correctif des patients. Leur polyvalence permet un positionnement ciblé conformément aux mesures de soins prévues.

Cette combinaison crée un système permettant les mouvements dans toutes les directions. Cette solution est recommandée pour les patients à mobilité réduite ■

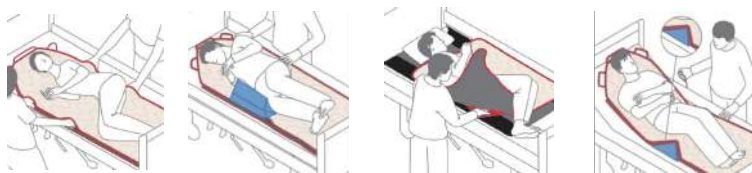

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube


## LES + PRODUIT

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Le dispositif étant en permanence sur le lit et sécurisé grâce aux sangles de fixation incluses sur le dessus molletonné, **il est utilisable rapidement.**

**Assure une sécurité pour le patient et pour l'aidant.**



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE


TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

Réf	Type Produit	Dimensions	Poids	N° Identification UDI
SIPM1695	Dessus Ref SIPM2098	100 x 200 cm	1,65 kg	04250355320988
	Alèse glissante Ref SIPM1584	90 x 200 cm	1,44 kg	04250355315847
	Tapis antidérapant Ref SIPM7010	35 x 25 cm	250 g	En cours d'obtention
	Set de 3 coussins Ref SIPM8010	50 x 22 cm (1qté) 25 x 22 cm (2qtés)	500 g	En cours d'obtention

Dessus molletonné : SIPM2098

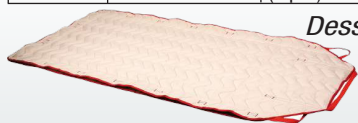

Alèse glissante : SIPM1584



Tapis antidérapant : SIPM7010

Set de 3 coussins : SIPM8010



## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	SYSTÈME OPTIMUM ALPHA.4WD®
DESCRIPTION COURTE :	SET DE MOBILISATION AU LIT (ALÈSE, DESSUS, TAPIS ANTIDÉRAPANT ET SET DE 3 COUSSINS)
RÉFÉRENCES :	SIPM1695
DATE DE MISE À JOUR :	22/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	3,84 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des difficultés pour réaliser un mouvement en position allongée. Recommandé pour les personnes à mobilité réduite ou nulle.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Après utilisation, l'alèse, le dessus, le tapis antidérapant et les coussins du système ALPHA.4WD® ne doivent pas rester sur le sol.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides eau de javel, produits abrasifs, assouplissant. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. <u>Nettoyage de l'alèse et du dessus :</u> - Lavage en machine à une température maximale de 90 °C. - Séchage en machine à faible température (45-50° maximum). - Repassage interdit. - Blanchisserie interdite. <u>Nettoyage du tapis antidérapant et du set de 3 coussins :</u> Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).
COMPOSITION :	Dessus : Coton, épaissement naturel, sans latex. Alèse glissante : Coton, sans latex. Tapis antidérapant : Composé polymère. Set de 3 coussins : Polyuréthane antidérapant.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant un système optimum ALPHA.4WD® et sa fiche technique.
COULEUR :	Dessus et Alèse glissante : Beige. Tapis antidérapant : Rouge. Set de 3 coussins : Bleu.