



CARAVELLE®

PLANCHE DE TRANSFERT



TRANSFERT ASSIS-ASSIS

RÉFÉRENCES :

SI420 : Planche seule

SI421 : Planche + Aile

SI422 : Aile seule


Elle permet au bénéficiaire de passer d'une assise proche à une autre, de manière autonome ou accompagnée !

CARAVELLE® est une planche de transfert qui se compose d'une face glissante, de plots antidérapants, d'une aile de glissement et de poignées ergonomiques.

Placée entre deux plans assis proches, elle permet de faciliter le transfert par glissement.

CARAVELLE® permet de solliciter les capacités de l'utilisateur et de réduire l'effort de l'aidant lorsque le transfert est accompagné.

Son aile de glissement supprime une éventuelle adhérence.

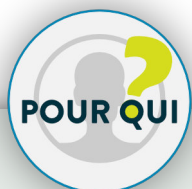

Elle s'adresse à des personnes souhaitant **passer entre deux assises proches et ayant des capacités dans les membres supérieurs et du tonus dans le tronc.**

+ ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

CARAVELLE® s'utilise rapidement et sans contraintes grâce sa forme ergonomique permettant une utilisation dans les deux sens.



ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour sécuriser les transferts ou amplifier l'effet de glisse, associez la planche **CARAVELLE®** avec d'autres aides techniques !



**CEINTURE DE TRANSFERT
OLIVIA® OU EMMA®**

Transfert sécurisé

Réf : SIIM8013013M ou SI21330



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 11/12/2023
Génération de produit : 1
Garantie* : 2 ans
Fabricant : Alter Eco Santé
Origine : France
Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique CARAVELLE®

PLANCHE DE TRANSFERT

VIDÉO



INDICATIONS D'UTILISATION

Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé.

Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés. En zone humide, vérifier l'adhérence. Les bandes antidérapantes doivent être séchées avant d'être utilisées. Avant le transfert, s'assurer que l'aidé n'a pas la peau pincée par la planche.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, la planche CARAVELLE® ne doit pas rester sur le sol.

Ne pas utiliser un produit fendu, coupé ou dépourvu de patins antidérapants. Ne pas exposer de façon durable au rayonnement solaire, risque de brûlure. CARAVELLE® est équipée de pistes antidérapantes pour assurer une stabilité importante de la planche. Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). Ne pas utiliser le produit en dessous de -20°C (risque de casse).



CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 planche de transfert CARAVELLE® (selon référence : avec ou sans son aile de transfert) et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

PEHD.

Couleur : Blanc.

PIÈCES D'USURE

Tampon antidérapant.

Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigé par le concepteur.

Charge maximale admissible : 150 kg

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SI420	03760311370014	Planche de transfert CARAVELLE®	1 kg	71,2 x 18 x 1 cm
SI421	03760311370090	Planche de transfert CARAVELLE® avec aile de transfert	1,3 kg	71,2 x 18 x 1 cm
SI422	03760311370021	Aile de transfert pour planche de transfert CARAVELLE®	200 g	28,5 x 35 cm