



BUTTERFLY®

PLANCHE DE TRANSFERT



TRANSFERT ASSIS-ASSIS

RÉFÉRENCES :

SIIM401 : Planche + aile large

SIIM4001 : Aile large

SIIM4002 : Aile extra large

Elle permet au bénéficiaire de passer d'une assise proche à une autre, de manière autonome ou accompagnée !

BUTTERFLY® est une planche de transfert en fibre de verre qui se compose d'une face glissante, d'une aile de glissement, de plots antidérapants et d'encoches pour le passage de la roue du fauteuil.

Placée entre deux plans assis proches, elle permet de faciliter le transfert par glissement, y compris pour des patients bariatriques.

BUTTERFLY® permet de solliciter les capacités de l'utilisateur et de réduire l'effort de l'aidant lorsque le transfert est accompagné.

Son aile de glissement supprime une éventuelle adhérence, facilitant ainsi la glisse sur peau nue.



VIDÉO



POUR QUI

Elle s'adresse à des personnes souhaitant **passer entre deux assises proches et ayant des capacités dans les membres supérieurs et du tonus dans le tronc.**

+ ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

BUTTERFLY® s'utilise dans tous types d'environnements même humides et son aile permet de réaliser des transferts peau nue.



ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour sécuriser les transferts, associez la planche **BUTTERFLY®** avec d'autres aides techniques !



CEINTURE DE TRANSFERT OLIVIA® OU EMMA®

Transfert sécurisé

OPTIONS DISPONIBLES



Aile large
Réf : SIIM4001

Aile extra large
Réf : SIIM4002



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE

Réf : SIIM8013013M ou SI21330



Date de Mise à Jour : 12/12/2023

Génération de produit : 3

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique BUTTERFLY®

PLANCHE DE TRANSFERT



INDICATIONS D'UTILISATION

Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé. Recommandée pour le ré-apprentissage des transferts, pour des sujets amputés, réputés lourds et en sortie de balnéothérapie. Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés. En zone humide, vérifier l'adhérence. Les bandes antidérapantes doivent être séchées avant d'être utilisées. Avant le transfert, s'assurer que l'aidé n'a pas la peau pincée par la planche.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 planche de transfert BUTTERFLY®, une aile large (réf : SIIM4001) et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Planche : Fibre de verre. Aile :
Tissu MULTIGLIDE®

Couleur : Blanc, vert.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Ne jamais utiliser la planche BUTTERFLY® sans son aile MULTIGLIDE® (risque de casse). Après utilisation, la planche BUTTERFLY® ne doit pas rester sur le sol. Ne pas utiliser un produit fendu, coupé ou dépourvu de patins antidérapants. Ne pas exposer de façon durable au rayonnement solaire, risque de brûlure.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

PIÈCES D'USURE

Aile MULTIGLIDE® (ref :
SIIM4001 - SIIM4002).

**Seules les pièces d'origines
fournies par le fabricant assurent
la conformité du produit, le niveau
de service et la sécurité exigé par
le concepteur.**

Charge maximale admissible : 250 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX
PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Pour l'aile seule : Lavage en machine à 80° et séchage à 65°.

Pour l'aile et la planche : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM401	05708012127252	Planche de transfert BUTTERFLY® avec aile large 35°	1,95 kg	66 x 33 x 1,8 cm
SIIM4001	05708012489190	Aile large 35° pour planche de transfert BUTTERFLY®	/	40 x 35 cm
SIIM4002	05708012489206	Aile extra large 35° pour planche de transfert BUTTERFLY®	/	47,5 x 35 cm