



# MULTIGLIDE®

CARRÉ DE GLISSE  
ASSOCIABLE À UNE PLANCHE DE TRANSFERT



## TRANSFERT ASSIS-ASSIS

### RÉFÉRENCE :

SIIM60


### Il permet d'accentuer l'effet de glisse sur une planche de transfert !



Le carré **MULTIGLIDE®** est un carré de glisse de 60 cm de côté, traité face externe pour adhérer au patient et face interne pour glisser.

Placé sur une planche de transfert, il permet de faciliter le transfert d'un patient à forte charge pondérale, à faibles capacités ou encore le transfert d'une personne nue.

Il contribue également à la prévention des escarres en évitant les cisaillements.

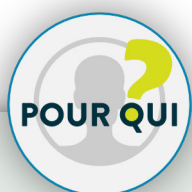

Il s'adresse à des personnes souhaitant **passer entre deux assises proches et ayant des capacités dans les membres supérieurs et du tonus dans le tronc.**

### + PRÉVENTION DES TMS

**MULTIGLIDE®** permet de prévenir les risques de lombalgies en allégeant de 60% l'effort du soignant lors des mobilisations.

### i ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour faciliter les transferts assis-assis, utilisez le carré **MULTIGLIDE®** avec des planches de transfert !




**SPLIT®**

Réf :  
**SIIM403**



**BANANA®**

Réf :  
**SIECA622000**

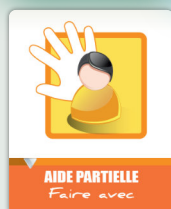

**CE**  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 29/11/2023

Génération de produit : 2

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique MULTIGLIDE®

CARRÉ DE GLISSE ASSOCIABLE À UNE PLANCHE DE TRANSFERT

## INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne pour faciliter un transfert assis-assis avec une planche de transfert.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, le carré MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.

Ne pas laisser un patient seul sur le carré MULTIGLIDE®.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

## CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 carré de glisse MULTIGLIDE® et sa fiche technique.

## COMPOSITION & COULEUR

Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.

Couleur : Vert.

**Charge maximale admissible : 300 kg**

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

- Lavage à 80° en machine.
- Séchage à 60° maximum.
- Lavage à la main, trempage et essuyage.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
- Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM60	05708012499205	Carré de glisse MULTIGLIDE®	100 g	60 x 60 cm