



# EASY-TURN®

COUSSIN PIVOTANT



## POSITIONNEMENT ASSIS - TRANSFERT VOITURE

### RÉFÉRENCES :

SI99403 : Taille M

SI99453 : Taille L

SI99503 : Taille XL

### Il facilite le pivot sur une assise !

**EASY-TURN®** est un coussin pivotant souple, léger et antidérapant.

Positionné sur une assise, son côté antidérapant permet de maintenir la stabilité lors du pivot, et son rembourrage procure un confort optimal à l'utilisateur.



VIDÉO



### + ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

**EASY-TURN®** s'adapte à toutes les formes de siège grâce à sa souplesse.

Il facilite le pivot lors de l'entrée et la sortie de voiture permettant de maintenir l'autonomie de conduite de l'utilisateur.

POUR QUI

Il s'adresse à des personnes souhaitant **effectuer un pivot sur une assise et ayant des capacités dans les membres supérieurs.**

### ASSOCIATIONS DE PRODUITS


Pour faciliter et stabiliser les transferts en entrée et sortie de voiture, associez le coussin **EASY-TURN®** avec d'autres aides techniques !



**BARRE D'APPUI GET-IN®**

Appui stable lors du pivot en voiture

Réf : SUN27272

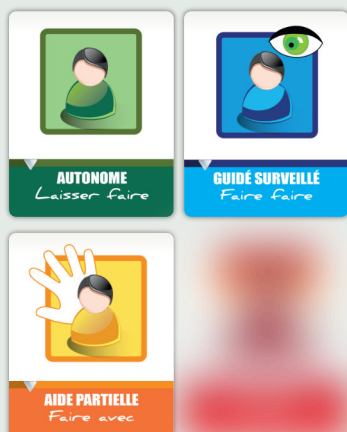

CE  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 05/12/2023

Génération de produit : 3

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique EASY-TURN®

COUSSIN PIVOTANT



## INDICATIONS D'UTILISATION



Manutention manuelle par un sujet pour entrer et sortir sans effort d'un véhicule ou s'asseoir sur une chaise. Recommandé pour :

- Les lombalgies, coxarthroses et prothèses de hanche, hémiplegies.
- Les véhicules ambulances VSL.
- Les professionnels de la route.
- Les agriculteurs.
- Aide à l'aidant.
- La protection de la charnière sacro-lombaire.

La côté antidérapant doit toujours être placé contre le siège.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.  
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Ne jamais séparer les deux faces du disque.  
Ne jamais utiliser EASY-TURN® au sol.

## CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 coussin pivotant EASY-TURN® et sa fiche technique.

## COMPOSITION & COULEUR

Nylon, polyéthylène, polyester.

Couleur : Gris.

**Charge maximale admissible : 150 kg**

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

Les surfaces extérieures peuvent être brossées ou essuyées.

Lavage à 60° en machine. Séchage à plat.

Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

Stocké dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIAMÈTRE
SI99403	05708012329588	Coussin pivotant EASY-TURN® compatible siège de voiture. Taille M.	250 g	40 cm
SI99453	05708012302642	Coussin pivotant EASY-TURN® compatible siège de voiture. Taille L.	300 g	45 cm
SI99503	05708012348947	Coussin pivotant EASY-TURN® compatible siège de voiture. Taille XL.	350 g	50 cm