



# CANOLI®

BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT



## TRANSFERT COUCHÉ-ASSIS

### RÉFÉRENCES :

DEBARLI-- / DEBARCOUL-- /  
DEHAUBAR-- / DECLIBAR-- /  
DEBARLIDOU / DEBARCLIDOU /  
DEBARSAC


**Elle permet de passer de la position couchée à assise au bord du lit en toute autonomie !**

**CANOLI®** est une barre latérale de redressement s'intégrant parfaitement dans le quotidien des utilisateurs.

En effet, toujours en place au lit, elle leur permet de solliciter et réactiver leurs capacités pour se mettre en position assise au bord du lit tout en respectant le mouvement naturel (schéma moteur naturel).

Ses différentes versions lui permettent de s'adapter à tous les matelas et lits y compris médicalisés (compatible avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste).

CANOLI® existe en blanc, fuchsia et bleu.

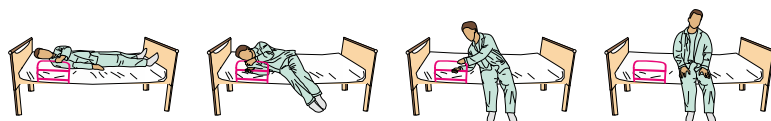

### + ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

**CANOLI®** assure un redressement en toute sécurité grâce à une stabilité totale, préservant ainsi l'autonomie.

Prévient l'incontinence par défaut en favorisant l'indépendance lors du passage en position assise au bord du lit.

### i ÉTUDE CLINIQUE COMPARATIVE

(...) une étude comparant l'efficacité de la potence d'aide malade et la barre latérale de redressement Alter Eco Santé, a été menée auprès d'une population de personnes âgées hospitalisées en service de réadaptation au CHU de Nîmes. (...) 76.5% des patients ont réussi à s'asseoir au moins d'un côté du lit en utilisant la barre latérale de redressement, contre 21.5% avec la potence aide-malade. (...) L'utilisation de la barre latérale de redressement a montré une amélioration de la qualité des schémas moteurs, la position excentrée de la préhension de l'aide technique favorisant le mouvement naturel de redressement rotation du tronc.



Notice de montage

Les kits d'attaches sont des pièces d'usure, disponibles en pièces détachées

Pour les lits médicalisés ou à lattes apparentes (CANOLI® ref 90)

Réf : ZSANVELNC

Pour les lits avec sommier tapissier (CANOLI® ref 140)

Réf : ZDEBARKIT140NC



GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE

### POUR QUI

Elle s'adresse à des personnes nécessitant **un appui lors du redressement au lit, ayant des capacités dans les membres supérieurs et une tenue du tronc.**



**AUTONOME**  
Laisser faire



**GUIDÉ SURVEILLÉ**  
Faire faire



**AIDE PARTIELLE**  
Faire avec



Date de Mise à Jour : 29/11/2023  
Génération de produit : 4  
Garantie\* : 2 ans  
Fabricant : Alter Eco Santé  
Origine : France (Occitanie)  
Classe de dispositif : Classe 1



# Fiche Technique

## CANOLI®

BARRE LATÉRALE  
DE REDRESSEMENT



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

## HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

### LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Sangles auto-agrippantes « velours » lavables à 30° ; Sangles tissu lavables à 60°, séchage à 60°.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

## CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 barre latérale de redressement CANOLI®, son kit de fixation, sa fiche technique et sa notice de montage.

## COMPOSITION

Acier, nylon. Sangles et adhésifs de la marque VELCRO®.

## PIÈCES D'USURE

Kit de fixation Sangles VELCRO et accroches pour ref 90 : ZSANVELNC  
Kit de fixation Sangles pour ref 140 : ZDEBARKIT140NC.

Charge maximale admissible : 150 kg



Notice de montage

## INDICATIONS D'UTILISATION

Utilisation par un sujet, pour le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, sans l'aide physique d'une tierce personne. L'utilisateur peut être guidé par une tierce personne. Indiquée pour les sujets atteints de régression psychomotrice, hémiplegiques ou atteints de paralysie. La barre doit être solidaire du relèvement buste s'il existe. La barre doit être positionnée sur le tiers supérieur du lit. L'installation des barres de lit s'effectue lorsque le lit est inoccupé. Le kit sangles Velcro doit être changé systématiquement lors du changement d'affectation de la barre de lit.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

## CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit pour éviter tout risque d'étranglement. Le contrôle de la bonne fixation de la CANOLI au lit doit être effectué à chaque fois que le lit est refait, ou à défaut au moins 1x/semaine, par le personnel soignant. En cas de constatation de détérioration du kit de fixation, cesser immédiatement l'utilisation de la CANOLI et procéder au remplacement du kit de fixation. **L'utilisation d'un kit de fixation défectueux ou non conforme peut avoir des conséquences irréversibles. Seules les sangles de fixation fournies par Alter Eco Santé sont conformes. Le montage du kit de fixation doit être réalisé conformément aux instructions fournies par Alter Eco Santé. Le montage ne doit pas être réalisé sur un lit ne permettant pas d'appliquer strictement les instructions de montage. Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION - Barre latérale de redressement CANOLI® - Système sécurisé	Type de lit	POIDS	DIMENSIONS	C O U - LEUR
DEBARLI90	03760311370069	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm	Blanc
DEBARLI140	03760311370076		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.			
DEBARLI200	03760311370458		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.			
DEBARCOUL90	03760311370472	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm	Fuchsia
DEBARCOUL140	03760311370519		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.			
DEBARCOUL200	03760311370496		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.			
DEBARCOUL90.02	03760311370465	Barre standard.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm	Bleu
DEBARCOUL140.02	03760311370502		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.			
DEBARCOUL200.02	03760311370489		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.			
DEHAUBAR90	03760311370342	Barre haute pour lit avec surmatelas.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	68 x 42 x 42 cm	Blanc
DEHAUBAR140	03760311370366		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.			
DEHAUBAR200	03760311370359		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.			
DECLIBAR90	03760311370373	Barre escamotable.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,35 kg	68 x 42 x 32 cm	Blanc
DECLIBAR140	03760311370397		Lit à sommier tapissier largeur 140 cm maxi.			
DECLIBAR200	03760311370380		Lit à sommier tapissier largeur 200 cm maxi.			
DEBARLIDOU	03760311370441	Barre double réglable en largeur.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	93 à 123 x 42 x 32 cm	Blanc
DEBARCLIDOU	03760311370540	Barre double et escamotable.	Lit médicalisé ou à lattes.	2,55 kg	92 x 42 x 32 cm	Blanc
DEBARSAC	03760311370434	Vide poche adaptable sur CANOLI® composé de deux poches. En coton d'Égypte, lavable à 60°C.			18,5 x 25 cm	Rouge