

MISE EN PLACE DU FILTRE

**PURGER
LE FLEXIBLE
DE DOUCHE**

Ne jamais poser
la douchette en
dehors de son
support.

Éviter de poser la
main sur la jupe
de protection du
filtre.

Ne pas nettoyer
le filtre.

Ne pas ôter le filtre
avant la période
des 62 jours.

Changer impérativement
le filtre au 62^{ème} jour
d'utilisation.



1



Indiquer les dates de début et de fin
d'utilisation du filtre sur l'étiquette
repositionnable et la coller sur le cahier
de traçabilité.

2



Ouvrir le sachet stérile.

3



Adapter le filtre sur le flexible.

4




Placer le filtre sur le support de
douche, éliminer le sachet.

5



Indiquer à nouveau les dates de
début et de fin d'utilisation sur
l'étiquette du filtre.

6

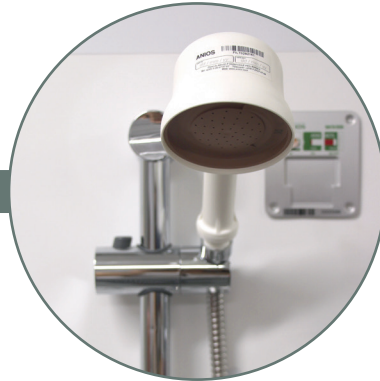

Le filtre ainsi installé peut être
utilisé pendant 62 jours.



À la première utilisation, maintenir le filtre, tête de la douche en haut (cf photo) et ouvrir le robinet afin de chasser toutes les bulles d'air présentes.