



CORBEN

Kit de réparation

Immobilisation

« Kit de réparation conçu pour toute réparation de notre gamme de matériels à dépression, en polyuréthane transparent et autocollant »
La solution SAV optimale pour des réparations rapides et sécurisées.

Procédure :

1. Pour de meilleurs résultats, à appliquer sur une surface propre et sèche. La température de la matière polyuréthane à réparer ne doit pas être inférieure à 10 °C.
2. **NETTOYER** la surface à réparer avec les lingettes d'alcool fournies, ou un mélange 50/50 d'alcool (isopropyle) et d'eau.
3. **Avant de commencer, bien s'assurer que la surface est sèche.**
4. **DECOUPE** : couper l'autocollant avec des ciseaux de sorte qu'il dépasse d'environ 2.5 cm des bords du trou ou de la déchirure. En cas d'utilisation de plusieurs autocollants, ils doivent se chevaucher d'environ 2.5 cm. Arrodir au ciseau les 4 coins de l'autocollant.
5. **RETRAIT DU PAPIER** : Retirer délicatement 1 cm de papier tout en tirant sur les bords de l'autocollant. Cela facilitera la séparation ultérieure ; notamment lorsque les autocollants sont découpés en petites dimensions.
6. **COLLER** : Positionner l'autocollant pour qu'il puisse recouvrir au-delà des bords du trou (ou de la déchirure) sur 2.5 cm environ. Finir de retirer lentement le papier de l'autocollant tout en l'appliquant délicatement sur la matière. Faire attention aux bulles d'air. Pour finir, frotter vigoureusement tous les bords et l'ensemble de l'autocollant.

TROU OU DECHIRURE



NETTOYAGE AVEC LINGETTE D'ALCOOL



DECOUPER L'AUTOCOLLANT A LA DIMENSION SOUHAITEE



PLACER L'AUTOCOLLANT ET RETIRER LE PAPIER



FROTTER VIGOUREUSEMENT L'AUTOCOLLANT



REPARATION TERMINEE



Caractéristiques :

- Mise en place simple et rapide.
- Fabriqué 100% en polyuréthane, transparent et autocollant (pas besoin colle additionnelle)
- Composition :
 - 1 grand patch : 15cm x 8cm
 - 2 moyens patches : 3.5cm x 3.5cm
 - 2 petits patches : 2.2cm x 2.2cm

Référence : IM03.03.100

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

CORBEN
59 rue Stendhal
76620 Le Havre
Tel +33 235 300 185
Fax +33 235 300 186
corben@corben.fr
www.corben.fr

