

Brancard catastrophe empilable *(avec ou sans tête)*

Mode d'emploi

Descriptif :

Constitués d'une structure en aluminium de haute qualité. La toile est enduite et vernie afin de la rendre indéchirable et imperméable à la pénétration des fluides et qui facilite également son entretien et son nettoyage.

Des sangles permettent d'ajuster la tension de la toile sur la civière.

La civière est équipée de 4 pieds et 8 ouvertures dans la toile permettant une prise en main facile. Les civières s'empilent les unes sur les autres afin de pouvoir stocker un maximum dans un minimum d'espace. Elles peuvent également s'adapter sur les supports pliants.

Selon la pathologie de la victime, il est possible d'ajuster le dossier sur la civière avec tête (4 positions allant de 0 à 90 °).

Utilisation :


Le brancard catastrophe permet le transport en position allongée de patients ayant des pathologies compatibles avec leur transport, invalides temporairement. La civière ne doit pas être utilisée à l'intérieur d'un véhicule de secours avec le patient allongé dessus.

Les opérateurs, en plus des compétences techniques nécessaires, doivent avoir eu une expérience spécifique dans le domaine de l'assistance et du brancardage. Ils doivent également avoir les conditions physiques et musculaires garantissant au patient un maximum de sécurité. Le brancardage nécessite la présence au minimum de 2 opérateurs qualifiés et une tierce personne est recommandée lors de passages difficiles. Dans tous les cas, au moins 1 opérateur qualifié ne doit jamais abandonner le patient pendant tout le temps que celui-ci reste sur le brancard.

Nous déclinons toute responsabilité dans tous les cas d'utilisation et de fonctionnement du produit dans des conditions considérées comme impropres, détaillées comme suit :

- Son déplacement avec un patient, effectué par des personnes non qualifiées
- Le transport de patient ayant des pathologies définies non compatibles par le personnel qualifié
- Le non-respect des normes / procédures en vigueur en matière de brancardage
- Le transport de patient de plus de 160 kg
- Le fait de mettre une charge sur un seul des côtés de la civière
- Le non-respect des instructions de cette notice
- L'application de dispositif pouvant interférer avec le bon fonctionnement du brancard
- Les modification ou altérations non autorisées par le fabricant.

Empilage des civières :

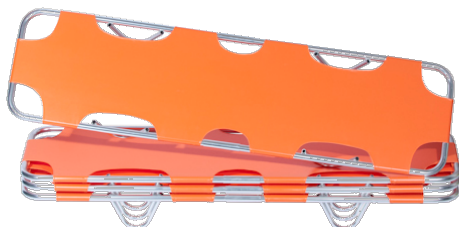

Positionner la civière au-dessus de l'autre en mettant les 4 pieds au-dessus des ouvertures de la toile et empiler la civière comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

N.B. : Les civières sont manipulables par chariot élévateur

Nettoyage et Entretien / Désinfection :

Entretien : Utiliser simplement de l'eau savonneuse pour le nettoyage ou lingette désinfectante, rincer et bien essuyer

Les parties en métal se nettoient simplement avec de l'eau et du savon neutre normal ou si nécessaire un désinfectant adapté. Rincer et essuyer.

L'utilisation et l'entretien non appropriés peuvent provoquer des dommages aux personnes ou aux matériaux. Effectuer l'entretien périodique selon les instructions suivantes :

Type d'intervention	Fréquence (Inter / Mois)		
	Jusqu'à 20	Jusqu'à 50	Jusqu'à 100
Inspection générale et contrôle de fonctionnement des différents éléments	6 mois	3 mois	1 mois
Contrôle de la tension de la toile	6 mois	3 mois	1 mois
Nettoyage	Dépend de la pathologie des patients		

Garantie :

La garantie contre les vices et défauts cachés de fabrication est de 12 mois. Sont exclus de la garantie les matériaux et les composants sujets à une usure normale, et ceux dont il n'est pas possible de déterminer la durée de vie. La garantie ne s'applique pas pour les parties dont la rupture ou l'usure précoce sont dues à :

- Non-respect des instructions contenues dans ce livret
- Absence d'entretien ou entretien incorrect
- Utilisation d'équipements non adaptés pour l'entretien ordinaire
- Altération ou modifications effectuées ou sous traitées sans accord préalable
- Emploi de pièces non originales

Le contenu de ce mode d'emploi est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute utilisation, même sous forme d'extraits, ne peut se faire qu'avec l'accord écrit.
Sous réserve de modifications techniques.



CORBEN – 59, rue Stendhal - 76620 Le Havre - France
Tel. +33(0)2 35 300 185 – Fax. +33(0)2 35 300 186
Email : corben@corben.fr - Website: www.corben.fr

Édition 01/2018