

Portoir souple. CORBEN®

Mode d'emploi

Descriptif :

Le portoir souple Corben est un dispositif médical indiqué pour le transport de patients dans les cas de premiers secours et d'urgence. Entièrement réalisé en nylon enduit, il est léger, extrêmement résistant et anti-feu. Imperméable aux moisissures et bactéries, il n'absorbe aucun liquide et est très facile à nettoyer. Ses 6 ou 8 poignées de portage assure un transport sécurisé du patient et une prise en main facile.

Usage prévu et impropre:

L'utilisation de ce portoir à usage professionnel est strictement limité au cadre sanitaire ou privé, afin de permettre le transport à la main, en position étendue, de patients atteints d'une pathologie compatible, handicapés de façon temporaire ou permanente.

En aucun cas, le fabricant ne sera tenu pour responsable en cas d'utilisation du produit dans les conditions inappropriées, indiquées ci-après :

- Le déplacement effectué par une personne non qualifiée
- Le transport de patients atteints de pathologies définies incompatibles par le personnel médical
- La non-observation par les opérateurs des dispositions de lois et procédures en vigueur en matière de sécurité
- Le transport de patient de plus de 170 kg
- La non-observation des indications contenues dans cette notice.

Mode d'emploi :

Le portoir est destiné à une utilisation professionnelle. Il est donc recommandé d'employer des opérateurs qualifiés, ayant acquis une expérience spécifique dans le domaine de l'assistance médicale. Par ailleurs, ils doivent être dans des conditions physiques adaptées, c'est-à-dire posséder une force et une coordination musculaires aptes à garantir la plus grande sécurité du patient.

Pour assurer les meilleures conditions de sécurité et l'efficacité du service, le portoir demande l'emploi d'au moins deux opérateurs formés et qualifiés. En cas de parcours particulièrement difficiles, comme par exemple dans les escaliers, sur des surfaces inclinées ou pour des patients de fort poids, il est conseillé d'avoir l'aide de deux personnes supplémentaires. Dans toute situation, le contrôle et la coordination des mouvements reviennent à un opérateur qualifié, tandis que les autres opérateurs doivent contribuer aux mouvements en suivant les indications de l'opérateur responsable.

NB :

- Au cas où il y a suspicion de traumatisme à la colonne vertébrale du patient, il est recommandé d'installer immédiatement le patient sur un équipement adapté.
- Pour le relevage et le déplacement du patient sur le portoir, se tenir aux techniques médicales d'urgence approuvées
- Pendant le transport, tous les opérateurs doivent être tournés vers le patient
- Laver et désinfecter le portoir après chaque intervention.

Nettoyage et Entretien / Désinfection :

Entretien : Utiliser simplement une éponge (ou équivalent) avec de l'eau savonneuse ou un détergent non abrasif pour le nettoyage. Rinçage à l'eau claire avec une éponge (ou équivalent) avant un séchage complet à plat.

Possibilité de réutilisation :

Le produit peut être réutilisé si le fonctionnement est assuré et que la matière n'est pas endommagée. Avant une nouvelle utilisation, l'utilisateur doit vérifier l'état extérieur du produit. On ne doit réutiliser que des produits en parfait état technique et hygiénique.

Le contenu de ce mode d'emploi est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute utilisation, même sous forme d'extraits, ne peut se faire qu'avec l'accord écrit. Sous réserve de modifications techniques.