

Lit Pliant

Mode d'emploi

Descriptif :

Constitué d'une structure en aluminium, de section carrée 3 x 3 cm, la toile Cordura du lit est enduite afin de la rendre indéchirable et imperméable à la pénétration des fluides. Cela facilite également son entretien et son nettoyage. Le lit est équipé de 3 blocs pieds en croisillons terminées par des patins de protection, 6 en tout. Il se plie entièrement, après avoir retiré les deux barres à l'extrémité, pour permettre un stockage avec un minimum d'encombrement. Il est rangé dans un sac de transport zippé, avec poignée de portage mains.

Utilisation :

Le lit d'hébergement d'urgence permet, sur une courte durée, à une personne valide de s'allonger pour dormir ou pour recevoir des soins légers. Il est livré dans un sac de transport, en trois morceaux : les deux barres des extrémités et le lit en lui-même intégrant les 3 blocs pieds en croisillons. Une fois le lit déplié, puis les deux blocs pieds croisillons aux extrémités, il conviendra d'emboîter les barres l'une après l'autre. Deux personnes sont nécessaires pour la mise en place du lit, notamment pour l'emboîtement des barres aux extrémités. C'est leur positionnement qui solidarise le lit et le rend fonctionnel.

Nous déclinons toute responsabilité dans tous les cas d'utilisation et de fonctionnement du produit dans des conditions considérées comme impropres, détaillées comme suit :

- Son déploiement par une (ou des) personne (s) n'ayant pas lu ce mode d'emploi au préalable.
- L'utilisation pour un transport ou un transfert d'une personne.
- L'utilisation par une personne de plus de 200 kg.
- Le fait de mettre une charge sur un seul des côtés du lit. Un patient peut s'asseoir au milieu du lit, ou davantage d'un côté ou de l'autre mais impérativement sur la toile.
- Le non-respect des instructions de cette notice.
- L'application de dispositif pouvant interférer avec le bon fonctionnement du lit.
- Les modifications ou altérations non autorisées par le fabricant.

Le contenu de ce mode d'emploi est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute utilisation, même sous forme d'extraits, ne peut se faire qu'avec l'accord écrit. Sous réserve de modifications techniques.



Nettoyage et Entretien / Désinfection :

Entretien : Utiliser simplement de l'eau savonneuse pour le nettoyage ou lingette désinfectante, rincer et bien essuyer.

Les parties en métal se nettoient simplement avec de l'eau et du savon neutre ou si nécessaire un désinfectant adapté. Rincer et essuyer.

L'utilisation et l'entretien non appropriés peuvent provoquer des dommages aux personnes ou aux matériaux. Un simple examen visuel permet de voir si le lit requiert un entretien spécifique.

Effectuer l'entretien périodique selon les instructions suivantes :

Type d'intervention	Fréquence (Inter / Mois)		
	Jusqu'à 10	Jusqu'à 20	Jusqu'à 30
Inspection générale et contrôle de fonctionnement des différents éléments	6 mois	3 mois	1 mois
Contrôle de la tension de la toile	6 mois	3 mois	1 mois
Nettoyage	Dépend de la pathologie des patients		

Garantie :

La garantie contre les vices et défauts cachés de fabrication est de 12 mois. Sont exclus de la garantie les matériaux et les composants sujets à une usure normale, et ceux dont il n'est pas possible de déterminer la durée de vie.

La garantie ne s'applique pas pour les parties dont la rupture ou l'usure précoce sont dues à :

- Non-respect des instructions contenues dans ce livret
- Absence d'entretien ou entretien incorrect
- Utilisation d'équipements non adaptés pour l'entretien ordinaire
- Altération ou modifications effectuées ou sous traitées sans accord préalable
- Emploi de pièces non originales

Spécifications techniques :

- Lit Ouvert : L 194 x l 66 x H41 cm.
- Lit Plié : L 90 x l 20 x H 12 cm.
- Poids : 6 kg.
- Structure aluminium carrée 3 x 3 cm.
- Toile Cordura 600D enduite.
- Charge admissible : 200 kg.

Le contenu de ce mode d'emploi est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute utilisation, même sous forme d'extraits, ne peut se faire qu'avec l'accord écrit.
Sous réserve de modifications techniques.



CORBEN – 59 rue Stendhal - 76620 Le Havre - France
Tel. +33(0)2 35 300 185 – Fax. +33(0)2 35 300 186
Email: corben@corben.fr - Website: www.corben.fr

Édition 12/2019