

Change anatomique



- Réponse optimale à tous les degrés d'incontinence
- Se positionne sur des personnes valides ou totalement dépendantes
- Se place avec un slip de maintien ou les sous-vêtements des résidents
- Permet de conserver la dignité de la personne
- Peut se positionner devant derrière pour les personnes à forte corpulence ou pour les hommes.


Techniques de pose

Ne Pas secouer la protection


- Plier le change en deux dans le sens de la longueur forme gouttière



- Equilibrer la protection devant derrière selon la morphologie pour les hommes

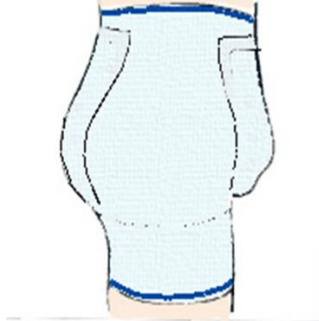

- Positionner la protection 1/3 devant et 2/3 derrière pour les femmes

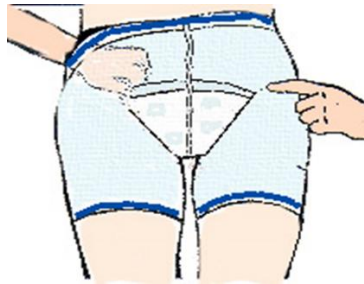

- Remonter le slip de maintien