

Protections adhésives :



- Solution pour incontinence minime à modérée
- Permet de conserver les sous-vêtements des résidents
- La partie « adhésive » permet une fixation optimale dans les sous-vêtements ou slip de maintien
- Evite le gaspillage si les résidents changent de protections régulièrement
- Elles s'adaptent aussi bien à la morphologie d'un homme que d'une femme

Techniques de pose

- Plier la protection en deux dans le sens de la longueur forme gouttière
- Oter la bande adhésive pour une meilleure fixation