

# TENA Slip ProSkin

Change complet **respirant**

INCONTINENCE  
MODÉRÉE  
À SÉVÈRE

INCONTINENCE  
FÉCALE



## TECHNIQUES DE POSE



- Ouvrir et déplier la protection sans la secouer.
- Former le « godet » ou « gouttière » en pliant la protection en deux dans le sens de la longueur.
- Ne pas s'essuyer la main avec le surplus éventuel de crèmes de soins sur le matelas de la protection.

**Une bonne pose évite les irritations cutanées et les fuites.**

- 1 Glisser la protection, ainsi pliée, entre les jambes de l'avant vers l'arrière. S'assurer que les élastiques soient bien positionnés au creux des plis inguinaux.
- 2 Répartir la protection 50% devant et 50% derrière. Centrer la protection : témoin de saturation aligné sur le sillon interfessier ou en prolongement de la colonne vertébrale. Lisser le voile de la protection. Fixer d'abord les 2 attaches adhésives du bas en les inclinant vers le haut. Fixer ensuite les 2 adhésifs du haut en les inclinant vers le bas.
- 3 Lisser les attaches adhésives en exerçant une légère pression sur la totalité de leur surface pour garantir une fixation optimale. Les attaches adhésives sont repositionnables pour garantir les réajustements et l'ouverture aux soins.

Patient  
debout



Positionner  
le patient en  
décubitus latéral



Positionner  
le patient en  
décubitus dorsal

Patient  
couché



## ADAPTER LA TAILLE

### Tableau d'équivalences

Taille vêtement	Tour de taille
XXS	>> <50
XS <33	>> de 49 à 74 cm
S 34	>> de 56 à 85 cm
M 36 au 42-44	>> de 73 à 122 cm
L 44/46-50	>> de 92 à 144 cm
XL 50-56	>> de 140 à 165 cm
XXL 58-70	>> de 163 à 178 cm
3XL >70	>> de 175 à 244 cm



### L'astuce TENA

Si les attaches arrivent sur la couleur c'est que c'est trop grand

### Taille adaptée



### Taille trop grande



### Carte d'identité du produit

Visible à l'extérieur du change :

Nom du produit

Taille

Couleur et code d'absorption

PLUS EN VIDÉO >>





# NOS RECOMMANDATIONS

## Témoin de saturation

Le témoin de couleur jaune, à sec, se colore en bleu au contact des urines.



## Pour la nuit

**AU COUCHER**  
19H00 au plus tôt

➤ Pose du change d'absorption Maxi



**EN FIN DE NUIT**  
**VERIFICATION OU**  
**CHANGE NECESSAIRE**

Privilégier la coordination d'équipes jour/nuit en fonction des besoins et des habitudes de vie des résidents/patients.

➤ change si selles ou saturation



⚠ NE JAMAIS UTILISER UN SECOND MAXI

## En cas d'incontinence fécale

En cas d'incontinence fécale ou en période de gastro-entérite, il est conseillé d'utiliser les protections moins absorbantes.



Les selles ne sont jamais absorbées par un change mais sont contenues.

**En présence de selles :**

- Prodiger les soins d'hygiène nécessaires
- Changer la protection fréquemment



## PROTOCOLE DE SOINS



- L'accompagnement aux toilettes doit être favorisé



- Un soin d'hygiène doit être prodigué lors de chaque change

### Exemple de protocole\*

	07H00	13H30	17H00	19H00	22H00	5H00
Changes	Slip M PLUS BLEU		Slip M PLUS BLEU		Slip M MAXI VIOLET	Slip M PLUS BLEU

\* Protocole réalisé depuis le progiciel de gestion TENA Client™

- ⚠ La garde-au-sec est garantie jusqu'à saturation complète de la protection. Lors des contrôles, celle-ci peut être maintenue en place en cas de non saturation (hors présence de selles ou problème spécifique nécessitant un change systématique).

## UN PROTOCOLE INDIVIDUALISÉ

### Adapter l'absorption en fonction du type et degré d'incontinence

Si besoin, recourir au calendrier mictionnel et à la fiche d'évaluation des protections.

**Modérée** 3 droplets

**PLUS**

- Jour / Fin de nuit
  - Selles fréquentes
  - Episode de diarrhées
  - Sonde urinaire à demeure
- 2017 ml\*

**Forte** 4 droplets

**SUPER**

- Jour/Nuit
- Patients sous diurétiques
- Patients diabétiques ou potomanes

2485 ml\*

**Sévère** 5 droplets

**MAXI**

3165 ml\*

**Sévère** 6 droplets

**ULTIMA**

4061 ml\*

\* Moyenne sur l'ensemble des tailles selon la Méthode Rothwell.  
Absorptions disponibles selon mercuriale.



TENA Slip est fabriqué grâce à l'énergie 100% renouvelable.



**Votre formateur**  
**Conseil TENA reste**  
**à votre écoute**

Les protections pour fuites urinaires TENA® sont des dispositifs médicaux de classe CE I, non stérile. Dispositifs non pris en charge par l'assurance maladie.  
Fabricant légal : Essity Hygiene and Health AB – 2023.



**LE TRI**  
**+ FACILE**

