

# TENA Pants ProSkin

Sous-vêtement **respirant**

INCONTINENCE  
MODÉRÉETROUBLES  
COGNITIFS

## TECHNIQUES DE POSE

- Ouvrir et déplier la protection sans la secouer.

**Une bonne pose évite les irritations cutanées et les fuites.**

- 1 Enfiler TENA Pants comme un sous-vêtement.
- 2 S'enlève également comme un sous-vêtement mais peut aussi être déchirée sur ses deux côtés.
- 3 S'assurer que les élastiques soient bien positionnés au creux des plis inguinaux.

Pose



## L'astuce TENA

- La couleur indiquant l'absorption se positionne à l'arrière du produit lorsqu'il est porté
- La protection n'est pas symétrique. Si le produit n'est pas positionné dans le bon sens cela peut provoquer des fuites, une sensation de produit trop échancré ou une sensation de taille plus petite.

## ADAPTER LA TAILLE

### Tableau d'équivalences

Taille vêtement	Tour de taille
XXS < 34	>> de 40 à 70 cm
XS 34-37	>> de 50 à 70 cm
S 38-41	>> de 65 à 85 cm
M 42-46	>> de 80 à 110 cm
L 48-60	>> de 100 à 135 cm
XL >60	>> de 120 à 160 cm
XXL <62	>> de 150 à 203 cm

### Carte d'identité de la protection

Absorption visible par un liseré de couleur sur la ceinture

- Pants Normal
- Pants Plus
- Pants Super

PLUS EN VIDÉO >>





## NOS RECOMMANDATIONS



Avant d'avoir recours au TENA Pants, penser aux protections anatomiques féminines et masculines (TENA Discreet/TENA Comfort Mini et TENA Men).

### Indications

- Patient allant seul aux toilettes
- Personne désorientée ou n'acceptant pas une protection classique
- Personne allant en kinésithérapie
- Pour les sorties, les pique-niques et retours dans la famille.

### Contre indications

- Incontinence lourde
- Incontinence fécale
- Personne dépendante

### Fréquence d'utilisation

- 1 TENA Pants par 24h maximum recommandé
- 2 par 24h si adapté au protocole de soin



## PROTOCOLE DE SOINS



- TENA Pants permet le maintien ou la restauration de l'autonomie du patient pour se rendre aux toilettes.

### Exemple de protocole\*

	07H00	13H30	17H00	19H00	22H00	05H00
Changes	Pants M PLUS BLEU					

\* Protocole réalisé depuis le progiciel de gestion TENA Client™



La garde-au-sec est garantie jusqu'à saturation complète de la protection. Lors des contrôles, celle-ci peut être maintenue en place en cas de non saturation (hors présence de selles ou problème spécifique nécessitant un change systématique).

## UN PROTOCOLE INDIVIDUALISÉ

### Adapter l'absorption en fonction du type et degré d'incontinence

Si besoin, recourir au calendrier mictionnel et à la fiche d'évaluation des protections.

#### Légère à Modérée



##### DISCREET

- Patient autonome
- 811 ml\*

#### Modérée



##### PLUS

- Patient autonome
- Sonde urinaire à demeure
- 1440 ml\*

#### Forte



##### SUPER

- Patient autonome
- 2010 ml\*

##### NORMAL

- Patient autonome
- 1010 ml\*

##### PLUS

- Patient autonome
- 1440 ml\*

##### SUPER

- Cas particulier
- Demandez conseil à votre contact TENA pour plus d'informations
- 2010ml\*

\* Moyenne sur l'ensemble des tailles selon la Méthode Rothwell.  
Absorptions disponibles selon mercuriale.



Votre formateur  
Conseil TENA reste  
à votre écoute

Les protections pour fuites urinaires TENA® sont des dispositifs médicaux de classe CE I, non stérile. Dispositifs non pris en charge par l'assurance maladie.  
Fabricant légal : Essity Hygiene and Health AB – 2022.



TENA Pants est fabriqué grâce à l'énergie 100% renouvelable.



LE TRI  
+ FACILE

