

# ABENA Pants Special M-L2, Premium

## INCONTINENCE

### ABENA Pants SPECIAL M-L2



80 – 135 cm

SPECIAL  
S-M2SPECIAL  
M-L2

UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME / ACTIVITE PHYSIQUE

INCONTINENCE SÉVÈRE

TYPE BOXER

## Description

ABENA Pants Special est la gamme premium de culottes absorbantes, type boxer, conçue pour solutionner l'incontinence lors de la pratique d'une activité physique intense. ABENA Pants Special s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne et élastiquée, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion lors de l'utilisation.



### Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.


### 100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



### Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

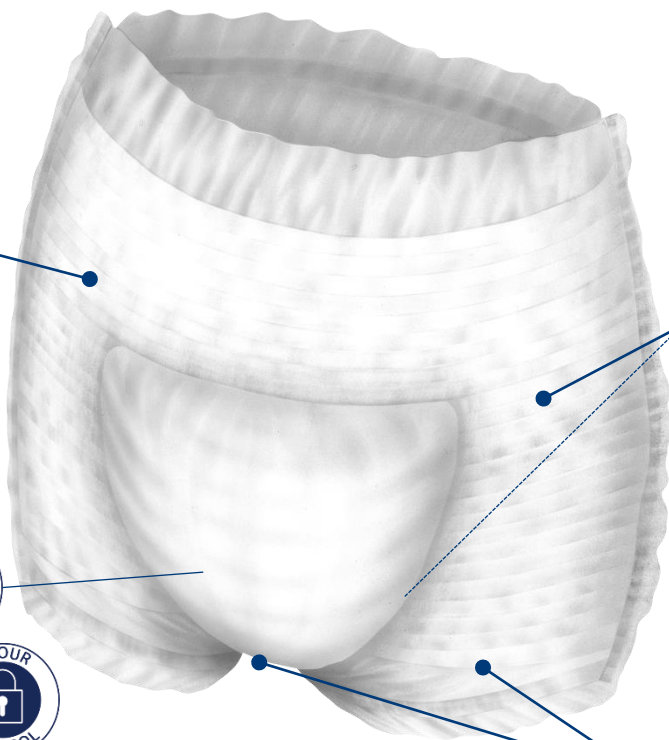

### Dispositifs anti-fuites

L'association de renforts élastiqués sur les jambes et de barrières anti-fuites permet une protection totale lors des mouvements.

### Elasticité unique

L'élasticité unique, sur les jambes et à l'entrejambe, offre une sécurité ultime pendant une activité physique.



# ABENA Pants Special M-L2, Premium

## DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	810 mm – 760 mm
Poids (+/-10%) :	86,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical  
Classe 1  
MDR (EU) 2017/745



Le produit ne contient pas  
de latex



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 11948-1  
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Japon


Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
18	5703538458477	1 566	26 x 18 x 35	108	4 couches de 3 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
6	5703538458613	10 138	78,6 x 38,5 x 37	12	163




# ABENA Pants Special M-L2, Premium

## GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants Special M-L2 est à utiliser dans le cadre d'activités physiques, pour une protection optimale. Tour de hanches: 80-135 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.

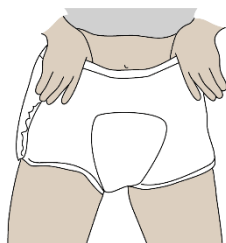

1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

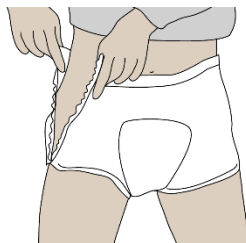

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

## RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE ABENA PANTS PREMIUM



### ABENA Pants Premium



5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

## PRODUITS ASSOCIÉS



Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

[www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

